

Οδηγίες Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Aidplex Scoliosense 2.0.8

Διεύθυνση: Βασιλέως Ηρακλείου 40 Θεσσαλονίκη, 54623

Τηλέφωνο: 2316014433

Email: info@aidplex.com

Τελευταία τροποποίηση: 19-12-2023



Οδηγίες Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφορμας

Αυτό το εγχειρίδιο αφορά τη διαδικτυακή πλατφόρμα του **ScolioSense** προϊόν της **Aidplex**. Το περιεχόμενο πληροφοριών αυτού του εγχειριδίου ανήκει στην **Aidplex** και παρέχεται μόνο για τον χειρισμό συσκευών και λογισμικού της **Aidplex**.

Αυτό το εγχειρίδιο υπόκειται σε τροποποιήσεις. Η πιο πρόσφατη έκδοση είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση www.aidplex.com.

Κατασκευαστής: **Aidplex**

Διεύθυνση: Βασιλέως Ηρακλείου 40 Θεσσαλονίκη, 54623

Email: info@aidplex.com

Τελευταία τροποποίηση: 19-12-2023

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα	2
Εισαγωγή	3
Σχετικά με την εταιρεία	3
Σημαντική σημείωση ασφαλείας	3
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ	3
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ	4
Προειδοποιήσεις και Προφυλάξεις	4
Γενικές Συνθήκες Λειτουργίας	4
Λειτουργικό περιβάλλον	4
Διαδικτυακή Πλατφόρμα ScolioSense	5
Προσόντα χρήστη	5
Περιγραφή	5
Οφέλη	5
Ξεκίνημα	6
Εγγραφή νέου χρήστη	6
Σύνδεση λογαριασμού χρήστη	6
Σελίδα Ασθενών (My patients)	7
Σελίδα ασθενών για ιατρούς	7
Προσθήκη ασθενών	11
Σελίδα Ασθενών για κατασκευαστές κηδεμόνων	15
Προσθήκη ασθενών	15
1. Για ασθενείς που έχουν επισκεφθεί ιατρό που συνεργάζεται με το σύστημα ScolioSense	15
2. Για ασθενείς που έχουν επισκεφθεί ιατρό που δε συνεργάζεται με το σύστημα ScolioSense	15
Ο Λογαριασμός μου (My Profile)	16
Καρτέλα Ασθενή (Patient details)	18
Καρτέλα Ασθενή για ιατρούς	18
Edit patient	22
Ρύθμιση κηδεμόνα-Calibration	23
Help	27
Forgot password	27
SMS Report	28
Αντιμετώπιση προβλημάτων	29
Νομικές πληροφορίες	30
Πολιτική εξυπηρέτησης	31
Προειδοποίηση	31
Στοιχεία επικοινωνίας	31

Εισαγωγή

Ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της **Aidplex**.

Το **ScolioSense** είναι ένα σύστημα που προορίζεται να διασφαλίσει την καλή ποιότητα χρήσης του κηδεμόνα σκολίωσης που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της σκολίωσης. Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης και διασφάλισης της πορείας της θεραπείας με κηδεμόνα και τη δυνατότητα ενημέρωσης των ασθενών για την κατάλληλη τοποθέτηση του κηδεμόνα με βάση τις οδηγίες του κλινικού ιατρού.

Το **ScolioSense** αποτελείται από:

1. Τη φορητή συσκευή **ScolioSense** που διαθέτει αισθητήρες πίεσης και τοποθετείται στον κηδεμόνα σκολίωσης.
2. Την εφαρμογή λογισμικού για φορητές συσκευές **ScolioSense app** για ασθενείς με σκολίωση.
Η εφαρμογή χρησιμοποιείται για την καταγραφή της διάρκειας χρήσης του κηδεμόνα και για να υπενθυμίσει στον ασθενή την κατάλληλη τοποθέτηση του κηδεμόνα με βάση τις οδηγίες του επιβλέποντα ιατρού.
3. Διαδικτυακή πλατφόρμα για τη διασφάλιση της τήρησης της σωστής πορείας θεραπείας των ασθενών με το κηδεμόνα και της ποιότητας του χρόνου χρήσης του κηδεμόνα κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Σχετικά με την εταιρεία

Η **Aidplex** δραστηριοποιείται στον τομέα της υγείας με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών, ξεκινώντας με αυτούς της σκολίωσης.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία στο www.aidplex.com.

Σημαντική σημείωση ασφαλείας

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Η φορητή συσκευή **ScolioSense** δεν προορίζεται για οποιαδήποτε χρήση εκτός του κηδεμόνα σκολίωσης.
- Το **ScolioSense app** δεν προορίζεται για οποιαδήποτε χρήση παρά μόνο αποκλειστικά για ασθενείς σκολίωσης και χρήστες του συστήματος της **Aidplex** με την άδεια του αρμόδιου ιατρού.
- Η διαδικτυακή πλατφόρμα δεν προορίζεται για οποιαδήποτε χρήση εκτός του επιβλέποντα ιατρού και εξουσιοδοτημένου κατασκευαστή κηδεμόνων.
- Το **ScolioSense** δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν κατάλογος ασθενών.

- Η διαδικασία της ρύθμισης του κηδεμόνα (calibration) της διαδικτυακής πλατφόρμας δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της τοποθέτησης του κηδεμόνα παρά μόνο για την αποτύπωση της ενδεδειγμένης χρήσης που έχει ορίσει ο επιβλέπων ιατρός.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Το **ScolioSense** ενδείκνυται για:

- Τη χρήση της mobile εφαρμογής **ScolioSense app** για φορητές συσκευές και της φορητής συσκευής κηδεμόνα από ασθενείς σκολίωσης που ακολουθούν θεραπεία με τη χρήση κηδεμόνα σκολίωσης.
- Τη χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας από επιβλέποντες ιατρούς ή εξουσιοδοτημένο κατασκευαστή κηδεμόνων με ασθενείς που ακολουθούν θεραπεία σκολίωσης με τη χρήση κηδεμόνων σκολίωσης και χρησιμοποιούν το σύστημα **ScolioSense**.
- Την εξασφάλιση και διασφάλιση της σωστής πορείας της θεραπείας σκολίωσης με τη χρήση κηδεμόνα σκολίωσης.
- Τη διασφάλιση της τοποθέτησης αλλά και χρήσης του κηδεμόνα σύμφωνα με τις οδηγίες του επιβλέποντα ιατρού.
- Τη διαδικασία της ρύθμισης του κηδεμόνα (calibration), η οποία θα πρέπει να εκτελείται μόνο από τον επιβλέποντα γιατρό με σκοπό την αποτύπωση της ενδεδειγμένης τοποθέτησης του κηδεμόνα στον ασθενή.

Προειδοποιήσεις και Προφυλάξεις

- Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση του συστήματος **ScolioSense** πέραν της ενδεδειγμένης.
- Η διαδικτυακή εφαρμογή **ScolioSense** θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από επιβλέποντες ιατρούς και εξουσιοδοτημένους κατασκευαστές κηδεμόνων για ασθενείς που ακολουθούν θεραπεία σκολίωσης με τη χρήση κηδεμόνων σκολίωσης και χρησιμοποιούν το σύστημα **ScolioSense**.

Γενικές Συνθήκες Λειτουργίας

Λειτουργικό περιβάλλον

Για την προσπέλαση της διαδικτυακής πλατφόρμας ο χρήστης πρέπει να έχει να ενημερωμένο πρόγραμμα περιήγησης ιστού. Το **ScolioSense** υποστηρίζει πρόσφατες εκδόσεις του Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Microsoft Edge και των προγραμμάτων περιήγησης για κινητά iOS και Android.

Διαδικτυακή Πλατφόρμα ScolioSense

Προσόντα χρήστη

Η διαδικτυακή πλατφόρμα **ScolioSense** αναφέρεται σε ιατρικό προσωπικό ή εξουσιοδοτημένο προσωπικό κατασκευαστών στον τομέα της θεραπείας της σκολίωσης. Οι χρήστες της εφαρμογής είναι επιβλέποντες γιατροί ή κατασκευαστές κηδεμόνων που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα **ScolioSense** για να παρακολουθούν τους ασθενείς τους με τη φορητή συσκευή **ScolioSense** και την εφαρμογή κινητού **ScolioSense app**. Το **ScolioSense app** χρησιμοποιείται από τους ασθενείς σκολίωσης για την καταγραφή της διάρκειας χρήσης του κηδεμόνα και την υπενθύμιση σχετικά με την ενδεδειγμένη τοποθέτηση του κηδεμόνα με βάση τις οδηγίες του επιβλέποντα ιατρού.

Περιγραφή

Η διαδικτυακή πλατφόρμα διαθέτει 7 σελίδες:

1. Σελίδα σύνδεσης χρήστη: Μέσα από αυτή τη σελίδα ο χρήστης με τα στοιχεία σύνδεσής του πραγματοποιεί την είσοδο μέσα στην πλατφόρμα.
2. Σελίδα εγγραφής χρήστη (Register): Μέσα από αυτή τη σελίδα χρήστης μπορεί να στείλει αίτημα εγγραφής στην πλατφόρμα.
3. Σελίδα ασθενών (Dashboard): Η κεντρική σελίδα της πλατφόρμας του **ScolioSense**. Περιέχει μια σύνοψη των ασθενών του χρήστη καθώς και συγκεντρωτικά γραφήματα με πληροφορίες για τους ασθενείς.
4. Σελίδα καρτέλας ασθενή (Patient Details): Σελίδα που περιέχει αναλυτικές πληροφορίες για τον ασθενή και την θεραπεία του.
5. Σελίδα επεξεργασίας στοιχείων ασθενή (Patient Edit): Μέσα από αυτή την σελίδα ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί τις πληροφορίες του ασθενή.
6. Σελίδα προφίλ (Profile) : Μέσα από αυτή την σελίδα ο χρήστης μπορεί να αλλάξει τα στοιχεία του και τον κωδικό πρόσβασης για την πλατφόρμα **ScolioSense**.
7. Σελίδα βοήθειας (Help): Μέσα από αυτή την σελίδα ο χρήστης μπορεί να διαβάσει τις ενημερωμένες οδηγίες χρήσης της διαδικτυακής πλατφόρμας

Οφέλη

Η διαδικτυακή πλατφόρμα είναι απαραίτητη για την προτεινόμενη λειτουργία του **ScolioSense**. Μέσα από την πλατφόρμα ο χρήστης έχει την επίβλεψη των ασθενών για την ενδεδειγμένη θεραπεία της σκολίωσης. Με τη διαδικτυακή πλατφόρμα ο χρήστης ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για την πορεία της θεραπείας για κάθε ασθενή του και επιπλέον μπορεί να ορίσει την πορεία τη θεραπείας με τον κηδεμόνα

Ξεκίνημα

Για να επισκεφθείτε τη διαδικτυακή πλατφόρμα του **ScolioSense** μπορείτε να πατήσετε στον σύνδεσμο που ακολουθεί [Σύνδεσμος Διαδικτυακής Πλατφόρμας](#).


Εγγραφή νέου χρήστη

Για την εγγραφή σας στη διαδικτυακή πλατφόρμα **ScolioSense** θα πρέπει να πατήσετε τον [σύνδεσμό](#). Στη σελίδα που θα βρεθείτε θα πρέπει να συμπληρώσετε τη διεύθυνση email σας και ένας εκπρόσωπος της **Aidplex** θα έρθει σε επαφή μαζί σας για τη δημιουργία του λογαριασμού.

Thank you for your interest!

The registration process for Doctors and Manufacturers is **currently closed**.

To stay updated please provide us with your email address, and we will notify you accordingly when you are eligible to apply.

Notify me

[Already Have Account? Login now](#)

Σύνδεση λογαριασμού χρήστη

Μετά τη δημιουργία του λογαριασμού σας από τον εκπρόσωπο της **Aidplex**, θα μπορείτε να συνδεθείτε στη διαδικτυακή πλατφόρμα του **ScolioSense** σε αυτό τον [σύνδεσμο](#).

Στη σελίδα σύνδεση θα πρέπει να συμπληρώσετε τα στοιχεία σύνδεσης σας, ώστε να πραγματοποιηθεί η σύνδεση στην πλατφόρμα του **ScolioSense**.

Login

Enter your email address and password to login on the ScolioSense platform for Doctors and Manufacturers.

demo@aidplex.com

.....



Remember Me

[Forgot your password?](#)

Sign in

[New to ScolioSense? Join now](#)

Σελίδα Ασθενών (My patients)

Σελίδα ασθενών για ιατρούς

Κάτω από αυτή την ενότητα μπορείτε να δείτε τη λίστα με τους ασθενείς σας. Η λίστα περιέχει το Όνομα και το Επώνυμό τους, τον Τύπο Σκολίωσης, τον Μέσο Χρόνο Φορέματος του κηδεμόνα και τις Ειδοποιήσεις.

Τύπος Σκολίωσης: Ο τύπος σκολίωσης υποδεικνύει την ταξινόμηση της σκολίωσης των ασθενών του χρήστη σε τύπο S ή τύπο C.

Μέσος χρόνος φορέματος: Ο Μέσος Χρόνος φορέματος είναι μια μέτρηση για κάθε ασθενή που υποδεικνύει εάν ένας ασθενής έχει επιτύχει τον στόχο του μέσου χρόνου φορέματος ανά ημέρα. Ο μέσος χρόνος φορέματος γίνεται πράσινος όταν ο ασθενής έχει ίδιο ή μεγαλύτερο μέσο χρόνο φορέματος και κόκκινο αν έχει μικρότερο μέσο χρόνο φορέματος από αυτό που έχει οριστεί. Τοποθετώντας το δείκτη του ποντικιού πάνω από τον Μέσο Χρόνο φορέματος του ασθενούς, μπορείτε να δείτε τον αριθμό των συνιστώμενων ωρών χρήσης.

Average Wearing Time



Alerts



19

Recommended Wearing Hours 17

Ειδοποιήσεις : Οι ειδοποιήσεις υποδεικνύουν εάν ο ασθενής δεν είχε δεδομένα για τις τελευταίες 3 ή 7 ημέρες. Εάν ο ασθενής δεν είχε δεδομένα για τις τελευταίες 3 ημέρες, θα εμφανιστεί ένα πορτοκαλί προειδοποιητικό σημάδι [1]. Εάν ο ασθενής σας δεν είχε δεδομένα για τις τελευταίες 7 ημέρες θα εμφανιστεί ένα κόκκινο προειδοποιητικό σημάδι [2].

▲ [1]

Patient has no data for the last 3 days

▲ [2]


Patient has no data for the last 7 days

My Patients					Search
First Name	Last Name	Scoliosis Type	Average Wearing Time	Alerts	
Patient 1	Patient	C	0	▲	
Patient 2	Patient	C	0	▲	
Patient 3	Patient	C	4	▲	
Patient 4	Patient	C	20	▲	
Patient 5	Patient	C	0		

Previous **1** 2 Next ⌂

1. Πατώντας το κουμπί + στο κάτω μέρος της λίστας ασθενών, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν [καινούργιο λογαριασμό ασθενή](#) στην πλατφόρμα.
2. Μέσα από τη γραμμή αναζήτησης μπορείτε εύκολα και γρήγορα να αναζητήσετε τους ασθενείς σας.
3. Η λίστα με τους ασθενείς μπορεί να παρουσιάσει μέχρι και 5 ασθενείς σε κάθε σελίδα. Για την περιήγηση στους υπόλοιπους ασθενείς σας θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά, στο κάτω μέρος της λίστας.


Adherence

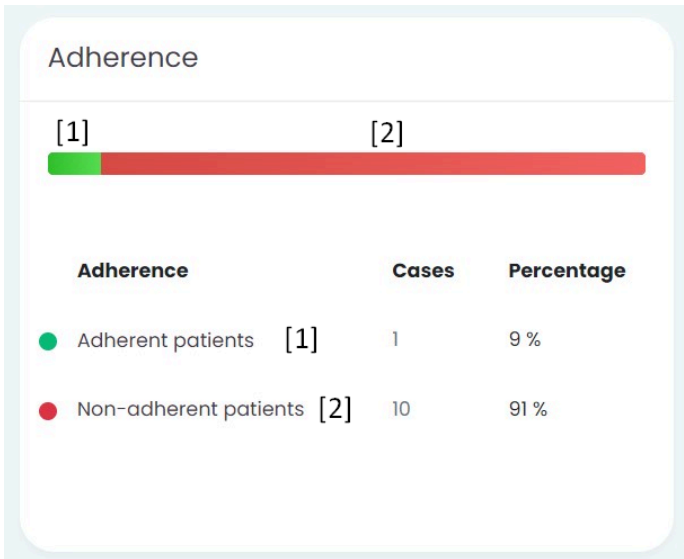

Στο κάτω μέρος της Σελίδας των Ασθενών, υπάρχει ένα συγκεντρωτικό γράφημα που περιέχει τον αριθμό των ασθενών σας που φορούν τον κηδεμόνα

1. Ακολουθώντας τις οδηγίες του επιβλέποντα ιατρού
2. Παραβλέποντας τις οδηγίες του επιβλέποντα ιατρού

Overview

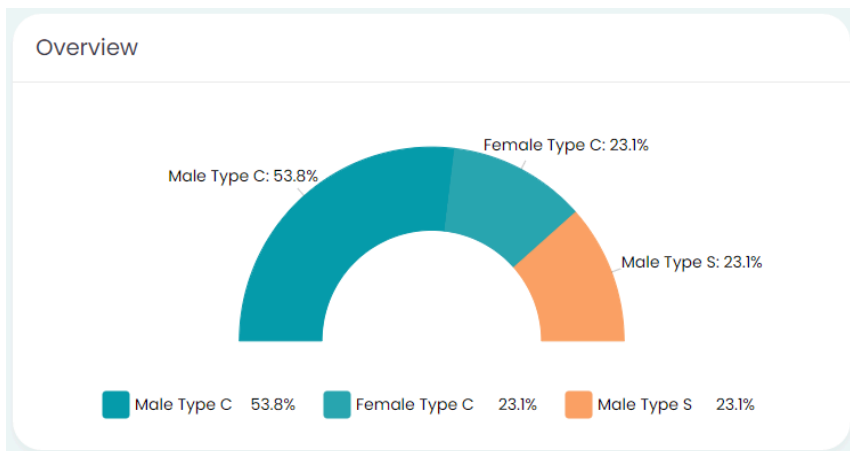

Δίπλα από το γράφημα του Adherence υπάρχει ένα συγκεντρωτικό γράφημα που περιέχει τους ασθενείς σας ομαδοποιημένους σύμφωνα με το φύλο και τον τύπο της σκολίωσης.

Προσθήκη ασθενών

Για την εγγραφή ενός νέου ασθενούς θα πρέπει να συμπληρώσετε τα ορισμένα στοιχεία του ασθενή. Στην ενότητα πληροφορίες λογαριασμού (Account information), θα πρέπει να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία του ασθενή:

1. Όνομα
2. Επώνυμο
3. Email (αυτό το email θα χρησιμοποιηθεί από τον ασθενή για να συνδεθεί στην εφαρμογή **ScolioSense**)
4. Αριθμό τηλεφώνου του γονέα ή κηδεμόνα
5. Γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί για το [εβδομαδιαίο report](#).

Register new patient

Account Personal Treatment Finish

Account Information: Step 1 - 4

Fields with asterisk (*) are required

First Name: Jenny

Last Name: Thomson

Email*: sample@mail.com

Guardian's phone number*: Greece (+30) 012 345 6789

Guardian's weekly SMS report language: English Ελληνικά

Next

Στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στο κουμπί **Next**, θα μεταφερθείτε στο δεύτερο στάδιο της εγγραφής.

Στην ενότητα προσωπικά στοιχεία (**Personal information**), θα πρέπει να συμπληρώσετε:

1. Ημερομηνία γέννησης
2. Φύλο
3. Βάρος
4. Ζώνη ώρας
5. Ύψος
6. Τοποθεσία

Κάνοντας κλικ στο κουμπί **Next** θα μεταφερθείτε στο 3 στάδιο της εγγραφής του ασθενούς, η οποία περιέχει περισσότερα στοιχεία σχετικά με τη θεραπεία.

The screenshot shows a web form titled "Register new patient" with four navigation buttons: "Account" (green), "Personal" (dark grey, active), "Treatment" (light grey), and "Finish" (light grey). The "Personal Information" section is titled "Step 2 - 4" and contains the following fields:

- Date of birth* (empty text input)
- Time Zone (dropdown menu showing "(GMT +2:00) Helsinki, Athens")
- Sex (radio buttons for "Male" and "Female", with "Male" selected)
- Height (cm) (text input with value "128")
- Weight (kg) (text input with value "45")
- Location (text input with value "Athens, Greece")

At the bottom right of the form, there are "Back" and "Next" buttons.

Στην ενότητα πληροφορίες θεραπείας (**Treatment**), θα πρέπει να συμπληρώσετε τον τύπο της σκολίωσης, τις αρχικές τιμές της γωνίας Cobb με τον κηδεμόνα αλλά και χωρίς τον κηδεμόνα. Στην περίπτωση που ασθενής έχει καμπύλη σκολίωσης τύπου S τότε πρέπει να συμπληρώσετε τα στοιχεία της δεύτερης γωνίας Cobb. Τέλος, θα πρέπει να συμπληρώσετε την ταξινόμηση Risser και συνιστώμενες ώρες χρήσης του κηδεμόνα.

Register new patient



Treatment Information:

Step 3 - 4

Scoliosis Curve

Type C Type S

Recommended Wearing Hours

18

Starting Cobb Angle 1

Cobb Angle 1 with brace

Risser Classification

Stage 0

Manufacturer

Jim Moustakas

Η επιλογή Include the upper limit of the sensors, αφαιρεί το πάνω όριο των αισθητήρων.

Risser Classification: Stage 0

Manufacturer: Jim Moustakas

Include the upper limit of the sensors? Yes No

By removing the upper limit, the patient's adjustment page will be restricted to display solely the lower limit

Arranging the position of the sensors


Όπως φαίνεται και στις παρακάτω εικόνες. Στην πρώτη εικόνα, για τους 2 αισθητήρες υπάρχει το άνω όριο και στους 2 αισθητήρες.

Sensor calibration

Right Pelvic

Left Thoracolumbar

Στη δεύτερη εικόνα έχει αφαιρεθεί το ανώτατο όριο, αυτό σημαίνει πως ο ασθενής θα πρέπει να περάσει μόνο το κατώτατο όριο για να ρύθμιση τον κηδεμόνα

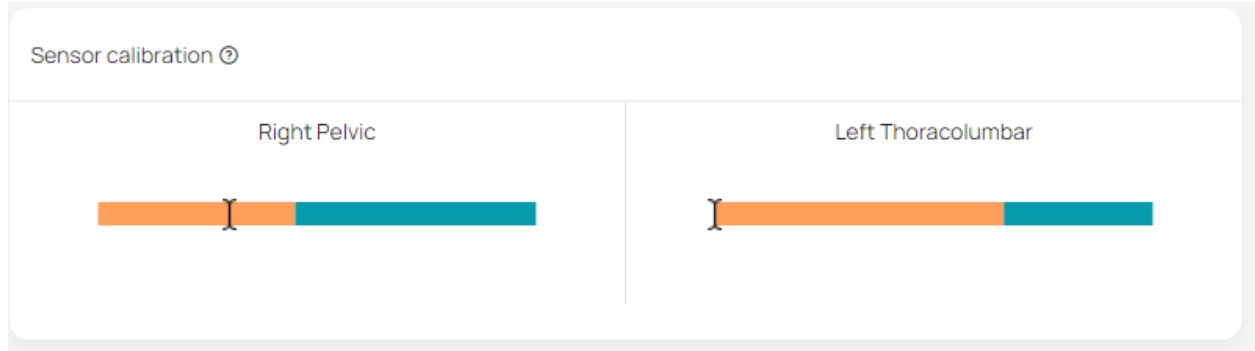

Έπειτα θα πρέπει να καθορίσετε το πλήθος των αισθητήρων (μέγιστο 3) που θα χρησιμοποιηθούν με τη συσκευή ScolioSense με τα ονόματά τους. Για το όνομα των αισθητήρων μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα προεπιλεγμένα ονόματα, είτε να δημιουργήσετε το δικό σας

Arranging the position of the sensors

- The sensors should be placed at the peaks of the pressure areas without altering or hindering the structure of the brace. The system can support up to three sensors.
- The main module should be placed on the outer surface of the brace in a way that it would not hinder the patient's comfort.

Number of Sensors

Sensor Name 1 * ⓘ

Right Lumbar

Sensor Name 2 * ⓘ

Custom Sensor Name

Back


Next

Τέλος, πατώντας το κουμπί Next θα ολοκληρώσετε την διαδικασία εγγραφής ενός νέου ασθενή στην πλατφόρμα (ένα αυτοματοποιημένο email θα σταλεί στο email του ασθενή σας).

Σελίδα Ασθενών για κατασκευαστές κηδεμόνων

Κάτω από αυτή την ενότητα μπορείτε να δείτε τη λίστα με τους ασθενείς σας. Η λίστα περιέχει το Όνομα και το Επώνυμό τους και τον Τύπο Σκολίωσης του ασθενή.

Τύπος Σκολίωσης: Ο τύπος σκολίωσης υποδεικνύει την ταξινόμηση της σκολίωσης των ασθενών του χρήστη σε τύπο S ή τύπο C.

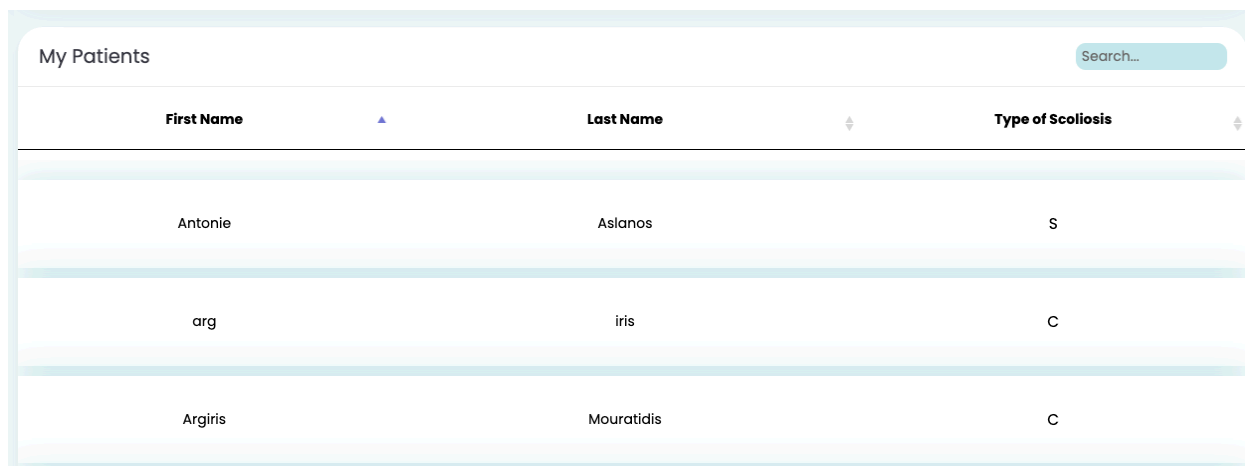

First Name	Last Name	Type of Scoliosis
Antonie	Aslanos	S
arg	iris	C
Argiris	Mouratidis	C


Προσθήκη ασθενών

Ως κατασκευαστής έχετε να διαχειριστείτε ασθενείς από διαφορετικούς ιατρούς είτε ασθενείς οι οποίοι έρχονται σε εσάς πριν επισκεφθούν κάποιον ιατρό. Για αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες που ακολουθούν:

- Για ασθενείς που έχουν επισκεφθεί ιατρό που συνεργάζεται με το σύστημα ScolioSense*
Όταν ένας ιατρός εισάγει έναν ασθενή στην πλατφόρμα τότε θα πρέπει να τον αντιστοιχήσει με κάποιον κατασκευαστή ώστε να πραγματοποιηθεί η κατασκευή του κηδεμόνα σκολίωσης και η εγκατάσταση της συσκευής ScolioSense. Επομένως, τη στιγμή που θα αντιστοιχηστεί κάποιος ασθενής με εσάς η καρτέλα του θα συνδεθεί και στη δική σας λίστα ασθενών, χωρίς να πρέπει να πραγματοποιήσετε κάποια διαδικασία.
- Για ασθενείς που έχουν επισκεφθεί ιατρό που **δε** συνεργάζεται με το σύστημα ScolioSense*
Στην περίπτωση που ο ιατρός δε συνεργάζεται με το σύστημα ScolioSense, τότε η Aidplex θα επικοινωνήσει μαζί του και η καρτέλα του ασθενή θα δημιουργηθεί είτε από τον ίδιο τον ιατρό είτε από την Aidplex για εσάς.

Ο Λογαριασμός μου (My Profile)

Για να δείτε τον λογαριασμό σας μπορείτε να επιλέξετε το όνομά σας και στην συνέχεια την επιλογή my profile είτε επιλέγοντας το εικονίδιο του profile από την γραμμή πλοήγησης.

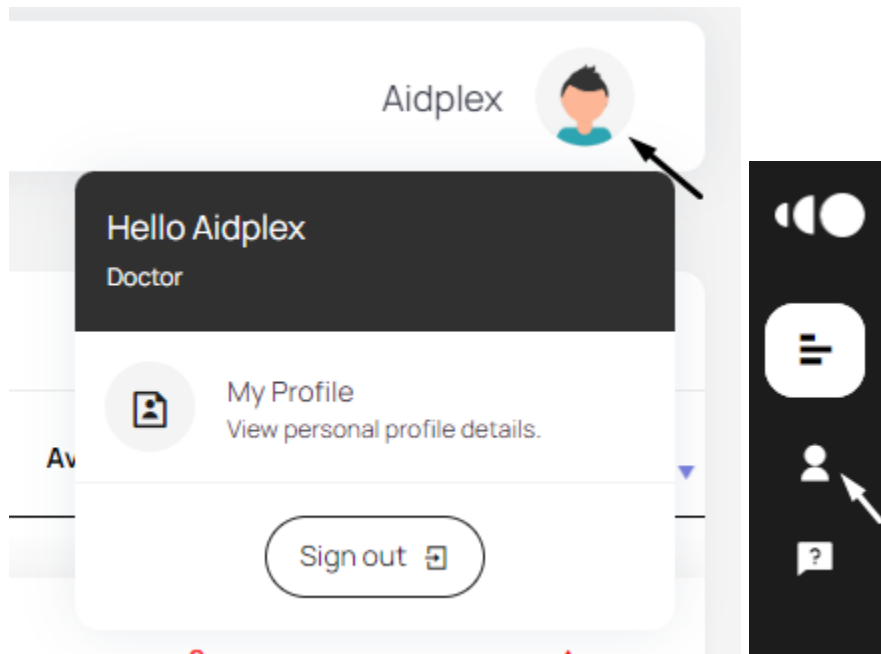

Μέσα από την οθόνη του προφίλ μπορείτε να αλλάξετε τα παρακάτω

1. Όνομα
2. Επίθετο
3. Αριθμό τηλεφώνου

Σημαντικό: Το email[3] δεν μπορεί να αλλάχθει. Σε περίπτωση που επιθυμείτε αλλαγή της διεύθυνσης email, επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα στο support@aidplex. Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας θα πρέπει να επιλέξετε το κουμπί [5].

Personal Information	Change Password [6]
Personal Information	
First Name: Aidplex [1]	Last Name: [2]
Email: aidplex@gmail.com [3]	Phone Number: 6971554267 [4]
Save changes [5]	

Αν επιθυμείτε να αλλάξετε τον κωδικό σύνδεσής σας θα πρέπει να επιλέξετε την καρτέλα [6]

Personal Information

Change Password

Change Password

Current Password:

..... [1]

New Password:

..... [2]

Confirm Password:

..... [3]

Submit

Στην οθόνη αλλαγή κωδικού, για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης σας, θα πρέπει να εισάγετε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης[1]. Στην περίπτωση που ο κωδικός πρόσβασης δεν είναι σωστός εμφανίζεται το κατάλληλο μήνυμα λάθους, όπως φαίνεται παρακάτω. Στη συνέχεια θα πρέπει να εισάγετε τον νέο κωδικό[2] και να τον επιβεβαιώσετε στο πεδίο[3].


Current Password: **Your password was incorrect.**

Για την αποθήκευση του νέου κωδικού πρόσβασης θα πρέπει να επιλέξετε το κουμπί Submit.

Καρτέλα Ασθενή (Patient details)

Καρτέλα Ασθενή για ιατρούς

Για να δείτε αναλυτικές πληροφορίες ενός ασθενή σας θα πρέπει να επιλέξετε τον ασθενή από τον κατάλογο της σελίδα ασθενών.

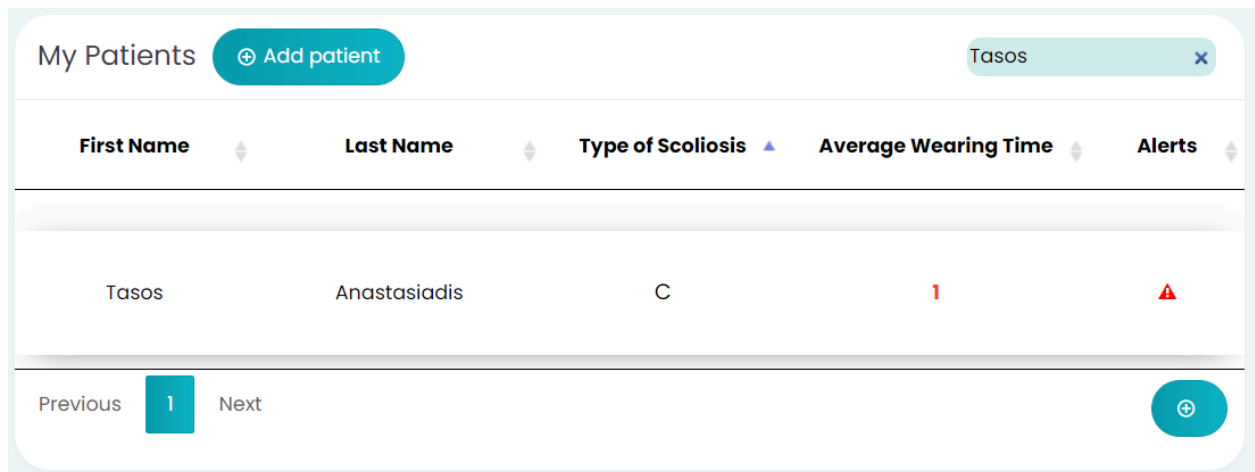

The screenshot shows a web interface for 'My Patients'. At the top, there is a search bar containing 'Tasos' and an 'Add patient' button. Below this is a table with the following columns: 'First Name', 'Last Name', 'Type of Scoliosis', 'Average Wearing Time', and 'Alerts'. The table contains one row with the following data: 'Tasos', 'Anastasiadis', 'C', '1', and a red warning icon. At the bottom of the table, there are navigation buttons for 'Previous', '1', and 'Next', along with a plus icon in a circle.

First Name	Last Name	Type of Scoliosis	Average Wearing Time	Alerts
Tasos	Anastasiadis	C	1	⚠

Στο πρώτο μέρος της οθόνης με τις λεπτομέρειες του χρήστη εμφανίζονται μερικά προσωπικά στοιχεία του ασθενή σας όπως:

1. Το βάρος
2. Το ύψος
3. Η τρέχουσα γωνία Cobb, (στην περίπτωση που ασθενής έχει σκολίωση τύπου S τότε εμφανίζονται και οι δυο γωνίες Cobb),
4. Η ηλικία
5. Η τοποθεσία του ασθενή


Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα στοιχεία του ασθενή σας, πατώντας το κουμπί [6] ώστε να μεταφερθείτε στην [Σελίδα τροποποίησης στοιχείων ασθενή](#).

Tasos Anastasiadis
14 years old, Thessaloniki

[1] Weight 65kg	[4] Height 157cm	[5] [3] Cobb Angle 1 45°
--------------------	---------------------	-----------------------------

[6]


Κάτω από τα προσωπικά στοιχεία, βρίσκονται τα γραφήματα πιέσεων των αισθητήρων του ασθενούς. Το ενδεδειγμένο εύρος που έχει οριστεί από την ενδεδειγμένη τοποθέτηση του κηδεμόνα, εμφανίζεται με το ανοιχτό μπλε. Με τη μαύρη γραμμή υποδεικνύεται η πίεση που καταγράφηκε στον τελευταίο έλεγχο τοποθέτησης του κηδεμόνα που πραγματοποίησε ο ασθενής.

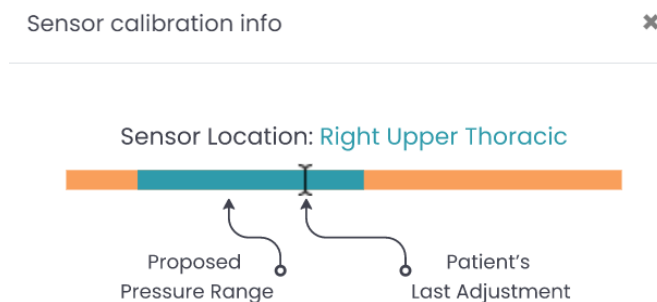

Δίπλα από τις πληροφορίες του ασθενούς υπάρχει το συγκεντρωτικό γράφημα χρήσης του συστήματος **ScolioSense**. Κάθε μπάρα αντιπροσωπεύει μια μέρα χρήσης του συστήματος. Με το ανοιχτό μπλε εμφανίζονται οι ώρες φορέματος με τοποθέτηση εντός του ενδεδειγμένου εύρους τοποθέτησης του κηδεμόνα[2] και με πορτοκαλί οι ώρες εκτός του ενδεδειγμένου εύρους τοποθέτησης του κηδεμόνα. Τοποθετώντας το δείκτη του ποντικιού πάνω από μια μπάρα εμφανίζονται περισσότερες πληροφορίες για τη συγκεκριμένη ημέρα[2]. Η μαύρη γραμμή[3]

συμβολίζει τις ενδεδειγμένες ώρες χρήσης του κηδεμόνα. Από τα πλαίσια στο πάνω μέρος του γραφήματος μπορείτε να ορίσετε ένα προσαρμοσμένο διάστημα ημερών[1].

Wearing Time In Hours

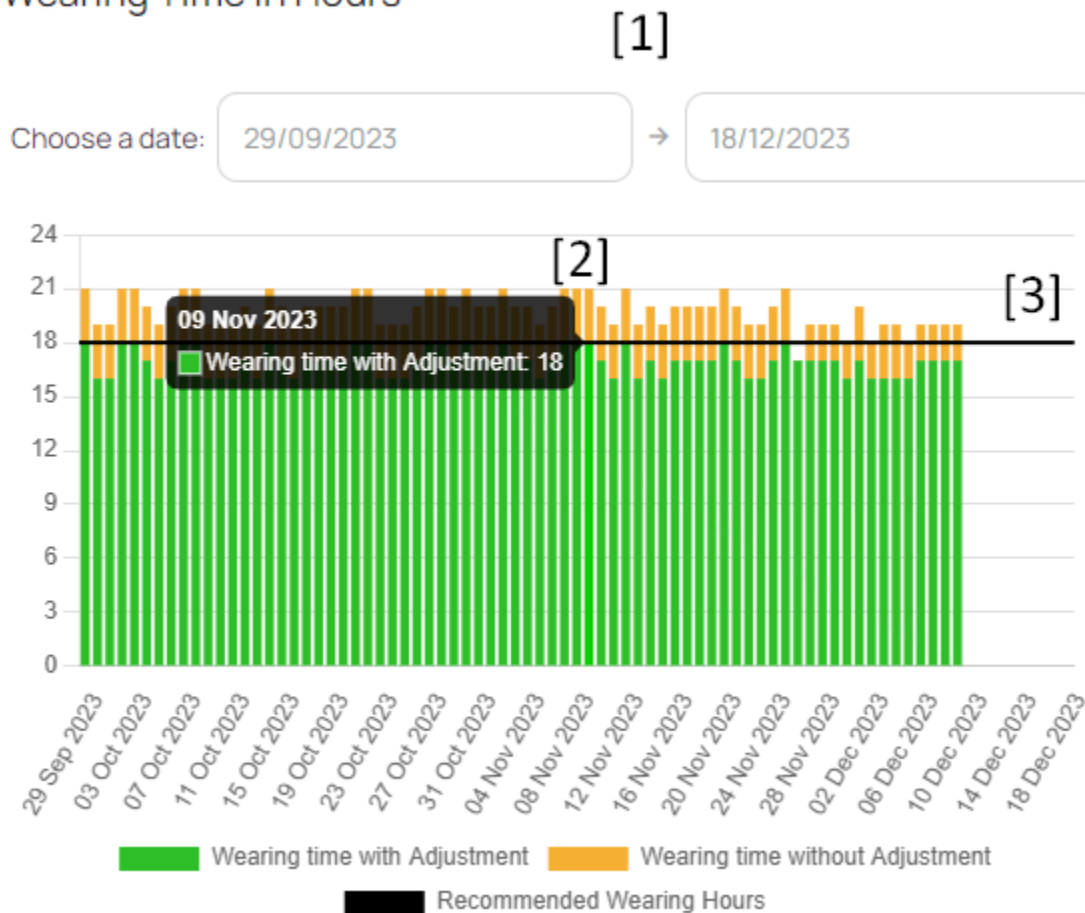

Δίπλα από το γράφημα χρήσης, παρουσιάζονται πληροφορίες σχετικές με την πορεία της θεραπείας όπως:

1. Η ημερομηνία που ξεκίνησε την θεραπεία(ημερομηνία εγγραφής στο **ScolioSense**),
2. Η μέτρηση Risser
3. Η γωνία Cobb
4. Η γωνία Cobb φορώντας τον κηδεμόνα (στην περίπτωση που ο ασθενής έχει σκολίωση τύπου S τότε εμφανίζονται και οι δυο γωνίες Cobb).

Τέλος, για να ξεκινήσετε τη [διαδικασία ρύθμισης του κηδεμόνα](#) θα πρέπει να πατήσετε το κουμπί **Start Calibration**[1]

Status

Started on
29 September 2023

Risser classification
Stage 4

Starting Cobb Angle 1
45

Cobb Angle 1 with brace
43

Starting Cobb Angle 2
27

Cobb Angle 2 with brace
23

Calibrated by:
Demo Doctor

Start Calibration

[1]

Edit patient

Μέσα από την σελίδα επεξεργασίας του ασθενούς, μπορείτε να επεξεργαστείτε όλες τις πληροφορίες του ασθενούς.

Η διαγραφή ασθενή γίνεται μέσα από το κουμπί [1] Remove Patient.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διαγραφή ασθενή είναι μη αναστρέψιμη!

Για την αλλαγή την φορητής συσκευής ενός ασθενή θα πρέπει να επιλέξετε το κουμπί Change **ScolioSense**[2]. Μετά την αλλαγή της συσκευής θα πρέπει να γίνει εκ νέου ρύθμιση.

Σε περίπτωση που αλλάξετε τον αριθμό των αισθητήρων ή τις θέσεις των αισθητήρων τότε θα πρέπει να ξαναγίνει εκ νέου η διαδικασία [ρύθμισης](#) [3].


Για την αποθήκευση των αλλαγών θα πρέπει να επιλέξετε το κουμπί Submit [4].

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την αποθήκευση των αλλαγών, μπορείτε να μεταφερθείτε στην καρτέλα του ασθενούς χωρίς αποθήκευση πατώντας το Cancel Without Saving.

The screenshot shows a 'Personal Information' form for a patient named Tasos Anastasiadis. The form is divided into two columns. The left column contains fields for First Name, Email, Guardian's weekly SMS report language (English selected), Time Zone (GMT +2:00 Helsinki, Athens), Height (170), Sex (Male selected), Recommended Wearing Hours (18), Starting Cobb Angle 1 (29), Risser classification (Stage 2), and Sensor 1 Name (Left Lower Thoracic). The right column contains fields for Last Name, Guardian's phone number (Greece (+30) 6971235467), Location (Athens), Weight (60), Birthdate (01/10/1999), Type Of Scoliosis (Type C selected), Current Cobb Angle 1 (20), Cobb Angle 1 with brace (19), and Number of Sensors (1). At the bottom, there is a 'Change ScolioSense device' button [2], a 'Go back to patient Details without saving' link, and a 'Submit' button [4]. A red button labeled '[1] Remove patient' is located in the top right corner. A '[3]' annotation is placed near the 'Number of Sensors' field.

Ρύθμιση κηδεμόνα-Calibration

Για τη ρύθμιση των αισθητήρων ο ασθενής θα πρέπει να φοράει τον κηδεμόνα και να βρίσκεται σε όρθια θέση. Η ρύθμιση της σωστής τοποθέτησης του κηδεμόνα καθορίζεται από τον χρήστη. Ο ασθενής θα πρέπει να έχει την εφαρμογή **ScolioSense** στην κινητή συσκευή του, να έχει πραγματοποιήσει είσοδο στην εφαρμογή καθώς και να έχει ενεργή σύνδεση στο διαδίκτυο και ενεργοποιημένες τις υπηρεσίες τοποθεσίας και Bluetooth. Επίσης, θα πρέπει να βρίσκεται στη σελίδα adjustment

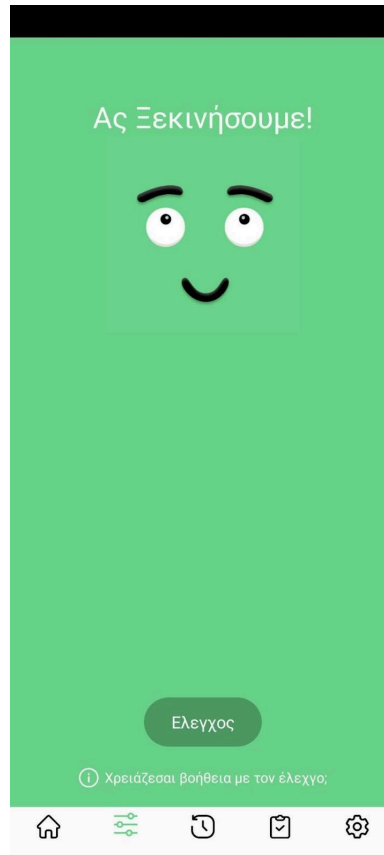

Μόλις τοποθετήσετε τον κηδεμόνα του ασθενή στην επιθυμητή θέση θα πρέπει να πατήσετε το κουμπί **Start calibration**.

Calibration process

x

Calibration is about to start, make sure that:

- The patient is connected with a ScolioSense
- Pressure is applied to the sensors
- The patient is currently on the adjustment (Green) page on the ScolioSense mobile application



Close

Start calibration

Στη συνέχεια αποστέλλεται μια ειδοποίηση στην κινητή συσκευή του ασθενή και ξεκινάει η διαδικασία της ρύθμιση των αισθητήρων.

Calibration process

x

Calibration is about to start, make sure that:

- The patient is connected with a ScolioSense
- Pressure is applied to the sensors
- The patient is currently on the adjustment (Green) page on the ScolioSense mobile application



Close

Start calibration

Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης του κηδεμόνα ο ασθενής θα πρέπει να αναπνέει κανονικά, ώστε να ρυθμιστούν σωστά τα όρια πιέσεων των αισθητήρων.

Calibration is about to start, make sure that:

- The patient is connected with a ScolioSense
- Pressure is applied to the sensors
- The patient is currently on the adjustment (Green) page on the ScolioSense mobile application



Close

Start calibration

Η διαδικασία της ρύθμισης του κηδεμόνα φαίνεται παρακάτω μέσα από τον εφαρμογή **ScolioSense** σε περιβάλλον Android. Η διαδικασία ολοκληρώνεται αυτόματα



Μετά την ολοκλήρωσή της διαδικασίας το παράθυρο θα ανανεωθεί και εμφανίζονται τα όρια της προηγούμενης ρύθμισης και της καινούργιας ρύθμισης

Calibration Modal



Calibration is about to start, make sure that:

- The patient is connected with a ScolioSense
- Pressure is applied to the sensors
- The patient is currently on the adjustment (Green) page on the ScolioSense mobile application



Previous Calibration



New Calibration



Calibration completed successfully. You may now close this window or initiate another calibration by clicking Start Calibration.

Close

Start calibration

Help

Μέσα από τη σελίδα βοήθειας μπορείτε να μάθετε περισσότερα για όλες τις λειτουργίες της πλατφόρμας του **ScolioSense**, καθώς και τρόπους αντιμετώπισης πιθανών προβλημάτων

Dashboard

- Patient
- Account

DASHBOARD

- Add Patient
- My patients
- Adherence
- Overview

PATIENT


- Patient details

Forgot password

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να βρείτε τον κωδικό πρόσβασης σας μπορείτε να κάνετε ανάκτηση του κωδικού πρόσβασης σε αυτόν τον [σύνδεσμό](#).

Forgot Password

Please enter your email address and we'll send you an email with instructions to reset your password.

[Back](#)

Στα επόμενα λεπτά αποστέλλεται ένα email που περιέχει ένα σύνδεσμο με τη σελίδα δημιουργίας νέου κωδικού πρόσβασης. Μετά την συμπλήρωσι του κωδικού και την επιλογή του Reset Password μπορείτε να εισέλθετε στην πλατφόρμα με τον νέο σας κωδικό.

Reset Password

The password should be between 6 and 20 characters long. A strong password has a combination of letters and digits.

Email Address


New Password

Confirm password

SMS Report

Το σύστημα ScolioSense υποστηρίζει την αποστολή μιας αναφοράς μέσω SMS στον κηδεμόνα του ασθενή. Η αναφορά περιέχει τον μέσο όρο χρήσης του ασθενούς και το εαν η χρήση ακολουθούσε τις οδηγίες του ιατρού.

Η αποστολή της αναφοράς πραγματοποιείται κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα. Στην περίπτωση που ο κηδεμόνας θέλει να σταματήσει την εβδομαδιαία αναφορά θα πρέπει να απαντήσει στο SMS με μια από τις λέξεις **STOP, STOPALL, UNSUBSCRIBE, CANCEL, END,** or **QUIT**. Για την εκ νέου ενεργοποίηση της λειτουργίας θα πρέπει να στείλει μια από τις λέξεις **START, YES, UNSTOP**

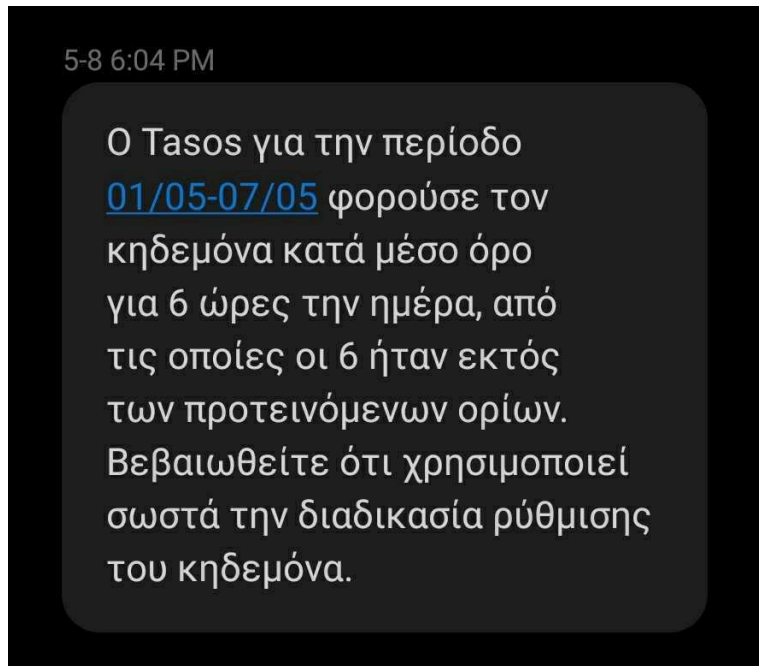

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Αντιμετώπιση
Δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σύνδεση στην πλατφόρμα	Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την Aidplex
Δεν μπορεί να εκτελεστεί η διαδικασία ρύθμισης του κηδεμόνα (calibration)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Βεβαιωθείτε πως το ScolioSense app έχει ενεργοποιημένες τις υπηρεσίες τοποθεσίας και Bluetooth καθώς και ενεργή σύνδεση στο διαδίκτυο. 2. Βεβαιωθείτε πως το ScolioSense app είναι ανοικτό και ο ασθενής βρίσκεται στην σελίδα ελέγχου τοποθέτησης κηδεμόνα. 3. Σε περίπτωση που το ScolioSense app ανταποκρίνεται στο αίτημα calibration της πλατφόρμας αλλά η διαδικασία τερματίζεται απρόσμενα τότε: <ol style="list-style-type: none"> a. Απενεργοποιήστε τις υπηρεσίες τοποθεσίας και Bluetooth της συσκευής του ασθενή και στην συνέχεια ενεργοποιήστε ξανά τις παραπάνω υπηρεσίες. b. Επανεκκινήστε το ScolioSense app. Κλείσιμο της εφαρμογής από το παρασκήνιο και επανάληψη της δοκιμής. 4. Σε περίπτωση που το ScolioSense app δεν ανταποκρίνεται στο αίτημα calibration της πλατφόρμας τότε: <ol style="list-style-type: none"> a. Πραγματοποιήστε αποσύνδεση του ασθενή από το ScolioSense app και στην συνέχεια πραγματοποιήστε σύνδεση του ασθενή στο ScolioSense app. b. Απεγκαταστήστε το ScolioSense app και επανεγκατάσταση το στην συσκευή του ασθενή. <p style="text-align: center;">Αν το πρόβλημα συνεχιστεί επικοινωνήστε με την Aidplex.</p>
Ο ασθενής δεν έλαβε το email εγγραφής του από την πλατφόρμα	<ol style="list-style-type: none"> 1. Βεβαιωθείτε πως δεν έχει παραδοθεί κάποιο email στην διεύθυνση που έχει δώσει ο ασθενής, τόσο στα εισερχόμενα όσο και στον φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam) 2. Βεβαιωθείτε για τη σωστή καταχώρηση της διεύθυνσης που έχει δώσει ο ασθενής μέσα στην πλατφόρμα. 3. Διαγράψτε του ασθενή από την πλατφόρμα και δημιουργήστε νέο λογαριασμό ασθενή. <p style="text-align: center;">Αν το πρόβλημα συνεχιστεί επικοινωνήστε με την Aidplex.</p>

Νομικές πληροφορίες

Η **Aidplex** αποκλείει κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων, απώλεια κερδών ή οποιαδήποτε άλλη απώλεια ή ζημία υποστεί ο τελικός πελάτης.

Η φορητή συσκευή **ScolioSense** έχει εγγύηση για 2 έτη από την αγορά, ημερομηνία κατά την οποία χρησιμοποιείται σύμφωνα με το παρόν εγχειρίδιο.

Η **Aidplex** μπορεί να προχωρήσει στην αντικατάσταση μιας συσκευής **ScolioSense** καλύπτονται από την εγγύηση δωρεάν.

Προσοχή:

Η εγγύηση είναι άκυρη σε περίπτωση τροποποίησης ή αντικατάστασης οποιουδήποτε εξαρτήματος σε συσκευή **ScolioSense** από προσωπικό χωρίς την εξουσιοδότηση της **Aidplex** ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου της.

Η **Aidplex** δεν εγγυάται κανένα θεραπευτικό αποτέλεσμα κατά τη χρήση του **ScolioSense**.

Πολιτική εξυπηρέτησης

Η **Aidplex** διαθέτει ομάδα υποστήριξης για το **ScolioSense** στην οποία μπορεί να απευθυνθείτε για οποιαδήποτε απορία ή πρόβλημα σχετικά με το προϊόν.

Τηλέφωνο: 2316014433

Email: support@aidplex.com

Προειδοποίηση

Το **ScolioSense** είναι ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν κατηγορίας 1, εξάρτημα του ιατροτεχνολογικού προϊόντος κατηγορίας 1 κηδεμόνα σκολίωσης.

Το **ScolioSense** πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες χρήσης.

Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός.

Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν το **ScolioSense**.

Συμβουλευτείτε ανα τακτά διαστήματα τον ιστότοπο της **Aidplex** ή του **ScolioSense** για διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με αντενδείξεις, κινδύνους ή παρενέργειες σχετικά με το **ScolioSense**.

Το **ScolioSense** δεν προσφέρει συμβουλές θεραπείας ή οποιαδήποτε ιατρική διάγνωση.

Η **Aidplex** δεν εγγυάται κανένα θεραπευτικό αποτέλεσμα κατά τη χρήση του **ScolioSense**.

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση: Βασιλέως Ηρακλείου 40 Θεσσαλονίκη, 54623

Τηλέφωνο: 2316014433

Email: info@aidplex.com