

Οδηγίες Χρήσης Διαδικτυακής πλατφόρμας Aidplex ScolioSense

Έκδοση εγγράφου: 4

Κατασκευαστής: Aidplex

Τελευταία τροποποίηση: 22-10-2024



Οδηγίες Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας

Το εγχειρίδιο αφορά τη διαδικτυακή πλατφόρμα **ScolioSense** του AIDPLEX SCOLIOSIS, με την εμπορική ονομασία **ScolioSense**, ένα προϊόν της Aidplex. Το περιεχόμενο πληροφοριών ανήκει στην Aidplex και παρέχεται μόνο για τον χειρισμό συσκευών και λογισμικού της Aidplex. Αυτό το εγχειρίδιο υπόκειται σε τροποποιήσεις.

Τελευταία έκδοση: <https://scoliosense.com/Home/SupportEN>.

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα	2
Εισαγωγή	3
Η εταιρεία	3
Σημαντική σημείωση ασφαλείας	3
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ	3
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ	4
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ	4
Γενικές Συνθήκες Λειτουργίας	5
Λειτουργικό περιβάλλον	5
Διαδικτυακή Πλατφόρμα ScolioSense	5
Προσόντα χρήστη	5
Περιγραφή	5
Ξεκινώντας	6
Εγγραφή νέου χρήστη	6
Σύνδεση λογαριασμού χρήστη	6
Σελίδα Ασθενών	7
Σελίδα ασθενών για ιατρούς	7
Προσθήκη ασθενών	10
Σελίδα Ασθενών για κατασκευαστές κηδεμόνων (εξουσιοδοτημένο προσωπικό)	14
Προσθήκη ασθενών	15
1. Για ασθενείς με ιατρό που συνεργάζεται με το σύστημα ScolioSense	15
2. Για ασθενείς με ιατρό που δε συνεργάζεται με το σύστημα ScolioSense	15
Ο Λογαριασμός μου (My Profile)	15
Καρτέλα Ασθενή (Patient details)	18
Καρτέλα Ασθενή για ιατρούς	18
Σελίδα γραφημάτων πίεσης (Adjustment graph)	22
Σελίδα τροποποίησης στοιχείων ασθενή (Edit patient)	23
Ρύθμιση κηδεμόνα-Calibration	26
Βοήθεια	29
Ξέχασα τον κωδικό	30
Αναφορά SMS	31
Αντιμετώπιση προβλημάτων	32
Νομικές πληροφορίες	33
Πολιτική εξυπηρέτησης	34
Προειδοποίηση	34
Στοιχεία επικοινωνίας	34

Εισαγωγή

Ενδεδειγμένη Χρήση:

Το AIDPLEX SCOLIOSIS είναι ένα σύστημα που προορίζεται για την εξασφάλιση της καλής ποιότητας χρήσης των κηδεμόνων σκολίωσης οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της σκολίωσης. Προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με κηδεμόνες σκολίωσης (όπως Boston back brace, Cheneau brace, Rigo-Cheneau brace). Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα της εξασφάλισης και διασφάλισης της πορείας της θεραπείας με κηδεμόνα και τη δυνατότητα υπενθύμισης του ασθενή σχετικά με την ενδεδειγμένη τοποθέτηση του κηδεμόνα με βάση τις οδηγίες του επιβλέποντα ιατρού.

Το σύστημα αποτελείται από 3 μέρη:

- Την φορητή συσκευή που διαθέτει αναλογικούς ή/και ψηφιακούς αισθητήρες (όπως αισθητήρες πίεσης) και τοποθετείται σε κηδεμόνα σκολίωσης.
- Την εφαρμογή λογισμικού κινητού για τον ασθενή με σκολίωση. Η εφαρμογή χρησιμοποιείται για την καταγραφή της διάρκειας χρήσης του κηδεμόνα και την υπενθύμιση του ασθενή σχετικά με την ενδεδειγμένη τοποθέτηση του κηδεμόνα με βάση τις οδηγίες του επιβλέποντα ιατρού.
- Την εφαρμογή λογισμικού μέσω προγράμματος περιήγησης Web για τον επιβλέποντα ιατρό για την διασφάλιση της τήρησης της σωστής πορείας της θεραπείας των ασθενών με τον κηδεμόνα, και της ποιότητας του χρόνου χρήσης του κηδεμόνα κατά την διάρκεια της θεραπείας με βάση τη σωστή εφαρμογή των κηδεμόνων σκολίωσης.

Η φορητή συσκευή (συσκευή **ScolioSense**), η εφαρμογή λογισμικού κινητού (**ScolioSense app**) και η εφαρμογή λογισμικού μέσω προγράμματος περιήγησης Web (διαδικτυακή πλατφόρμα **ScolioSense**) αποτελούν το προϊόν AIDPLEX SCOLIOSIS, με την εμπορική ονομασία **ScolioSense**.

Η εταιρεία

Η **Aidplex** δραστηριοποιείται στον τομέα της υγείας με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.

Περισσότερες πληροφορίες: www.aidplex.com.

Σημαντική σημείωση ασφαλείας

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Η φορητή συσκευή **ScolioSense** δεν προορίζεται για:

- Οποιαδήποτε χρήση εκτός της εγκατάστασης της εξωτερικά του κηδεμόνα.

- Άμεση επαφή με το σώμα, ανοιχτές πληγές, καμένο ιστό, κοντά στα μάτια και κοντά σε κατάγματα.
- Διαφορετική πάθηση πέραν της σκολίωσης και για ασθενείς οι οποίοι δεν είναι χρήστες του **ScolioSense**.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα **ScolioSense** δεν προορίζεται για:

- Οποιαδήποτε χρήση εκτός του επιβλέποντα ιατρού και εξουσιοδοτημένου προσωπικού.
- Χρήση ως κατάλογος ασθενών για διαφορετικές παθήσεις.

Η mobile εφαρμογή δεν προορίζεται για:

- Οποιαδήποτε χρήση εκτός του ασθενή σκολίωσης και χρήστη του συστήματος της Airdplex με την άδεια του αρμόδιου ιατρού.
- Ταυτόχρονη χρήση από πολλαπλές κινητές συσκευές.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Το **ScolioSense** ενδείκνυται για:

- Ασθενείς σκολίωσης που ακολουθούν θεραπεία με τη χρήση κηδεμόνα και χρησιμοποιούν το **ScolioSense app** και τη συσκευή **ScolioSense**.
- Επιβλέποντες ιατρούς με ασθενείς που ακολουθούν θεραπεία σκολίωσης με τη χρήση κηδεμόνα και χρησιμοποιούν τη διαδικτυακή πλατφόρμα **ScolioSense**.
- Την εξασφάλιση και διασφάλιση της πορείας της θεραπείας σκολίωσης με τη χρήση κηδεμόνα.
- Τη διασφάλιση της τοποθέτησης αλλά και χρήσης του κηδεμόνα σύμφωνα με τις οδηγίες του επιβλέποντα ιατρού.
- Την υπενθύμιση του ασθενή σχετικά με την ενδεδειγμένη τοποθέτηση του κηδεμόνα με βάση τις οδηγίες του επιβλέποντα ιατρού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση του συστήματος **ScolioSense** πέραν της ενδεδειγμένης.
- Η διαδικτυακή πλατφόρμα **ScolioSense** θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από επιβλέποντες ιατρούς και εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
- Το **ScolioSense app** πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ασθενείς σκολίωσης που ακολουθούν θεραπεία με τη χρήση κηδεμόνα.

- Η φορητή συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί μόνο σε κηδεμόνες και μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό, το οποίο έχει ακολουθήσει πρόγραμμα εκπαίδευσης για την εγκατάσταση.
- Η φορητή συσκευή δεν πρέπει να ανοίγει από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
- Οι ασθενείς δεν πρέπει να παρεμβαίνουν στη σύνδεση ή αποσύνδεση των αισθητήρων από τη φορητή συσκευή.
- Η διαδικασία της ρύθμισης του κηδεμόνα (calibration) της διαδικτυακής πλατφόρμας **ScolioSense** δε θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της τοποθέτησης του κηδεμόνα παρά μόνο για την αποτύπωση της ενδεδειγμένης χρήσης που έχει ορίσει ο επιβλέπων ιατρός.

Γενικές Συνθήκες Λειτουργίας

Λειτουργικό περιβάλλον

Για την προσπέλαση της διαδικτυακής πλατφόρμας **ScolioSense** ο χρήστης πρέπει να διαθέτει ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού και σύνδεση στο διαδίκτυο. Το **ScolioSense** υποστηρίζει πρόσφατες εκδόσεις του Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Microsoft Edge και σε κινητά iOS και Android.

Διαδικτυακή Πλατφόρμα ScolioSense

Προσόντα χρήστη

Το σύστημα **ScolioSense** προορίζεται για ασθενείς με σκολίωση, οι οποίοι φορούν κηδεμόνα, και για τους επιβλέποντες ιατρούς τους. Το **ScolioSense app** και η συσκευή **ScolioSense** χρησιμοποιούνται από τους ασθενείς. Η διαδικτυακή πλατφόρμα **ScolioSense** χρησιμοποιείται από ιατρικό προσωπικό ή εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

Περιγραφή

Η διαδικτυακή πλατφόρμα **ScolioSense** διαθέτει 7 σελίδες:

1. Σελίδα σύνδεσης χρήστη: Πραγματοποιείται είσοδος στην πλατφόρμα
2. Σελίδα εγγραφής χρήστη (Register): Πραγματοποιείται εγγραφή στην πλατφόρμα
3. Σελίδα ασθενών (Dashboard): Η κεντρική σελίδα της πλατφόρμας του **ScolioSense**. Περιέχει μια σύνοψη των ασθενών καθώς και συγκεντρωτικά γραφήματα με πληροφορίες για τους ασθενείς.
4. Σελίδα καρτέλας ασθενή (Patient Details): Περιέχει αναλυτικές πληροφορίες για τον ασθενή και τη θεραπεία του.
5. Σελίδα επεξεργασίας στοιχείων ασθενή (Patient Edit): Ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί τις πληροφορίες του ασθενή.

6. Σελίδα προφίλ (Profile): Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει τα στοιχεία του και τον κωδικό πρόσβασης για την πλατφόρμα **ScolioSense**.
7. Σελίδα βοήθειας (Help): Ο χρήστης μπορεί να διαβάσει τις ενημερωμένες οδηγίες χρήσης της διαδικτυακής πλατφόρμας

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

Για να επισκεφθείτε τη διαδικτυακή πλατφόρμα **ScolioSense** επισκεφθείτε το www.scoliosense.com.

Εγγραφή νέου χρήστη

Για την εγγραφή στη διαδικτυακή πλατφόρμα **ScolioSense** πατήστε τον [σύνδεσμό](#). Θα πρέπει να συμπληρώσετε τη διεύθυνση email σας και ένας εκπρόσωπος της **Aidplex** θα επικοινωνήσει μαζί σας για τη δημιουργία του λογαριασμού.

Thank you for your interest!

The registration process for Doctors and Manufacturers is **currently closed**.

To stay updated please provide us with your email address, and we will notify you accordingly when you are eligible to apply.



Notify me

[Already Have Account? Login now](#)

Σύνδεση λογαριασμού χρήστη

Μετά τη δημιουργία του λογαριασμού σας μπορείτε να συνδεθείτε στη διαδικτυακή πλατφόρμα **ScolioSense** σε αυτό τον [σύνδεσμο](#) συμπληρώνοντας τα στοιχεία σύνδεσής σας.

Login

Enter your email address and password to login on the ScolioSense platform for Doctors and Manufacturers.

demo@aidplex.com

.....



Remember Me

[Forgot your password?](#)

Sign in

[New to ScolioSense? Join now](#)


Σελίδα Ασθενών

Σελίδα ασθενών για ιατρούς


Κάτω από αυτή την ενότητα μπορείτε να δείτε τη λίστα με τους ασθενείς σας. Η λίστα περιέχει το Όνομα, Επώνυμό, Τύπο Σκολίωσης, Μέσο Χρόνο Φορέματος του κηδεμόνα και Ειδοποιήσεις.

Τύπος Σκολίωσης: Η ταξινόμηση γίνεται σε τύπο S ή C.

Μέσος χρόνος χρήσης κηδεμόνα: Η μέτρηση εμφανίζεται πράσινη όταν ικανοποιεί τον συνιστώμενο χρόνο, διαφορετικά κόκκινη. Τοποθετώντας το δείκτη του ποντικιού πάνω από τη μέτρηση, παρουσιάζεται ο αριθμός των συνιστώμενων ωρών χρήσης.

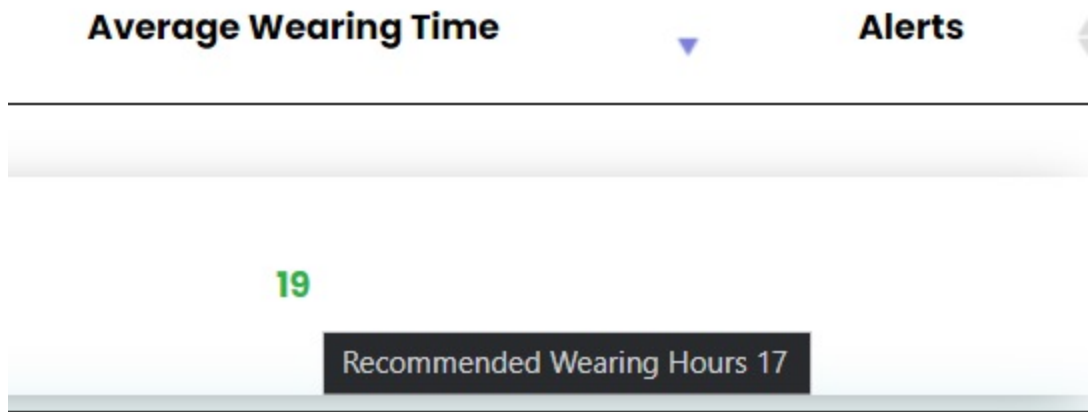

Ειδοποιήσεις : Οι ειδοποιήσεις υποδεικνύουν εάν ο ασθενής δεν είχε δεδομένα για τις τελευταίες 3 ή 7 ημέρες. Η ειδοποίηση εμφανίζεται με πορτοκαλί χρώμα στην πρώτη [1] ενώ με κόκκινο στη δεύτερη[2] περίπτωση.

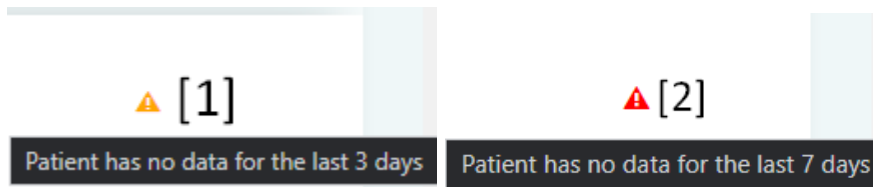

My Patients					Search
First Name	Last Name	Scoliosis Type	Average Wearing Time	Alerts	
Dimitris	Moustakas	S	46	▲	
Argiris	Mouratidis	C	122	▲	
Dimitra	Natsidou	C	25	▲	
Aristotelis	Pallasidis	S	92		
Dimitris	Sakkoulas	C	34		


Previous 1 2 Next

Add patient

1. Πατώντας το κουμπί + στο κάτω μέρος της λίστας ασθενών, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν [καινούργιο λογαριασμό ασθενή](#) στην πλατφόρμα.
2. Μέσα από τη γραμμή αναζήτησης μπορείτε εύκολα και γρήγορα να αναζητήσετε τους ασθενείς σας.


Στο κάτω μέρος της Σελίδας των Ασθενών, υπάρχουν 2 συγκεντρωτικά γραφήματα:

Συμμόρφωση (Adherence)

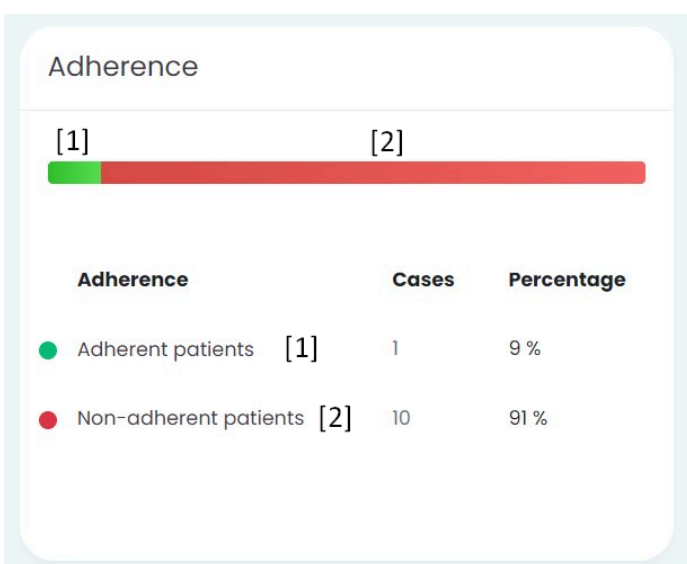

1. Συμμορφωμένοι
2. Μη συμμορφωμένοι

Τύπος σκολίωσης ανά φύλο (Overview)

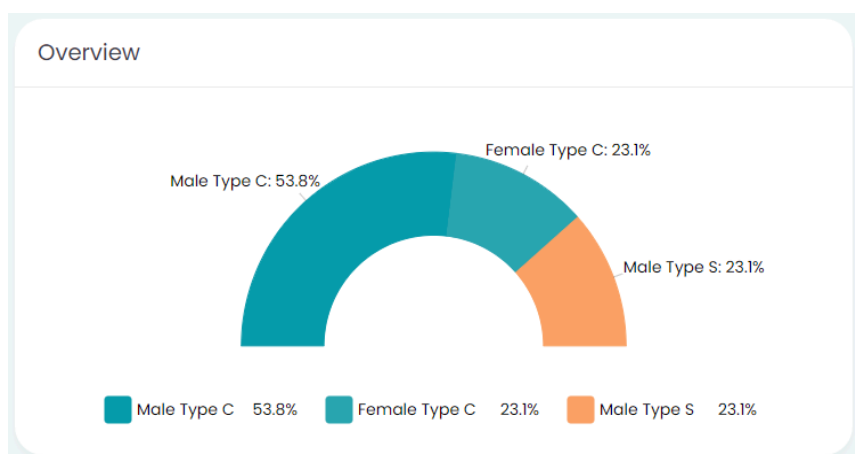

Προσθήκη ασθενών

Στην ενότητα πληροφορίες λογαριασμού (Account information) για την εγγραφή ενός ασθενή, θα πρέπει να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία:

1. Όνομα
2. Επώνυμο
3. Email (το email θα χρησιμοποιηθεί από τον ασθενή για να συνδεθεί στην **ScolioSense app**)
4. Αριθμό τηλεφώνου του γονέα ή κηδεμόνα
5. Γλώσσα

The screenshot shows a web form titled "Register new patient" with four progress steps: Account (active), Personal, Treatment, and Finish. The "Account Information" section includes the following fields:

- First Name: Jenny
- Last Name: Thomson
- Email*: sample@mail.com
- Guardian's phone number*: Greece (+30) 012 345 6789
- Guardian's weekly SMS report language: English (selected), Ελληνικά

A "Next" button is located at the bottom right of the form.

Στην ενότητα προσωπικά στοιχεία (**Personal information**), θα πρέπει να συμπληρώσετε:

1. Ημερομηνία γέννησης
2. Φύλο
3. Βάρος
4. Ζώνη ώρας
5. Ύψος
6. Τοποθεσία

Register new patient

Account Personal Treatment Finish

Personal Information: Step 2 - 4

Date of birth*

Time Zone

Sex Male Female

Height (cm)

Weight (kg)

Location

[Back](#) [Next](#)

Στην ενότητα Θεραπεία (**Treatment**), θα πρέπει να συμπληρώσετε:

1. Τον τύπο της σκολίωσης
2. Γωνίες Cobb με τον κηδεμόνα και χωρίς.
Στην περίπτωση που ασθενής έχει σκολίωση τύπου S συμπληρώστε τα στοιχεία και της δεύτερης γωνίας.
3. Την ταξινόμηση Risser ή Sanders
4. Τις συνιστώμενες ώρες χρήσης του κηδεμόνα.

Register new patient



Treatment Information:

Step 3 - 4

Scoliosis Curve

Type C Type S

Recommended Wearing Hours

18

Starting Cobb Angle 1

Cobb Angle 1 with brace

Risser Classification

Stage 0

Manufacturer

Jim Moustakas

5. Τον κατασκευαστή του κηδεμόνα (εσωτερικός ή εξωτερικός συνεργάτης). Αν δεν υπάρχει ο κατασκευαστής στο drop down menu, επιλέξτε Aidplex και επικοινωνήστε μαζί μας για την εγγραφή του στο **ScolioSense**.
6. Την επιλογή χρήσης ή όχι του άνω ορίου των αισθητήρων για την ενδεδειγμένη τοποθέτηση του κηδεμόνα σκολίωσης.

Risser Classification

Stage 0

Manufacturer

Jim Moustakas


Include the upper limit of the sensors? Yes No

By removing the upper limit, the patient's adjustment page will be restricted to display solely the lower limit

Arranging the position of the sensors

Αν συμπεριλάβετε το ανώτατο όριο (Επιλογή Ναι), τόσο τα ελάχιστα όσο και τα μέγιστα όρια κάθε αισθητήρα θα χρησιμοποιηθούν για τη διαδικασία ρύθμισης, δημιουργώντας έτσι ένα εύρος. Από την άλλη πλευρά, αν δε συμπεριλάβετε το ανώτατο όριο (Επιλογή Όχι), μόνο η ελάχιστη τιμή κάθε αισθητήρα θα χρησιμοποιηθεί για τη διαδικασία ρύθμισης. Επιλέγοντας την πρώτη επιλογή, μπορείτε να παρατηρήσετε την εφαρμογή του κηδεμόνα σε σχέση με το εύρος της διαδικασίας ρύθμισης. Με τη δεύτερη επιλογή, μπορείτε να παρατηρήσετε την εφαρμογή του κηδεμόνα σε σχέση με την ελάχιστη τιμή εφαρμογής της διαδικασίας ρύθμισης.

Παρακάτω παρουσιάζονται οι γραφικές παραστάσεις για την κάθε περίπτωση αντίστοιχα:

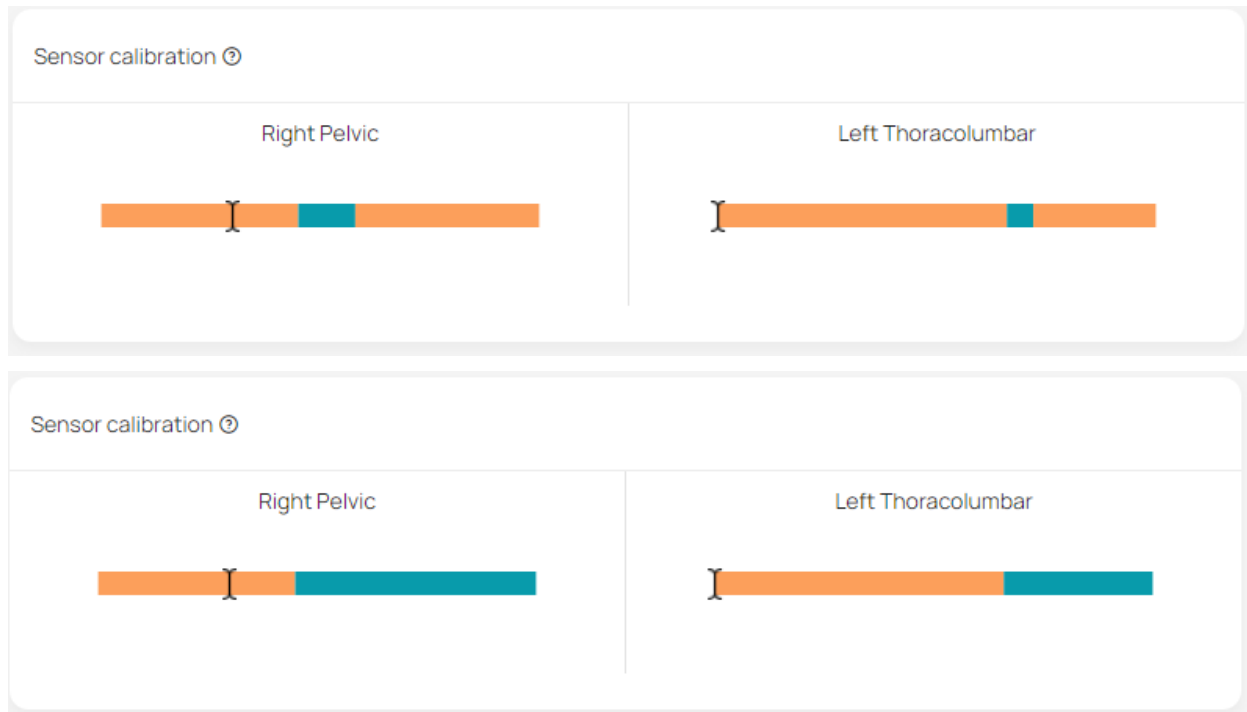

7. Το πλήθος των αισθητήρων (μέγιστο 3) που θα χρησιμοποιηθούν με τη συσκευή ScolioSense με τα ονόματά τους. Για το όνομα των αισθητήρων μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα προεπιλεγμένα ονόματα, είτε να δημιουργήσετε το δικό σας.

Arranging the position of the sensors

- The sensors should be placed at the peaks of the pressure areas without altering or hindering the structure of the brace. The system can support up to three sensors.
- The main module should be placed on the outer surface of the brace in a way that it would not hinder the patient's comfort.
- ScolioSense uses up to three sensors, with one always set as a reference sensor, which cannot be changed. This reference sensor helps calculate adjusted and non-adjusted brace-wearing times. "Adjusted" means the pressure is within the clinician-set thresholds, while "non-adjusted" means it's outside. If two sensors are marked as reference, both must meet the pressure range for adjusted time. If only one is marked as reference, only that sensor's pressure is considered for calculating adjusted time, ignoring the other sensor's data.

Number of Sensors

2

Sensor Name 1 * ⓘ

Left Lumbar

Sensor Name 2 * ⓘ

Left Thoracolumbar

This sensor is used for adjusted and non-adjusted wear time.

Ορίστε το διορθωμένο κείμενο με τις ορθογραφικές διορθώσεις:

Το ScolioSense χρησιμοποιεί έως τρεις αισθητήρες, με τον πρώτο να είναι μόνιμα καθορισμένος ως αισθητήρας αναφοράς, ο οποίος διαδραματίζει βασικό ρόλο στον υπολογισμό τόσο του χρόνου χρήσης με ενδεδειγμένη τοποθέτηση όσο και μη ενδεδειγμένη τοποθέτηση του κηδεμόνα. "Ενδεδειγμένη τοποθέτηση" σημαίνει ότι οι πιέσεις είναι εντός των ορίων που έχει ορίσει ο ιατρός, ενώ "μη ενδεδειγμένη τοποθέτηση" αναφέρεται σε πιέσεις εκτός αυτών των

ορίων. Ο δεύτερος και τρίτος αισθητήρας μπορούν να εναλλάσσονται μεταξύ κατάστασης αναφοράς και μη αναφοράς μέσω ενός πλαισίου επιλογής κάτω από το όνομα του αισθητήρα. Εάν και οι δύο επιλεγθούν ως αισθητήρες αναφοράς, όλοι οι αισθητήρες αναφοράς πρέπει να πληρούν τα όρια πίεσης για να υπολογιστεί ο χρόνος ενδεδειγμένης τοποθέτησης. Όταν μόνο ένας αισθητήρας είναι επιλεγμένος ως αναφορά, λαμβάνεται υπόψη μόνο η πίεση αυτού του αισθητήρα, ενώ οι άλλοι αγνοούνται. Επιπλέον, αν ένας αισθητήρας μετατραπεί από μη αναφοράς σε αναφοράς, απαιτείται νέα ρύθμιση.

Μετά τη δημιουργία του ασθενούς, αυτές οι ρυθμίσεις μπορούν να τροποποιηθούν στη σελίδα επεξεργασίας. Εάν ένας αισθητήρας αλλάξει από κατάσταση αναφοράς (επιλεγμένος) σε μη αναφοράς (μη επιλεγμένος), θα σταλεί ειδοποίηση στο κινητό του ασθενούς για να συγχρονίσει τις αλλαγές. Αντίθετα, εάν ένας μη αναφοράς αισθητήρας μετατραπεί σε αισθητήρα αναφοράς, απαιτείται νέα ρύθμιση του κηδεμόνα.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ένα αυτοματοποιημένο email θα σταλεί στο email του ασθενή σας.

Σελίδα Ασθενών για κατασκευαστές κηδεμόνων (εξουσιοδοτημένο προσωπικό)

Κάτω από αυτή την ενότητα μπορείτε να δείτε τη λίστα με τους ασθενείς σας. Η λίστα περιέχει το Όνομα, Επώνυμό και Τύπο Σκολίωσης του ασθενή.

Τύπος Σκολίωσης: Η ταξινόμηση γίνεται σε τύπο S ή C.

My Patients			Search...
First Name	Last Name	Type of Scoliosis	
Antonie	Aslanos	S	
arg	iris	C	
Argiris	Mouratidis	C	

Προσθήκη ασθενών

Ως κατασκευαστής μπορεί να έχετε να διαχειριστείτε ασθενείς από διαφορετικούς ιατρούς. Για αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες που ακολουθούν:

1. *Για ασθενείς με ιατρό που συνεργάζεται με το σύστημα ScolioSense*


Τη στιγμή που θα αντιστοιχιστεί κάποιος ασθενής με εσάς από τον ιατρό η καρτέλα του θα συνδεθεί και στη δική σας λίστα ασθενών, χωρίς να πρέπει να πραγματοποιήσετε κάποια διαδικασία.

2. *Για ασθενείς με ιατρό που δε συνεργάζεται με το σύστημα ScolioSense*

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει η Aidplex να επικοινωνήσει με τον ιατρό για την εγγραφή και τη μετέπειτα αντιστοίχιση του ασθενή.

Ο Λογαριασμός μου (My Profile)

Για να δείτε τον λογαριασμό σας επιλέξτε είτε το όνομά σας επάνω δεξιά και στη συνέχεια την επιλογή my profile είτε το εικονίδιο του profile από το πλευρικό μενού.

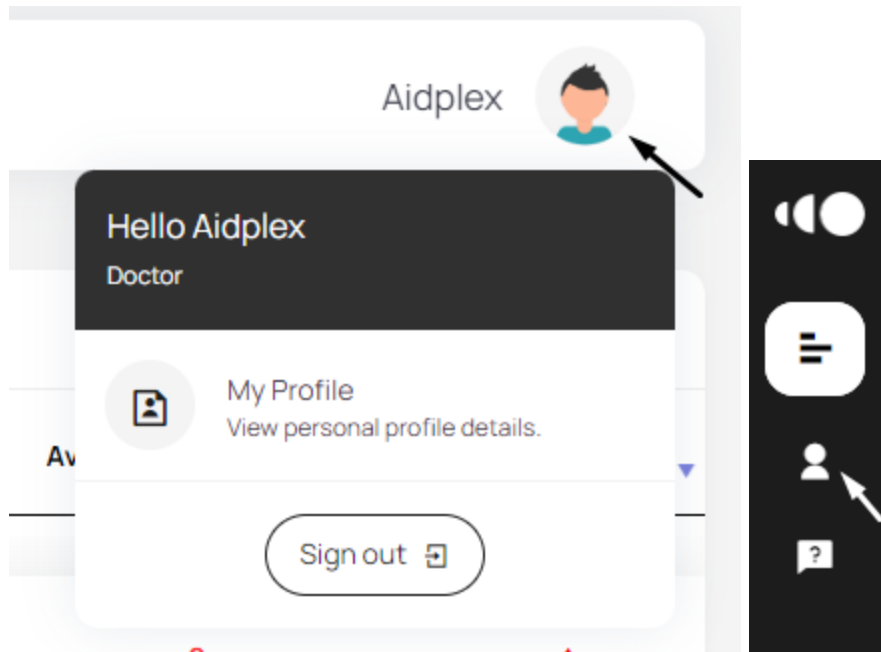

Μέσα από την οθόνη του προφίλ μπορείτε να αλλάξετε τα παρακάτω:

1. Όνομα
2. Επίθετο
3. Αριθμό τηλεφώνου

Σημαντικό: Το email[3] δεν μπορεί να αλλαχθεί. Σε περίπτωση που επιθυμείτε αλλαγή της διεύθυνσης email, επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα στο support@aidplex. Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας θα πρέπει να επιλέξετε το κουμπί[5].

Αν επιθυμείτε να αλλάξετε τον κωδικό σύνδεσής σας θα πρέπει να επιλέξετε την καρτέλα [6]

Personal Information Change Password

Change Password

Current Password:

New Password:

Confirm Password:

Για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης σας, θα πρέπει να εισάγετε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης[1].

Στην περίπτωση που ο κωδικός πρόσβασης δεν είναι σωστός εμφανίζεται μήνυμα, όπως φαίνεται παρακάτω.

Στη συνέχεια θα πρέπει να εισάγετε τον νέο κωδικό[2] και να τον επιβεβαιώσετε στο πεδίο[3].

Current Password: **Your password was incorrect.**

Για την αποθήκευση του νέου κωδικού πρόσβασης θα πρέπει να επιλέξετε το κουμπί Submit.

Καρτέλα Ασθενή (Patient details)

Καρτέλα Ασθενή για ιατρούς

Για να δείτε αναλυτικές πληροφορίες ενός ασθενή σας θα πρέπει να επιλέξετε τον ασθενή από τον κατάλογο της σελίδας ασθενών.

First Name	Last Name	Scoliosis Type	Average Wearing Time	Alerts
Tasos	Anastasiadis	S	14	▲

Στο πρώτο μέρος της οθόνης εμφανίζονται μερικά προσωπικά στοιχεία του ασθενή σας όπως:


1. Βάρος
2. Ύψος
3. Τρέχουσα γωνία Cobb, (στην περίπτωση που ασθενής έχει σκολίωση τύπου S τότε εμφανίζονται και οι δυο γωνίες Cobb),
4. Ηλικία
5. Τοποθεσία του ασθενή

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα στοιχεία του ασθενή σας, πατώντας το κουμπι[6] ώστε να μεταφερθείτε στη [Σελίδα τροποποίησης στοιχείων ασθενή](#).

Tasos Anastasiadis
14 years old, Thessaloniki

[1] Weight 65kg	[4] Height 157cm	[5] [3] Cobb Angle 1 45°
--------------------	---------------------	-----------------------------


Κάτω από τα προσωπικά στοιχεία, βρίσκονται τα γραφήματα πιέσεων των αισθητήρων του ασθενή. Το εύρος που έχει οριστεί από την ενδεδειγμένη τοποθέτηση του κηδεμόνα, εμφανίζεται με ανοιχτό μπλε. Με τη μαύρη γραμμή υποδεικνύεται η πίεση που καταγράφηκε στον τελευταίο έλεγχο τοποθέτησης του κηδεμόνα που πραγματοποίησε ο ασθενής.

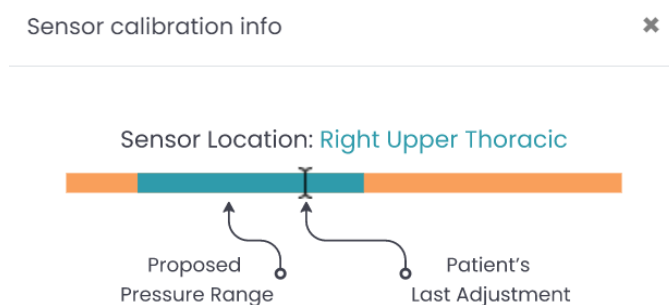

Δίπλα από τις πληροφορίες του ασθενή υπάρχει το συγκεντρωτικό γράφημα χρήσης του κηδεμόνα του ασθενούς. Κάθε μπάρα αντιπροσωπεύει μια μέρα χρήσης του συστήματος. Με το ανοιχτό πράσινο εμφανίζονται οι ώρες χρήσης με ενδεδειγμένη τοποθέτηση του κηδεμόνα[2] και με πορτοκαλί οι ώρες χωρίς. Τοποθετώντας το δείκτη του ποντικιού πάνω από μια μπάρα εμφανίζονται περισσότερες πληροφορίες για τη συγκεκριμένη ημέρα. Η μαύρη γραμμή[3] αναφέρεται στις προτεινόμενες ώρες χρήσης του κηδεμόνα. Στο πάνω μέρος του γραφήματος μπορείτε να ορίσετε ένα προσαρμοσμένο διάστημα ημερών[1].

Wearing Time In Hours

[1]

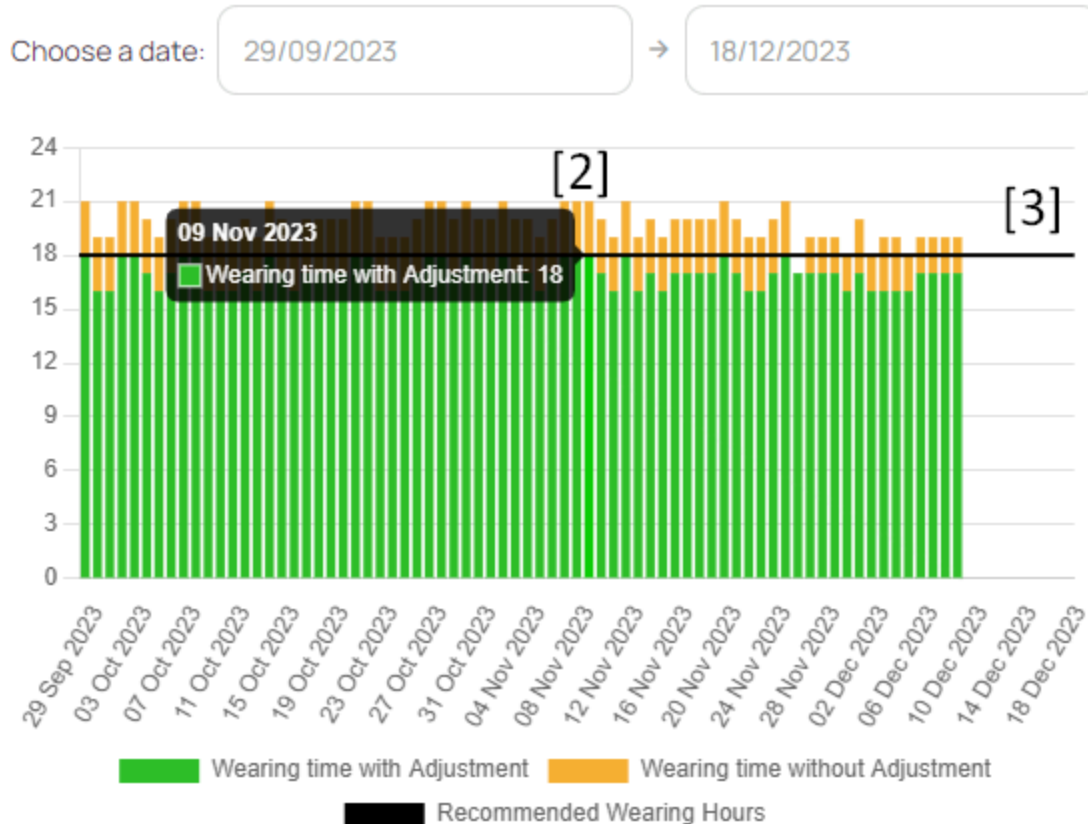

Δίπλα από το γράφημα χρήσης, παρουσιάζονται πληροφορίες σχετικές με την πορεία της θεραπείας όπως:

1. Η ημερομηνία που ξεκίνησε τη θεραπεία (ημερομηνία εγγραφής στο **ScolioSense**)
2. Η μέτρηση Risser ή Sanders
3. Η γωνία Cobb
4. Η γωνία Cobb φορώντας τον κηδεμόνα (στην περίπτωση που ο ασθενής έχει σκολίωση τύπου S τότε εμφανίζονται και οι δυο γωνίες Cobb).

Τέλος, για να ξεκινήσετε τη [διαδικασία ρύθμισης του κηδεμόνα](#) θα πρέπει να πατήσετε το κουμπί **Start Calibration**[1].

Status

Started on
29 September 2023

Risser classification
Stage 4

Starting Cobb Angle 1
45

Cobb Angle 1 with brace
43

Starting Cobb Angle 2
27

Cobb Angle 2 with brace
23


Calibrated by:
Demo Doctor

Start Calibration

[1]


Σελίδα γραφημάτων πίεσης (Adjustment graph)

Επιλέγοντας το κουμπί Adjustment history στην καρτέλα του ασθενή, μεταφέρεστε στη σελίδα γραφημάτων πίεσης.

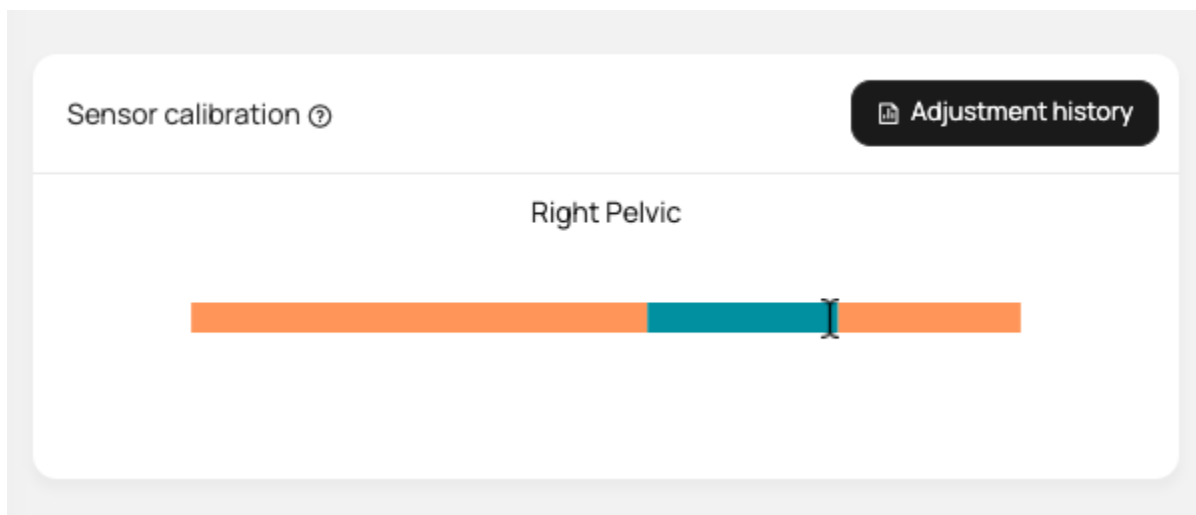

Τα παρακάτω γραφήματα δείχνουν για κάθε αισθητήρα, το ανώτερο (διακεκομμένη γραμμή) και κατώτερο όριο (συνεχόμενη γραμμή) που έχει δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια της ρύθμισης του κηδεμόνα.

Τα σημεία εντός του γραφήματος υποδεικνύουν την εκάστοτε τοποθέτηση του κηδεμόνα του ασθενή.

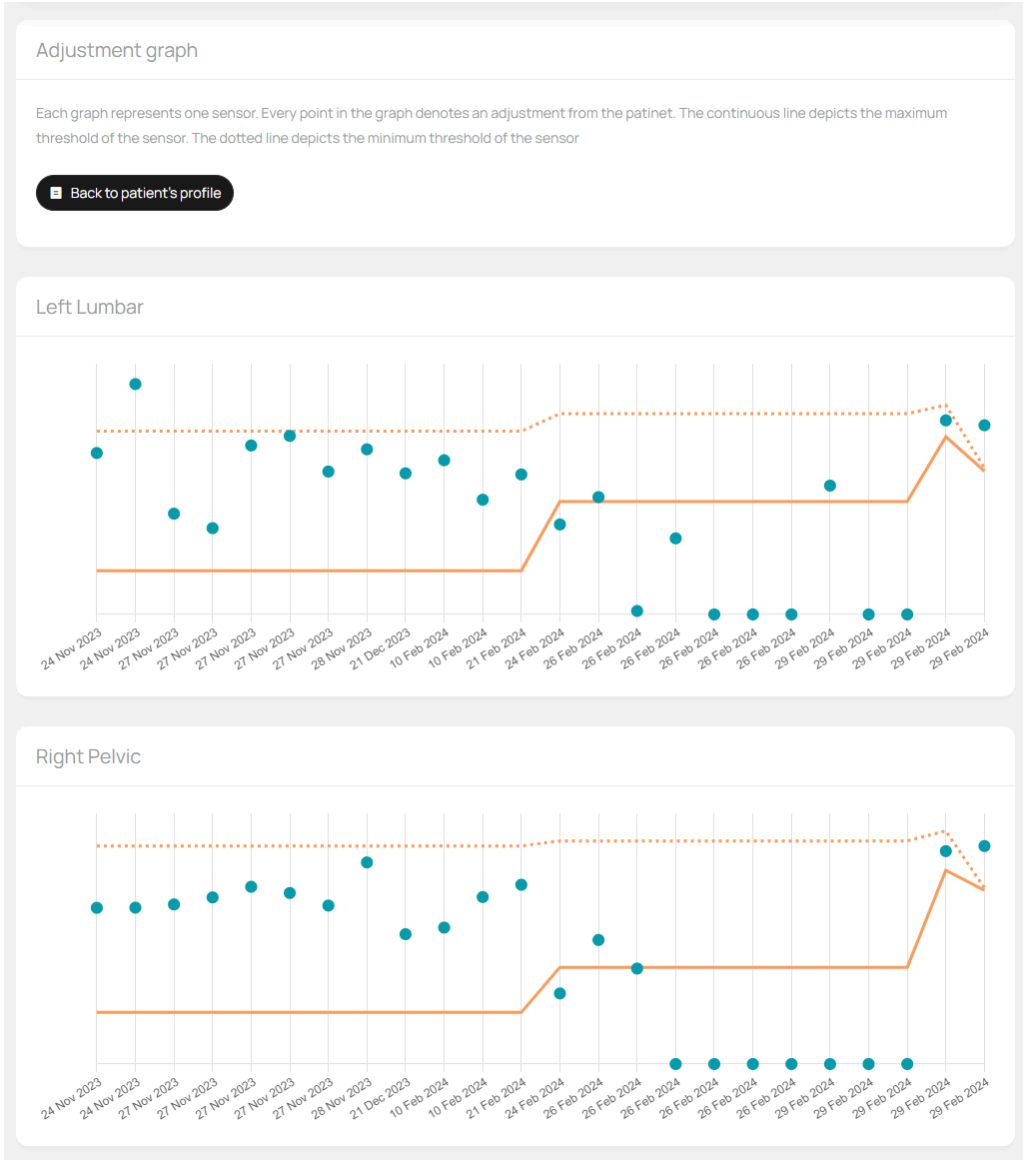

Σελίδα τροποποίησης στοιχείων ασθενή (Edit patient)

Μέσα από τη σελίδα επεξεργασίας του ασθενή, μπορείτε να επεξεργαστείτε όλες τις πληροφορίες του ασθενή.

Η διαγραφή ασθενή γίνεται με το κουμπί Remove Patient[1].

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διαγραφή ασθενή είναι **μη αναστρέψιμη!**

Για την αλλαγή τη φορητής συσκευής ενός ασθενή θα πρέπει να επιλέξετε το κουμπί **Change ScolioSense**[2]. Μετά την αλλαγή της συσκευής θα πρέπει να γίνει εκ νέου ρύθμιση.

Σε περίπτωση που αλλάξετε τον αριθμό των αισθητήρων ή τις θέσεις των αισθητήρων τότε θα πρέπει να γίνει εκ νέου η διαδικασία ρύθμισης[3].

Για την αποθήκευση των αλλαγών θα πρέπει να επιλέξετε το κουμπί **Submit**[4].

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την αποθήκευση των αλλαγών, μπορείτε να μεταφερθείτε στην καρτέλα του ασθενή χωρίς αποθήκευση πατώντας το **Cancel Without Saving**.

👤 Patient Information

[1] [Remove patient](#)

Fields with asterisk (*) are required

First Name*

Tasos

Last Name*

Anastasiadis

Email*

tasosanastasiadis@gmail.com

Patient's Sex

Male Female

Location*

Thessaloniki

Time Zone

(GMT+2:00) Eastern European Time

Weight*

45

Height*

155

Birthdate*

05/12/2003

👤 Guardian Information

Guardian's weekly SMS report language

English Ελληνικά

Guardian's phone number*

Greece (+30)

6971554267

📄 Treatment Information

Type Of Scoliosis

Type C Type S

Recommended Wearing Hours*

18

Current Cobb Angle 1*

45

Starting Cobb Angle 1*

50

Cobb Angle 1 with brace*

43

Skeletal maturity scale

Risser

Level of maturity

Risser 2

Include the upper limit of the sensors ⓘ

Yes No

Number of Sensors [3]

2

Sensor 1 Name* ⓘ

Left Upper Thoracic

Sensor 2 Name* ⓘ

Right Pelvic

[2]

[Change ScolioSense](#)


[Cancel Without Saving](#)

[4]

[Save changes](#)

Ρύθμιση κηδεμόνα-Calibration

Για τη ρύθμιση των αισθητήρων ο ασθενής θα πρέπει να φοράει τον κηδεμόνα και να βρίσκεται σε όρθια θέση. Η ρύθμιση της σωστής τοποθέτησης του κηδεμόνα καθορίζεται από τον χρήστη της διαδικτυακής πλατφόρμας **ScolioSense**. Ο ασθενής θα πρέπει να έχει το **ScolioSense app** στην κινητή συσκευή του, να έχει πραγματοποιήσει είσοδο στην εφαρμογή καθώς και να έχει ενεργή σύνδεση στο διαδίκτυο και ενεργοποιημένες τις υπηρεσίες τοποθεσίας και Bluetooth. Επίσης, θα πρέπει να βρίσκεται στη σελίδα adjustment

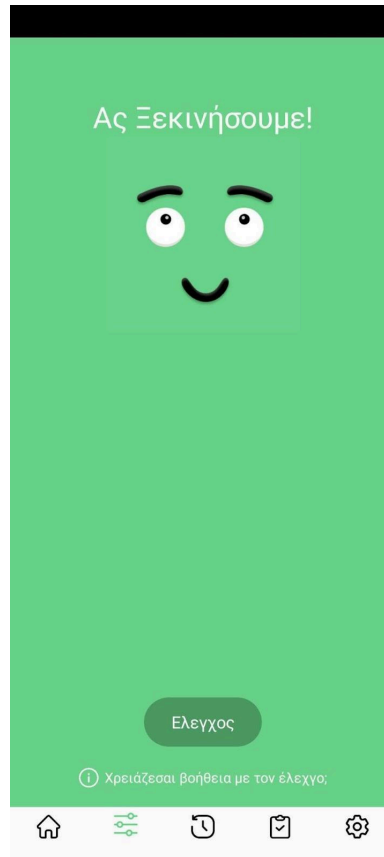

Μόλις τοποθετήσετε τον κηδεμόνα του ασθενή στην επιθυμητή θέση θα πρέπει να πατήσετε το κουμπί **Start calibration**.

Calibration process

x

Calibration is about to start, make sure that:

- The patient is connected with a ScolioSense
- Pressure is applied to the sensors
- The patient is currently on the adjustment (Green) page on the ScolioSense mobile application



Close

Start calibration

Στη συνέχεια αποστέλλεται μια ειδοποίηση στην κινητή συσκευή του ασθενή και ξεκινάει η διαδικασία της ρύθμισης.

Calibration process

x

Calibration is about to start, make sure that:

- The patient is connected with a ScolioSense
- Pressure is applied to the sensors
- The patient is currently on the adjustment (Green) page on the ScolioSense mobile application



Close

Start calibration

Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης του κηδεμόνα ο ασθενής θα πρέπει να πάρει δύο βαθιές αναπνοές και στη συνέχεια να αναπνέει κανονικά, ώστε να ρυθμιστούν σωστά τα όρια πιέσεων των αισθητήρων.

Calibration process

×

Calibration is about to start, make sure that:

- The patient is connected with a ScolioSense
- Pressure is applied to the sensors
- The patient is currently on the adjustment (**Green**) page on the ScolioSense mobile application



Close

Start calibration

Η διαδικασία της ρύθμισης του κηδεμόνα φαίνεται παρακάτω μέσα από το **ScolioSense app** σε περιβάλλον Android. Η διαδικασία ολοκληρώνεται αυτόματα.




Μετά την ολοκλήρωσή της διαδικασίας το παράθυρο θα ανανεωθεί και εμφανίζονται τα όρια της προηγούμενης και της καινούργιας ρύθμισης.

Calibration Modal



Calibration is about to start, make sure that:

- The patient is connected with a ScolioSense
- Pressure is applied to the sensors
- The patient is currently on the adjustment (Green) page on the ScolioSense mobile application

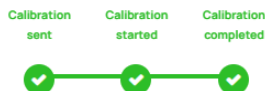

Previous Calibration



New Calibration



Calibration completed successfully. You may now close this window or initiate another calibration by clicking Start Calibration.

Close

Start calibration

Βοήθεια

Μέσα από τη σελίδα βοήθειας μπορείτε να μάθετε περισσότερα για όλες τις λειτουργίες της πλατφόρμας του **ScolioSense**, και τρόπους αντιμετώπισης πιθανών προβλημάτων.


The screenshot shows a user interface with a sidebar on the left containing 'Dashboard', 'Patient', and 'Account'. The main content area is titled 'DASHBOARD' and contains four menu items: 'Add Patient', 'My Patients', 'Adherence', and 'Overview', each with a downward arrow. At the bottom of the main area, the word 'PATIENT' is visible.

Ξέχασα τον κωδικό

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να βρείτε τον κωδικό πρόσβασης σας, μπορείτε να τον ανακτήσετε σε αυτόν τον [σύνδεσμό](#).

Forgot Password

Please enter your email address and we'll send you an email with instructions to reset your password.

Reset Password

[Back](#)

Στα επόμενα λεπτά αποστέλλεται ένα email που περιέχει ένα σύνδεσμο με τη σελίδα δημιουργίας νέου κωδικού πρόσβασης. Μετά τη συμπλήρωση του κωδικού και την επιλογή του Reset Password μπορείτε να εισέλθετε στην πλατφόρμα με τον νέο σας κωδικό.

Reset Password

The password should be between 6 and 20 characters long. A strong password has a combination of letters and digits.

Email Address

New Password

Confirm password

Reset Password

Αναφορά SMS

Το σύστημα ScolioSense υποστηρίζει την αποστολή μιας αναφοράς μέσω SMS στον κηδεμόνα του ασθενή. Η αναφορά περιέχει τον εβδομαδιαίο μέσο χρόνο χρήσης και τον χρόνο ενδεδειγμένης τοποθέτησης του κηδεμόνα.

Η αποστολή της αναφοράς πραγματοποιείται κάθε Κυριακή στις 18:00. Στην περίπτωση που ο κηδεμόνας θέλει να σταματήσει την υπηρεσία θα πρέπει να απαντήσει στο SMS με μια από τις λέξεις **STOP, STOPALL, UNSUBSCRIBE, CANCEL, END, ή QUIT**. Για την εκ νέου ενεργοποίηση της λειτουργίας θα πρέπει να στείλει μια από τις λέξεις **START, YES, UNSTOP**.

5-8 6:04 PM

Ο Tasos για την περίοδο [01/05-07/05](#) φορούσε τον κηδεμόνα κατά μέσο όρο για 6 ώρες την ημέρα, από τις οποίες οι 6 ήταν εκτός των προτεινόμενων ορίων. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιεί σωστά την διαδικασία ρύθμισης του κηδεμόνα.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Αντιμετώπιση
Δεν πραγματοποιείται σύνδεση στην πλατφόρμα	Επικοινωνήστε με την Aidplex.
Δεν εκτελείται η διαδικασία ρύθμισης του κηδεμόνα (calibration)	<ol style="list-style-type: none">1. Βεβαιωθείτε πως το ScolioSense app έχει ενεργοποιημένες τις υπηρεσίες τοποθεσίας και Bluetooth καθώς και ενεργή σύνδεση στο διαδίκτυο.2. Βεβαιωθείτε πως το ScolioSense app είναι ανοικτό και ο ασθενής βρίσκεται στη σελίδα ελέγχου

	<p>τοποθέτησης κηδεμόνα.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Σε περίπτωση που το ScolioSense app ανταποκρίνεται στο αίτημα calibration της πλατφόρμας αλλά η διαδικασία τερματίζεται απρόσμενα τότε: <ol style="list-style-type: none"> a. Απενεργοποιήστε τις υπηρεσίες τοποθεσίας και Bluetooth της συσκευής του ασθενή και στη συνέχεια ενεργοποιήστε ξανά τις παραπάνω υπηρεσίες. b. Επανεκκινήστε το ScolioSense app. Κλείσιμο της εφαρμογής από το παρασκήνιο και επανάληψη της δοκιμής. 4. Σε περίπτωση που το ScolioSense app δεν ανταποκρίνεται στο αίτημα calibration της πλατφόρμας τότε: <ol style="list-style-type: none"> a. Πραγματοποιήστε αποσύνδεση του ασθενή από το ScolioSense app και στη συνέχεια πραγματοποιήστε σύνδεση του ασθενή στο ScolioSense app. b. Απεγκαταστήστε το ScolioSense app και επανεγκατάσταση το στη συσκευή του ασθενή. <p style="text-align: center;">Αν το πρόβλημα συνεχιστεί επικοινωνήστε με την Aidplex.</p>
<p>Ο ασθενής δεν έλαβε το email εγγραφής του από την πλατφόρμα</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Βεβαιωθείτε πως δεν έχει παραδοθεί κάποιο email στη διεύθυνση που έχει δώσει ο ασθενής, τόσο στα εισερχόμενα όσο και στον φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam). 2. Βεβαιωθείτε για τη σωστή καταχώρηση της διεύθυνσης που έχει δώσει ο ασθενής μέσα στην πλατφόρμα. 3. Διαγράψτε τον ασθενή από την πλατφόρμα και δημιουργήστε νέο λογαριασμό ασθενή. <p style="text-align: center;">Αν το πρόβλημα συνεχιστεί επικοινωνήστε με την Aidplex.</p>

Νομικές πληροφορίες

Η **Aidplex** αποκλείει κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων, απώλεια κερδών ή οποιαδήποτε άλλη απώλεια ή ζημία υποστεί ο τελικός πελάτης.

Η φορητή συσκευή **ScolioSense** έχει εγγύηση για 2 έτη από την αγορά, ημερομηνία κατά την οποία χρησιμοποιείται σύμφωνα με το παρόν εγχειρίδιο.

Η **Aidplex** μπορεί να προχωρήσει στην αντικατάσταση μιας συσκευής **ScolioSense** (εφόσον κριθεί απαραίτητο) χωρίς χρηματική επιβάρυνση, στην περίπτωση ενεργής εγγύησης.

Προσοχή:

Η εγγύηση είναι άκυρη σε περίπτωση τροποποίησης ή αντικατάστασης οποιουδήποτε εξαρτήματος της συσκευής **ScolioSense** από προσωπικό χωρίς την εξουσιοδότηση της **Aidplex** ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου της.

Η **Aidplex** δεν εγγυάται κανένα θεραπευτικό αποτέλεσμα κατά τη χρήση του **ScolioSense**.

Πολιτική εξυπηρέτησης

Η **Aidplex** διαθέτει ομάδα υποστήριξης για το **ScolioSense** στην οποία μπορείτε να απευθυνθείτε καθημερινά, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών, κατά τις ώρες (Ελλάδος) 10.00-18.00, μέσω του τηλεφωνικού αριθμού 2316014433 είτε μέσω Email: support@aidplex.com για οποιαδήποτε απορία ή πρόβλημα σχετικά με το προϊόν.

Προειδοποίηση

Το **ScolioSense** είναι ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν κατηγορίας 1, εξάρτημα του ιατροτεχνολογικού προϊόντος κατηγορίας 1 κηδεμόνα σκολίωσης.

Το **ScolioSense** πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.

Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός.

Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν το **ScolioSense**.

Συμβουλευτείτε ανά τακτά διαστήματα τον ιστότοπο της **Aidplex** ή του **ScolioSense** για διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με αντενδείξεις, κινδύνους ή παρενέργειες σχετικά με το **ScolioSense**.

Το **ScolioSense** δεν προσφέρει συμβουλές θεραπείας ή οποιαδήποτε ιατρική διάγνωση.

Η **Aidplex** δεν εγγυάται κανένα θεραπευτικό αποτέλεσμα κατά τη χρήση του **ScolioSense**.

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση: Βασιλέως Ηρακλείου 40 Θεσσαλονίκη, 54623

Τηλέφωνο: 2316014433

Email: info@aidplex.com