

Οδηγίες Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Aidplex Scoliosense 1.0.

Διεύθυνση: Βασιλέως Ηρακλείου 40 Θεσσαλονίκη, 54623

Τηλέφωνο: 2316014433

Email: info@aidplex.com

Τελευταία τροποποίηση: 09-06-2023



Οδηγίες Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφορμας

Αυτό το εγχειρίδιο αφορά τη διαδικτυακή πλατφόρμα του **ScolioSense** προϊόν της **Aidplex**. Το περιεχόμενο πληροφοριών αυτού του εγχειριδίου ανήκει στην **Aidplex** και παρέχεται μόνο για τον χειρισμό συσκευών και λογισμικού της **Aidplex**.

Αυτό το εγχειρίδιο υπόκειται σε τροποποιήσεις. Η πιο πρόσφατη έκδοση είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση www.aidplex.com.

Κατασκευαστής: **Aidplex**

Διεύθυνση: Βασιλέως Ηρακλείου 40 Θεσσαλονίκη, 54623

Email: info@aidplex.com

Τελευταία τροποποίηση: 09-06-2023

Περιεχόμενα

| | |
|---|-----------|
| Περιεχόμενα | 2 |
| Εισαγωγή | 3 |
| Σχετικά με την εταιρεία | 3 |
| Σημαντική σημείωση ασφαλείας | 4 |
| ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ | 4 |
| ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ | 4 |
| Προειδοποιήσεις και Προφυλάξεις | 4 |
| Γενικές Συνθήκες Λειτουργίας | 5 |
| Λειτουργικό περιβάλλον | 5 |
| Διαδικτυακή Πλατφόρμα ScolioSense | 5 |
| Προσόντα χρήστη | 5 |
| Περιγραφή | 5 |
| Οφέλη | 6 |
| Ξεκίνημα | 6 |
| Εγγραφή νέου χρήστη | 6 |
| Σύνδεση λογαριασμού χρήστη | 7 |
| Σελίδα Ασθενών (My patients) | 8 |
| Σελίδα ασθενών για ιατρούς | 8 |
| Προσθήκη ασθενών | 11 |
| Σελίδα Ασθενών για κατασκευαστές κηδεμόνων | 14 |
| Προσθήκη ασθενών | 14 |
| 1. Για ασθενείς που έχουν επισκεφθεί ιατρό που συνεργάζεται με το σύστημα ScolioSense | 14 |
| 2. Για ασθενείς που έχουν επισκεφθεί ιατρό που δεν συνεργάζεται με το σύστημα ScolioSense | 14 |
| Ο Λογαριασμός μου (My Profile) | 15 |
| Καρτέλα Ασθενή (Patient details) | 17 |
| Καρτέλα Ασθενή για ιατρούς | 17 |
| Edit patient | 20 |
| Καρτέλα Ασθενών για κατασκευαστές κηδεμόνων | 21 |
| Ρύθμιση κηδεμόνα-Calibration | 23 |
| Help | 26 |
| Forgot password | 27 |
| SMS Report | 28 |
| Αντιμετώπιση προβλημάτων | 29 |
| Νομικές πληροφορίες | 30 |
| Πολιτική εξυπηρέτησης | 30 |
| Προειδοποίηση | 30 |
| Στοιχεία επικοινωνίας | 30 |

Εισαγωγή

Ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της **Aidplex**.

Το **ScolioSense** είναι ένα σύστημα που προορίζεται να διασφαλίσει την καλή ποιότητα χρήσης του κηδεμόνα σκολίωσης που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της σκολίωσης. Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης και διασφάλισης της πορείας της θεραπείας με κηδεμόνα και τη δυνατότητα ενημέρωσης των ασθενων για την κατάλληλη τοποθέτηση του κηδεμόνα με βάση τις οδηγίες του κλινικού ιατρού.

Το **ScolioSense** αποτελείται από:

1. Την φορητή συσκευή **ScolioSense** που διαθέτει αισθητήρες πίεσης και τοποθετείται στον κηδεμόνα σκολίωσης.
2. Την εφαρμογή λογισμικού για φορητές συσκευές **ScolioSense app** για ασθενείς με σκολίωση.

Η εφαρμογή χρησιμοποιείται για την καταγραφή της διάρκειας χρήσης του κηδεμόνα και για να υπενθυμίσει στον ασθενή την κατάλληλη τοποθέτηση του κηδεμόνα με βάση τις οδηγίες του επιβλέποντα ιατρού.

3. Διαδικτυακή πλατφόρμα για τη διασφάλιση της τήρησης της σωστής πορείας θεραπείας των ασθενών με το κηδεμόνα και της ποιότητας του χρόνου χρήσης του κηδεμόνα κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Σχετικά με την εταιρεία

Η **Aidplex** δραστηριοποιείται στον τομέα της υγείας με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών, ξεκινώντας με αυτούς της σκολίωσης.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία στο **www.aidplex.com**.

Σημαντική σημείωση ασφαλείας

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Η φορητή συσκευή **ScolioSense** δεν προορίζεται για οποιαδήποτε χρήση εκτός του κηδεμόνα σκολίωσης.
- Το **ScolioSense app** δεν προορίζεται για οποιαδήποτε χρήση παρά μόνο αποκλειστικά για ασθενείς σκολίωσης και χρήστες του συστήματος της **Aidplex** με την άδεια του αρμόδιου ιατρού.
- Η διαδικτυακή πλατφόρμα δεν προορίζεται για οποιαδήποτε χρήση εκτός του επιβλέποντα ιατρού και εξουσιοδοτημένου κατασκευαστή κηδεμόνων.
- Το **ScolioSense** δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν κατάλογος ασθενών.
- Η διαδικασία της ρύθμισης του κηδεμόνα (calibration) της διαδικτυακής πλατφόρμας δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της τοποθέτησης του κηδεμόνα παρά μόνο για την αποτύπωση της ενδεδειγμένης χρήσης που έχει ορίσει ο επιβλέπων ιατρός.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Το **ScolioSense** ενδείκνυται για:

- Την χρήση της mobile εφαρμογής **ScolioSense app** για φορητές συσκευές και της φορητής συσκευής κηδεμόνα από ασθενείς σκολίωσης που ακολουθούν θεραπεία με τη χρήση κηδεμόνα σκολίωσης.
- Την χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας από επιβλεποντες ιατρούς ή εξουσιοδοτημένο κατασκευαστή κηδεμόνων με ασθενείς που ακολουθούν θεραπεία σκολίωσης με τη χρήση κηδεμόνων σκολίωσης και χρησιμοποιούν το σύστημα **ScolioSense**.
- Την εξασφάλιση και διασφάλιση της σωστής πορείας της θεραπείας σκολίωσης με την χρήση κηδεμόνα σκολίωσης.
- Την διασφάλιση της τοποθέτησης αλλά και χρήσης του κηδεμόνα σύμφωνα με τις οδηγίες του επιβλέποντα ιατρού.
- Την διαδικασία της ρύθμισης του κηδεμόνα (calibration), η οποία θα πρέπει να εκτελείται μόνο από τον επιβλέποντα γιατρό με σκοπό την αποτύπωση της ενδεδειγμένης τοποθέτησης του κηδεμόνα στον ασθενή.

Προειδοποιήσεις και Προφυλάξεις

- Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση του συστήματος **ScolioSense** πέραν της ενδεδειγμένης.
- Η διαδικτυακή εφαρμογή **ScolioSense** θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από επιβλεποντες ιατρούς και εξουσιοδοτημένους κατασκευαστές κηδεμόνων για ασθενείς που ακολουθούν θεραπεία σκολίωσης με τη χρήση κηδεμόνων σκολίωσης και χρησιμοποιούν το σύστημα **ScolioSense**.

Γενικές Συνθήκες Λειτουργίας

Λειτουργικό περιβάλλον

Για την προσπέλαση της διαδικτυακής πλατφόρμας ο χρήστης πρέπει να έχει να ενημερωμένο πρόγραμμα περιήγησης ιστού. Το **ScolioSense** υποστηρίζει πρόσφατες εκδόσεις του Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Microsoft Edge και των προγραμμάτων περιήγησης για κινητά iOS και Android.

Διαδικτυακή Πλατφόρμα ScolioSense

Προσόντα χρήστη

Η διαδικτυακή πλατφόρμα **ScolioSense** αναφέρεται σε ιατρικό προσωπικό ή εξουσιοδοτημένο προσωπικό κατασκευαστών στον τομέα της θεραπείας της σκολίωσης. Οι χρήστες της εφαρμογής είναι επιβλέποντες γιατροί ή κατασκευαστές κηδεμόνων που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα **ScolioSense** για να παρακολουθούν τους ασθενείς τους με την φορητή συσκευή **ScolioSense** και την εφαρμογή κινητού **ScolioSense app**. Το **ScolioSense app** χρησιμοποιείται από τους ασθενείς σκολίωσης για την καταγραφή της διάρκειας χρήσης του κηδεμόνα και την υπενθύμιση σχετικά με την ενδεδειγμένη τοποθέτηση του κηδεμόνα με βάση τις οδηγίες του επιβλέποντα ιατρού.

Περιγραφή

Η διαδικτυακή πλατφόρμα διαθέτει 7 σελίδες:

1. Σελίδα σύνδεσης χρήστη: Μέσα από αυτή την σελίδα ο χρήστης με τα στοιχεία σύνδεσής του πραγματοποιεί την είσοδο μέσα στην πλατφόρμα.
2. Σελίδα εγγραφής χρήστη (Register): Μέσα από αυτή την σελίδα χρήστης μπορεί να στείλει αίτημα εγγραφής στην πλατφορμα.
3. Σελίδα ασθενών (Dashboard): Η κεντρική σελίδα της πλατφόρμας του **ScolioSense**. Περιέχει μια σύνοψη των ασθενών του χρήστη καθώς και συγκεντρωτικά γραφήματα με πληροφορίες για τους ασθενείς.
4. Σελίδα καρτέλας ασθενή (Patient Details): Σελίδα που περιέχει αναλυτικές πληροφορίες για τον ασθενή και την θεραπεία του.
5. Σελίδα επεξεργασίας στοιχείων ασθενή (Patient Edit): Μέσα από αυτή την σελίδα ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί τις πληροφορίες του ασθενή.
6. Σελίδα προφίλ (Profile) : Μέσα από αυτή την σελίδα ο χρήστης μπορεί να αλλάξει τα στοιχεία του και τον κωδικό πρόσβασης για την πλατφόρμα **ScolioSense**.
7. Σελίδα βοήθειας (Help): Μέσα από αυτή την σελίδα ο χρήστης μπορεί να διαβάσει τις ενημερωμένες οδηγίες χρήσης της διαδικτυακής πλατφόρμας

Οφέλη


Η διαδικτυακή πλατφόρμα είναι απαραίτητη για την προτεινόμενη λειτουργία του **ScolioSense**. Μέσα από την πλατφόρμα ο χρήστης έχει την επίβλεψη των ασθενών για την ενδεδειγμένη θεραπεία της σκολίωσης. Με την διαδικτυακή πλατφόρμα ο χρήστης ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για την πορεία της θεραπείας για κάθε ασθενή του και επιπλέον μπορεί να ορίσει την πορεία την θεραπείας με τον κηδεμόνα

Ξεκίνημα

Για να επισκεφθείτε τη διαδικτυακή πλατφόρμα του **ScolioSense** μπορείτε να πατήσετε στον σύνδεσμο που ακολουθεί [Σύνδεσμος Διαδικτυακής Πλατφόρμας](#).

Εγγραφή νέου χρήστη


Για την εγγραφή σας στην διαδικτυακή πλατφόρμα **ScolioSense** θα πρέπει να πατήσετε τον [σύνδεσμο](#). Στην σελίδα που θα βρεθείτε θα πρέπει να συμπληρώσετε την διεύθυνση email σας και ένας εκπρόσωπος της **Aidplex** θα έρθει σε επαφή μαζί σας για την δημιουργία του λογαριασμού.

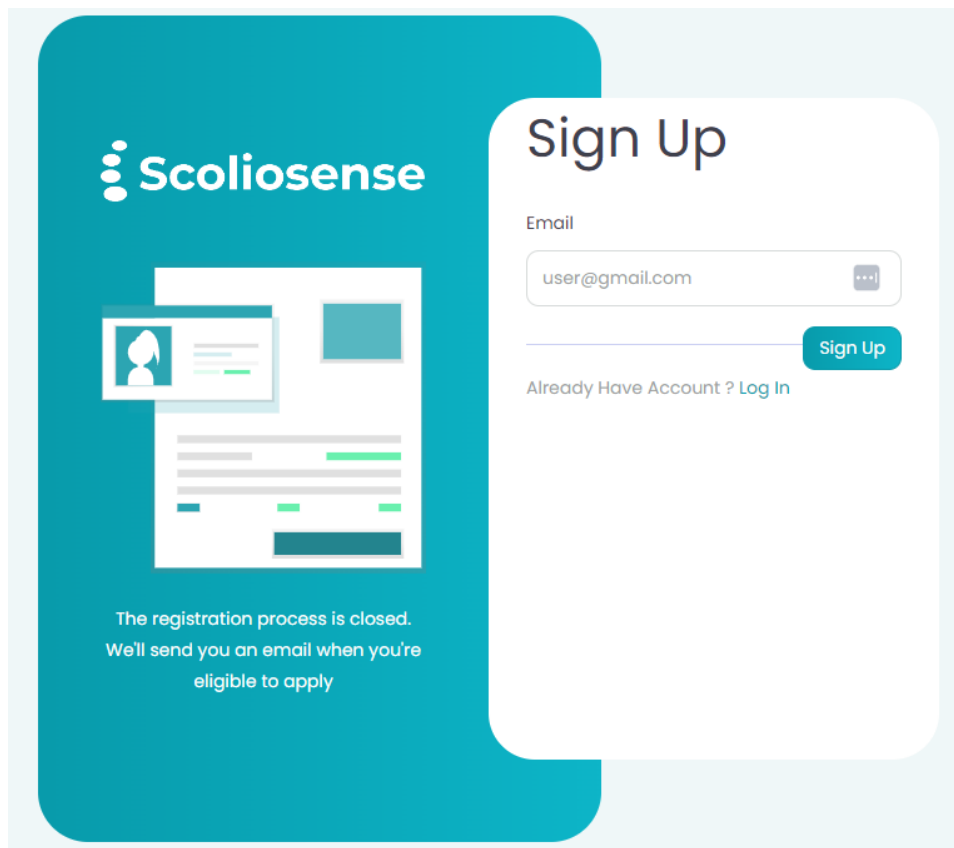

Σύνδεση λογαριασμού χρήστη

Μετά την δημιουργία του λογαριασμού σας από τον εκπρόσωπο της **Aidplex**, θα μπορείτε να συνδεθείτε στην διαδικτυακή πλατφόρμα του **ScolioSense** σε αυτό τον [σύνδεσμο](#).

Στην σελίδα σύνδεση θα πρέπει να συμπληρώσετε τα στοιχεία σύνδεσης σας, ώστε να πραγματοποιηθεί η σύνδεση στην πλατφόρμα του **ScolioSense**.

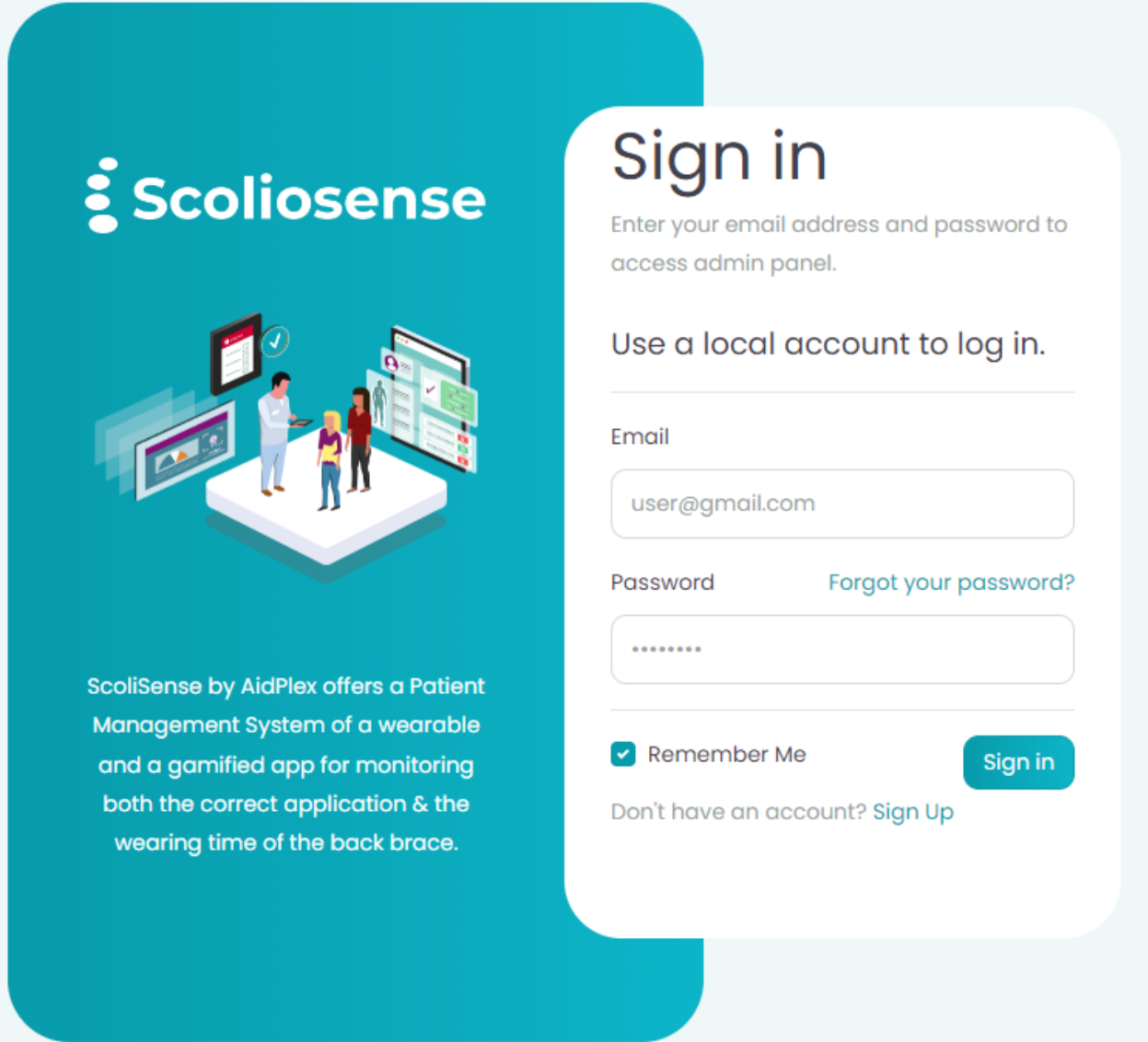

The image shows a sign-in interface for Scoliosense. On the left, there is a teal background with the Scoliosense logo (three white dots) and the text "Scoliosense". Below the logo is an illustration of three people (a doctor and two patients) standing on a white platform, surrounded by floating screens displaying various data and charts. Below the illustration, the text reads: "ScolioSense by AidPlex offers a Patient Management System of a wearable and a gamified app for monitoring both the correct application & the wearing time of the back brace."

On the right, there is a white sign-in form with the following elements:

- Sign in** (large heading)
- Enter your email address and password to access admin panel.
- Use a local account to log in.
- Email** label above a text input field containing "user@gmail.com".
- Password** label above a password input field containing "*****".
- [Forgot your password?](#) link next to the password field.
- Remember Me** checkbox.
- Sign in** button.
- [Don't have an account? Sign Up](#) link.


Σελίδα Ασθενών (My patients)

Σελίδα ασθενών για ιατρούς


Κάτω από αυτή την ενότητα μπορείτε να δείτε την λίστα με τους ασθενείς σας. Η λίστα περιέχει το Όνομα και το Επώνυμό τους, τον Τύπο Σκολίωσης, τον Μέσο Χρόνο Φορέματος του κηδεμόνα και τις Ειδοποιήσεις.

Τύπος Σκολίωσης: Ο τύπος σκολίωσης υποδεικνύει την ταξινόμηση της σκολίωσης των ασθενών του χρήστη σε τύπο S ή τύπο C.

Μέσος χρόνος φορέματος: Ο Μέσος Χρόνος φορέματος είναι μια μέτρηση για κάθε ασθενή που υποδεικνύει εάν ένας ασθενής έχει επιτύχει τον στόχο του μέσου χρόνου φορέματος ανά ημέρα. Ο μέσος χρόνος φορέματος γίνεται πράσινος όταν ο ασθενής έχει ίδιο ή μεγαλύτερο μέσο χρόνο φορέματος και κόκκινο αν έχει μικρότερο μέσο χρόνο φορέματος από αυτό που έχει οριστεί. Τοποθετώντας το δείκτη του ποντικιού πάνω από τον Μέσο Χρόνο φορέματος του ασθενούς, μπορείτε να δείτε τον αριθμό των συνιστώμενων ωρών χρήσης.

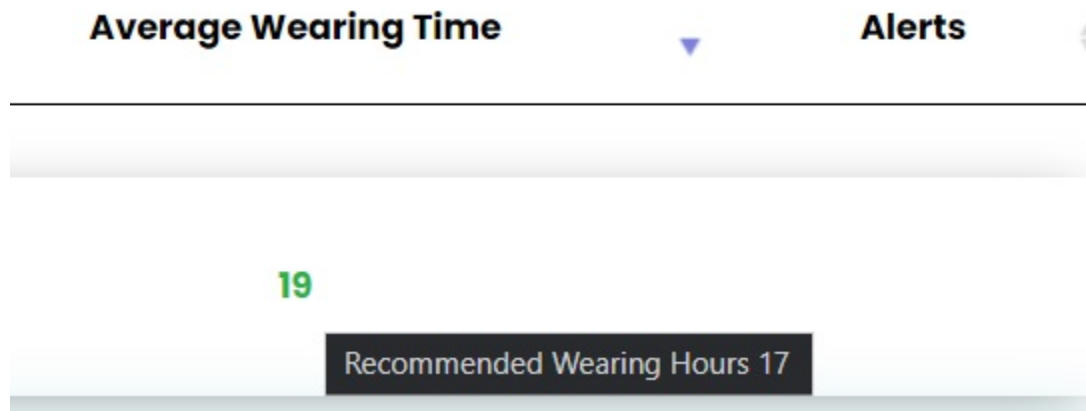

Ειδοποιήσεις : Οι ειδοποιήσεις υποδεικνύουν εάν ο ασθενής δεν είχε δεδομένα για τις τελευταίες 3 ή 7 ημέρες. Εάν ο ασθενής δεν είχε δεδομένα για τις τελευταίες 3 ημέρες, θα εμφανιστεί ένα πορτοκαλί προειδοποιητικό σημάδι [1]. Εάν ο ασθενής σας δεν είχε δεδομένα για τις τελευταίες 7 ημέρες θα εμφανιστεί ένα κόκκινο προειδοποιητικό σημάδι [2].

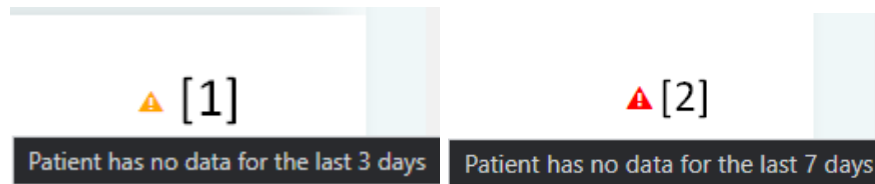


| My Patients | | | | | Search |
|-------------|-----------|----------------|----------------------|--------|--------|
| First Name | Last Name | Scoliosis Type | Average Wearing Time | Alerts | |
| Patient 1 | Patient | C | 0 | ▲ | |
| Patient 2 | Patient | C | 0 | ▲ | |
| Patient 3 | Patient | C | 4 | ▲ | |
| Patient 4 | Patient | C | 20 | ▲ | |
| Patient 5 | Patient | C | 0 | | |

Previous **1** 2 Next ⊕

1. Πατώντας το κουμπί + στο κάτω μέρος της λίστας ασθενών, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν [καινούργιο λογαριασμό ασθενή](#) στην πλατφόρμα.
2. Μέσα από την γραμμή αναζήτησης μπορείτε εύκολα και γρήγορα να αναζητήσετε τους ασθενείς σας.
3. Η λίστα με τους ασθενείς μπορεί να παρουσιάσει μέχρι και 5 ασθενείς σε κάθε σελίδα. Για την περιήγηση στους υπόλοιπους ασθενείς σας θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά, στο κάτω μέρος της λίστας.


Adherence

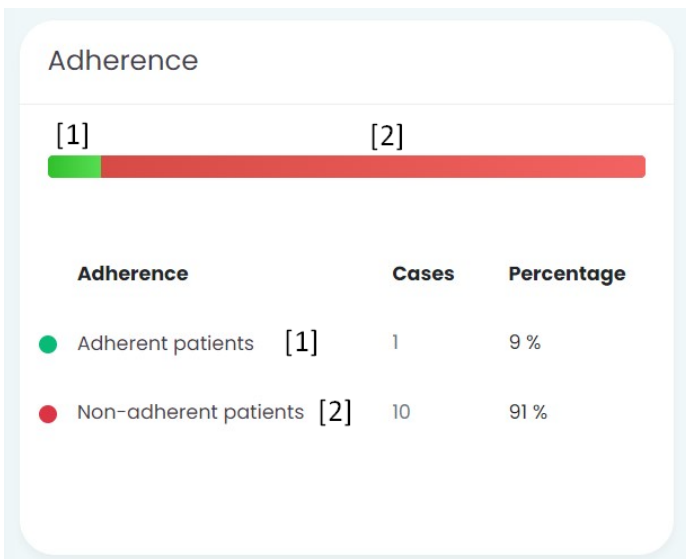

Στο κάτω μέρος της Σελίδας των Ασθενών, υπάρχει ένα συγκεντρωτικό γράφημα που περιέχει τον αριθμό των ασθενών σας που φορούν τον κηδεμόνα

1. Ακολουθώντας τις οδηγίες του επιβλέποντα ιατρού
2. Παραβλέποντας τις οδηγίες του επιβλέποντα ιατρού

Overview

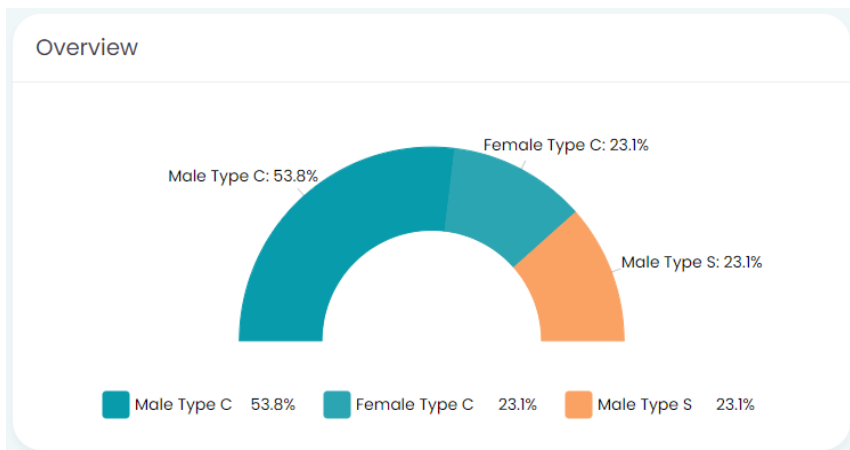

Δίπλα από το γράφημα του Adherence υπάρχει ένα συγκεντρωτικό γράφημα που περιέχει τους ασθενείς σας ομαδοποιημένους σύμφωνα με το φύλο και τον τύπο της σκολίωσης.

Προσθήκη ασθενών

Για την εγγραφή ενός νέου ασθενούς θα πρέπει να συμπληρώσετε τα ορισμένα στοιχεία του ασθενή. Στην ενότητα πληροφορίες λογαριασμού (Account information), θα πρέπει να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία του ασθενή:

1. Όνομα
2. Επώνυμο
3. Email (αυτό το email θα χρησιμοποιηθεί από τον ασθενή για να συνδεθεί στην εφαρμογή **ScolioSense**)
4. Αριθμό τηλεφώνου του γονέα ή κηδεμόνα
5. Γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί για το [εβδομαδιαίο report](#).

Register new patient

Account Personal Treatment Finish

Account Information: Step 1 - 4

Fields with asterisk (*) are required

| | |
|---|---|
| First Name | Last Name |
| <input type="text" value="Jenny"/> | <input type="text" value="Thomson"/> |
| Email *📧 | Guardian's phone number *📞 |
| <input type="text" value="sample@mail.com"/> | <input type="text" value="Greece (+30)"/> <input type="text" value="012 345 6789"/> |
| Guardian's weekly SMS report language | |
| <input checked="" type="radio"/> English <input type="radio"/> Ελληνικά | |

Next

[Privacy Policy](#) [Terms and Conditions](#) [Cookies Policy](#) Copyright © 2023 AidPlex. All Rights Reserved.

Στην συνέχεια, κάνοντας κλικ στο κουμπί **Next**, θα μεταφερθείτε στο δεύτερο στάδιο της εγγραφής.

Στην ενότητα προσωπικά στοιχεία (**Personal information**), θα πρέπει να συμπληρώσετε:

1. Ημερομηνία γέννησης
2. Φύλο
3. Βάρος
4. Ζώνη ώρας
5. Ύψος
6. Τοποθεσία

Register new patient

Account Personal Treatment Finish

Personal Information: Step 2 - 4

| | |
|--|--|
| Date of birth * | Time Zone ☺ |
| <input type="text" value="06/24/1999"/> | <input type="text" value="(GMT +2:00) Helsinki,Athens"/> |
| Sex | Height (cm) |
| <input checked="" type="radio"/> Male <input type="radio"/> Female | <input type="text" value="128"/> |
| Weight (kg) | Location |
| <input type="text" value="45"/> | <input type="text" value="Athens"/> |

Previous Next

[Privacy Policy](#) [Terms and Conditions](#) [Cookies Policy](#) Copyright © 2023 AidPlex. All Rights Reserved.

Κάνοντας κλικ στο κουμπί **Next** θα μεταφερθείτε στο 3 στάδιο της εγγραφής του ασθενούς, η οποία περιέχει περισσότερα στοιχεία σχετικά με την θεραπεία.

Στην ενότητα πληροφορίες θεραπειάς (**Treatment**), θα πρέπει να συμπληρώσετε τον τύπο της σκολίωσης, τις αρχικές τιμές της γωνίας Cobb με τον κηδεμόνα αλλά και χωρίς τον κηδεμόνα. Στην περίπτωση που ασθενής έχει καμπύλη σκολίωσης τύπου S τότε πρέπει να συμπληρώσετε τα στοιχεία της δεύτερης γωνίας Cobb. Τέλος θα πρέπει να συμπληρώσετε την ταξινόμηση Risser, τις συνιστώμενες ώρες χρήσης του κηδεμόνα καθώς και το πλήθος των αισθητήρων (μέγιστο 3) που θα χρησιμοποιηθούν με τη συσκευή **ScolioSense** με τα ονόματα τους.

Treatment Information: Step 3 - 4

| | |
|--|---|
| Scoliosis Curve <input checked="" type="radio"/> Type C <input type="radio"/> Type S | Recommended Wearing Hours <input type="text" value="18"/> |
| Starting Cobb Angle 1 <input type="text"/> | Cobb Angle 1 with brace <input type="text"/> |
| Risser Classification <input type="text" value="Stage 0"/> | Manufacturer ⓘ <input type="text" value="Socare Sawwidis"/> |

Arranging the position of the sensors

The sensors should be placed at the peaks of the pressure areas without altering or hindering the structure of the brace. The system can support up to four sensors.

The main module should be placed to the outer surface of the brace in a way that it would not hinder the patient's comfort.


| | |
|--|---|
| Number of Sensors <input type="text" value="1"/> | Sensor Name <input type="text" value="Right Upper Thoracic"/> |
|--|---|

Τέλος πατώντας το κουμπί Next θα ολοκληρώσετε την διαδικασία εγγραφής ενός νέου ασθενή στην πλατφόρμα (ένα αυτοματοποιημένο email θα σταλεί στο email του ασθενής σας).

Σελίδα Ασθενών για κατασκευαστές κηδεμόνων

Κάτω από αυτή την ενότητα μπορείτε να δείτε την λίστα με τους ασθενείς σας. Η λίστα περιέχει το Όνομα και το Επώνυμό τους και τον Τύπο Σκολίωσης του ασθενή.

Τύπος Σκολίωσης: Ο τύπος σκολίωσης υποδεικνύει την ταξινόμηση της σκολίωσης των ασθενών του χρήστη σε τύπο S ή τύπο C.

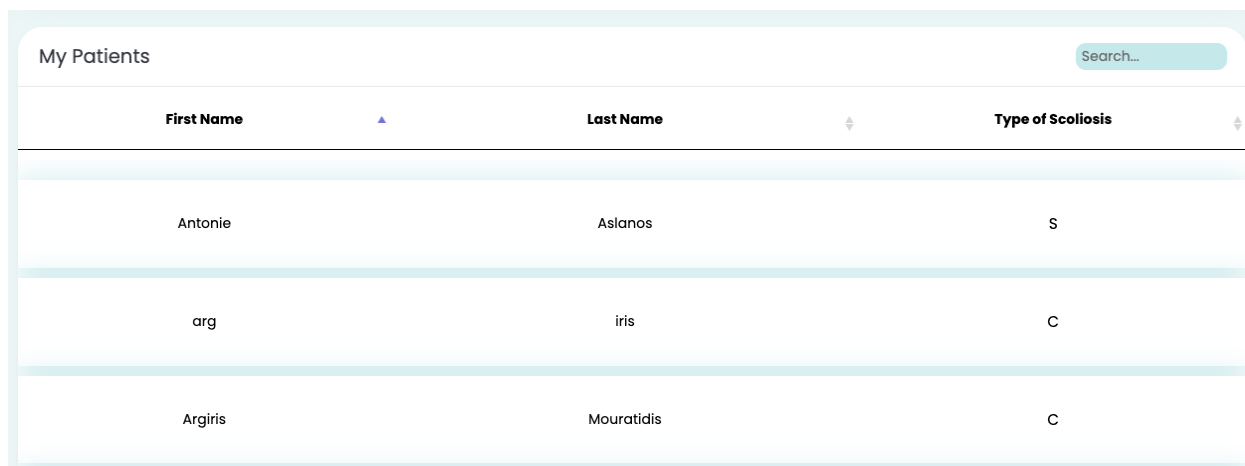

| First Name | Last Name | Type of Scoliosis |
|------------|------------|-------------------|
| Antonie | Aslanos | S |
| arg | iris | C |
| Argiris | Mouratidis | C |


Προσθήκη ασθενών

Ως κατασκευαστής έχετε να διαχειριστείτε ασθενείς από διαφορετικούς ιατρούς είτε ασθενείς οι οποίοι έρχονται σε εσάς πριν επισκεφθούν κάποιον ιατρό. Για αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες που ακολουθούν:

- Για ασθενείς που έχουν επισκεφθεί ιατρό που συνεργάζεται με το σύστημα ScolioSense*
Όταν ένας ιατρός εισάγει έναν ασθενή στην πλατφόρμα τότε θα πρέπει να τον αντιστοιχήσει με κάποιον κατασκευαστή ώστε να πραγματοποιηθεί η κατασκευή του κηδεμόνα σκολίωσης και η εγκατάσταση της συσκευής ScolioSense. Επομένως την στιγμή που θα αντιστοιχηστεί κάποιος ασθενής με εσάς η καρτέλα του θα συνδεθεί και στην δική σας λίστα ασθενών, χωρίς να πρέπει να πραγματοποιήσετε κάποια διαδικασία.
- Για ασθενείς που έχουν επισκεφθεί ιατρό που **δεν** συνεργάζεται με το σύστημα ScolioSense*
Στην περίπτωση που ο ιατρός δεν συνεργάζεται με το σύστημα ScolioSense, τότε η aidrplex θα επικοινωνήσει μαζί του και η καρτέλα του ασθενή θα δημιουργηθεί είτε από τον ίδιο τον ιατρό είτε από την aidrplex για εσάς.

Ο Λογαριασμός μου (My Profile)

Για να δείτε τον λογαριασμό σας μπορείτε να επιλέξετε το όνομά σας και στην συνέχεια την επιλογή my profile είτε επιλέγοντας το εικονίδιο του profile από την γραμμή πλοήγησης.

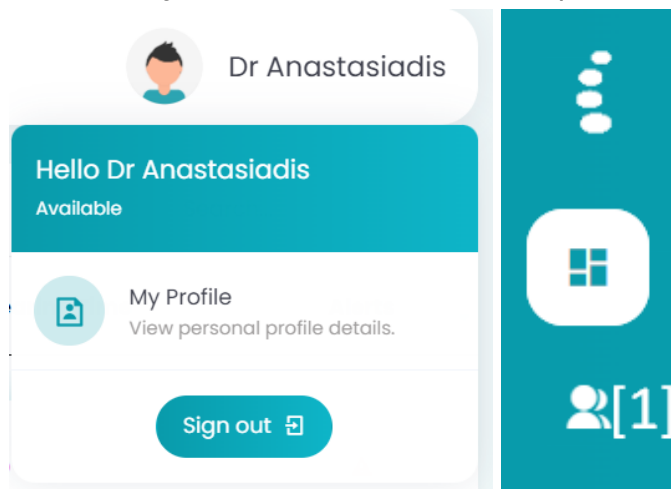

Μέσα από την οθόνη του προφίλ μπορείτε να αλλάξετε τα παρακάτω

1. Όνομα
2. Έπίθετο
3. Αριθμό τηλεφώνου

Σημαντικό: Το email[3] δεν μπορεί να αλλαχθεί. Σε περίπτωση που επιθυμείτε αλλαγή της διεύθυνσης email, επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα στο support@airidex.

Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας θα πρέπει να επιλέξετε το κουμπί [5].

A screenshot of a "Personal Information" form. At the top, there are two tabs: "Personal Information" (active) and "Change Password [6]". The form has a title "Personal Information". It contains four input fields: "First Name:" with the value "Dr [1]", "Last Name:" with the value "Anastasiadis [2]", "Email:" with the value "aidplex@gmail.com [3]", and "Phonenumber:" with the value "6971234567 [4]". At the bottom left, there is a "Submit [5]" button.

Αν επιθυμείτε να αλλάξετε τον κωδικό σύνδεσής σας θα πρέπει να επιλέξετε την καρτέλα [6]

Personal Information

Change Password

Change Password

Current Password:

..... [1]

New Password:

..... [2]

Confirm Password:

..... [3]

Submit

Στην οθόνη αλλαγή κωδικού, για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης σας, θα πρέπει να εισάγετε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης[1].

Στην περίπτωση που ο κωδικός πρόσβασης δεν είναι σωστός εμφανίζεται το κατάλληλο μήνυμα λάθους, όπως φαίνεται παρακάτω.

Στη συνέχεια θα πρέπει να εισάγετε τον νέο κωδικό[2] και να τον επιβεβαιώσετε στο πεδίο[3].

Current Password: **Your password was incorrect.**


.....

Για την αποθήκευση του νέου κωδικού πρόσβασης θα πρέπει να επιλέξετε το κουμπί Submit.

Καρτέλα Ασθενή (Patient details)

Καρτέλα Ασθενή για ιατρούς

Για να δείτε αναλυτικές πληροφορίες ενός ασθενή σας θα πρέπει να επιλέξετε τον ασθενή από τον κατάλογο της σελίδα ασθενών.

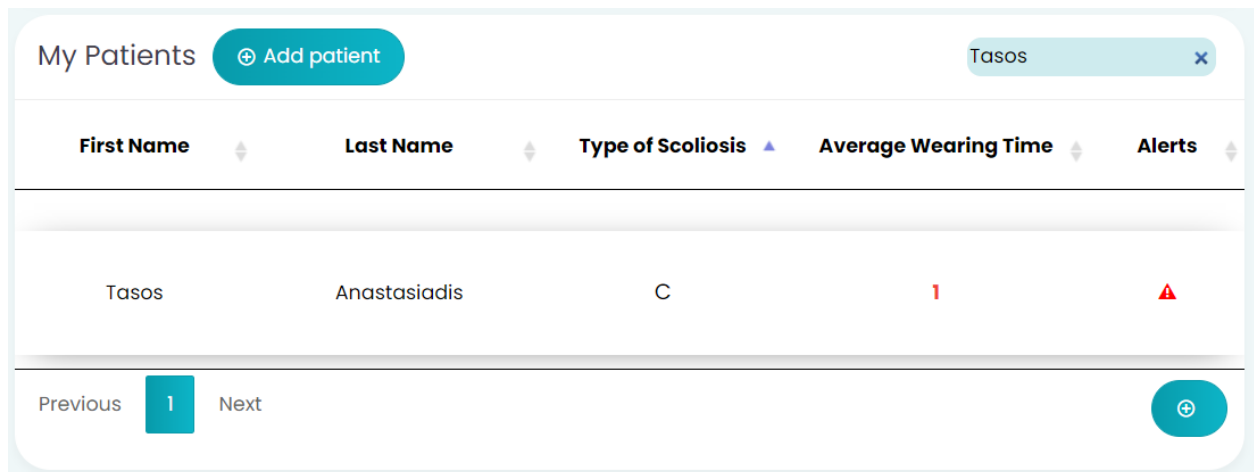


The screenshot shows a web interface for 'My Patients'. At the top, there is a search bar with 'Tasos' entered and an 'Add patient' button. Below is a table with columns: First Name, Last Name, Type of Scoliosis, Average Wearing Time, and Alerts. The table contains one row for 'Tasos Anastasiadis' with a 'C' scoliosis type, an average wearing time of '1', and a red alert icon. At the bottom, there are 'Previous' and 'Next' navigation buttons, with '1' highlighted in a blue box, and a circular 'Add patient' button.

| First Name | Last Name | Type of Scoliosis | Average Wearing Time | Alerts |
|------------|--------------|-------------------|----------------------|--------|
| Tasos | Anastasiadis | C | 1 | ⚠ |

Στο πρώτο μέρος της οθόνης με τις λεπτομέρειες του χρήστη εμφανίζονται μερικά προσωπικά στοιχεία του ασθενή σας όπως:

1. Το βάρος
2. Το ύψος
3. Η τρέχουσα γωνία Cobb, (στην περίπτωση που ασθενής έχει σκολίωση τύπου S τότε εμφανίζονται και οι δυο γωνίες Cobb),
4. Η ηλικία
5. Η τοποθεσία του ασθενή

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα στοιχεία του ασθενή σας, πατώντας το κουμπί [6] ώστε να μεταφερθείτε στην [Σελίδα τροποποίησης στοιχείων ασθενή](#).

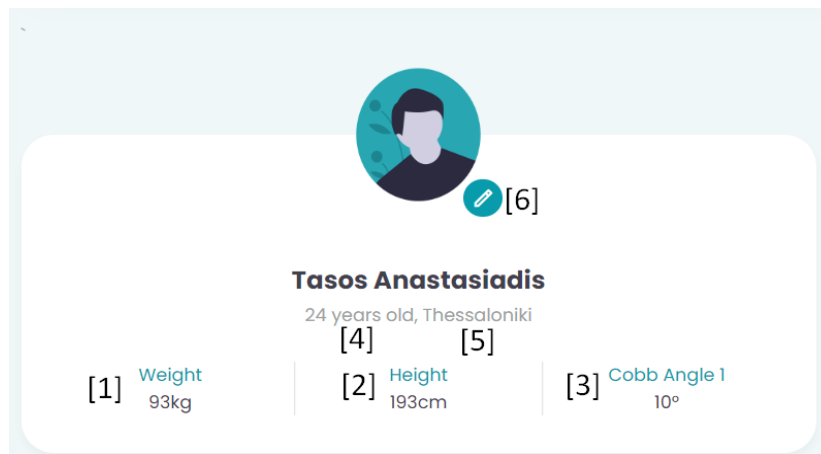


The screenshot shows a patient profile card for 'Tasos Anastasiadis'. At the top is a circular profile picture with a red edit icon [6]. Below the name, it says '24 years old, Thessaloniki'. The card displays three key metrics: [1] Weight 93kg, [2] Height 193cm, and [3] Cobb Angle 1 10°. There are also two additional markers: [4] and [5].

Tasos Anastasiadis
24 years old, Thessaloniki

[1] Weight 93kg | [2] Height 193cm | [3] Cobb Angle 1 10°


[4] [5]

Κάτω από τα προσωπικά στοιχεία, βρίσκονται τα γραφήματα πιέσεων των αισθητήρων του ασθενούς. Το ενδεδειγμένο εύρος που έχει οριστεί από την ενδεδειγμένη τοποθέτηση του κηδεμόνα, εμφανίζεται με το ανοιχτό μπλε. Με την μαύρη γραμμή υποδεικνύεται η πίεση που καταγράφηκε στον τελευταίο έλεγχο τοποθέτησης του κηδεμόνα που πραγματοποίησε ο ασθενής.

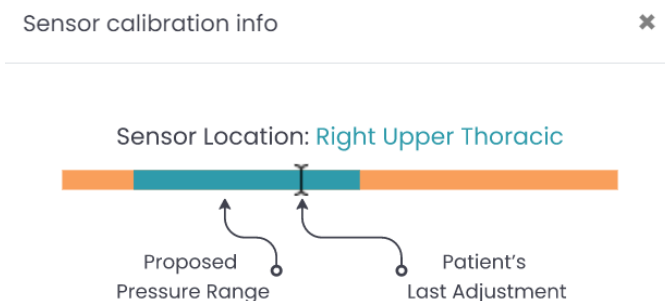

Δίπλα από τις πληροφορίες του ασθενούς υπάρχει το συγκεντρωτικό γράφημα χρήσης του συστήματος **ScolioSense**. Κάθε μπάρα αντιπροσωπεύει μια μέρα χρήσης του συστήματος. Με το ανοιχτό μπλε εμφανίζονται οι ώρες φορέματος με τοποθέτηση εντός του ενδεδειγμένου εύρους τοποθέτησης του κηδεμόνα[2] και με πορτοκαλί οι ώρες εκτός του ενδεδειγμένου εύρους τοποθέτησης του κηδεμόνα. Τοποθετώντας το δείκτη του ποντικιού πάνω από μια μπάρα εμφανίζονται περισσότερες πληροφορίες για την συγκεκριμένη ημέρα[2]. Η μαύρη γραμμή[3] συμβολίζει τις ενδεδειγμένες ώρες χρήσης του κηδεμόνα. Απο τα πλαίσιο στο πάνω μέρος του γραφήματος μπορείτε να ορίσετε ένα προσαρμοσμένο διάστημα ημερών[1].

Wearing Time In Hours

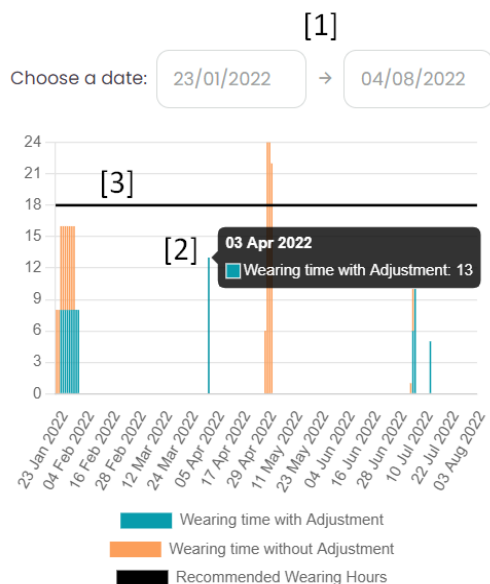

Δίπλα από το γράφημα χρήσης, παρουσιάζονται πληροφορίες σχετικές με την πορεία της θεραπείας όπως:

1. Η ημερομηνία που ξεκίνησε την θεραπεία(ημερομηνία εγγραφής στο **ScolioSense**),
2. Η μέτρηση Risser
3. Η γωνία Cobb
4. Η γωνία Cobb φορώντας τον κηδεμόνα (στην περίπτωση που ο ασθενής έχει σκολίωση τύπου S τότε εμφανίζονται και οι δυο γωνίες Cobb).

Τέλος για να ξεκινήσετε την [διαδικασία ρύθμισης του κηδεμόνα](#) θα πρέπει να πατήσετε το κουμπί **Start Calibration**[5]

Status

Started on

17 November 2022

Risser classification

Stage 0

Starting Cobb Angle 1

0

Cobb Angle 1 with brace

0

Calibrated by:

Jim Moustakas

Start Calibration

Edit patient

Μέσα από την σελίδα επεξεργασίας του ασθενούς, μπορείτε να επεξεργαστείτε όλες τις πληροφορίες του ασθενούς.

Η διαγραφή ασθενή γίνεται μέσα από το κουμπί [1] Remove Patient.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διαγραφή ασθενή είναι μη αναστρέψιμη!

Για την αλλαγή την φορητής συσκευής ενός ασθενή θα πρέπει να επιλέξετε το κουμπί Change **ScolioSense**[2]. Μετά την αλλαγή της συσκευής θα πρέπει να γίνει εκ νέου ρύθμιση.

Σε περίπτωση που αλλάξετε τον αριθμό των αισθητήρων ή τις θέσεις των αισθητήρων τότε θα πρέπει να ξαναγίνει εκ νέου η διαδικασία [ρύθμισης](#) [3].

Για την αποθήκευση των αλλαγών θα πρέπει να επιλέξετε το κουμπί Submit [4].

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την αποθήκευση των αλλαγών, μπορείτε να μεταφερθείτε στην καρτέλα του ασθενούς χωρίς αποθήκευση πατώντας το Go back to patient details without saving.

Personal Information [1] Remove patient

First Name: Tasos Last Name: Anastasiadis

Email: tasos@aidplex.com Guardian's phone number: Greece (+30) 6971235467

Guardian's weekly SMS report language: English Ελληνικά

Location: Athens

Time Zone: (GMT +2:00) Helsinki, Athens Weight: 60

Height: 170 Birthdate: 01/10/1999

Sex: Male Female Type Of Scoliosis: Type C Type S

Recommended Wearing Hours: 18 Current Cobb Angle 1: 20

Starting Cobb Angle 1: 29 Cobb Angle 1 with brace: 19


Risser classification: Stage 2 Number of Sensors: 1

Sensor 1 Name: Left Lower Thoracic [3]

Change ScolioSense device [2] Go back to patient Details without saving Submit [4]

Καρτέλα Ασθενών για κατασκευαστές κηδεμόνων

Για να δείτε αναλυτικές πληροφορίες ενός ασθενή σας θα πρέπει να επιλέξετε τον ασθενή από τον κατάλογο της σελίδα ασθενών.

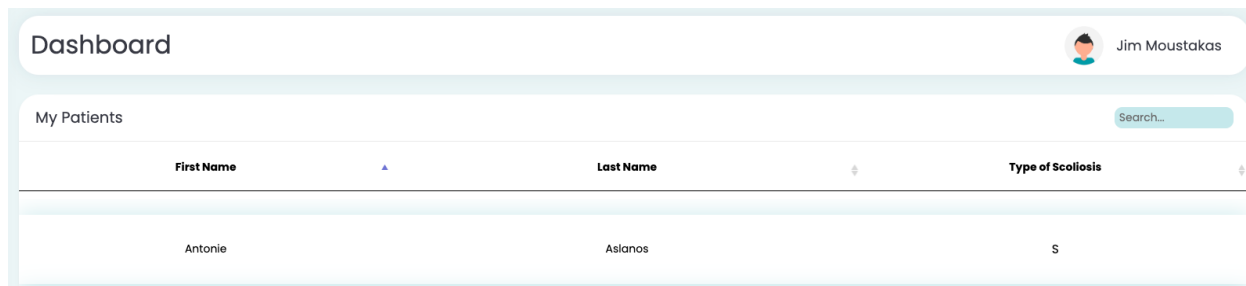


The screenshot shows a dashboard titled 'Dashboard' with a user profile 'Jim Moustakas'. Below is a section 'My Patients' with a search bar. A table lists patients with columns for 'First Name', 'Last Name', and 'Type of Scoliosis'. One patient is listed: Antonie Aslanos with Type of Scoliosis S.

| First Name | Last Name | Type of Scoliosis |
|------------|-----------|-------------------|
| Antonie | Aslanos | S |

Στο πρώτο μέρος της οθόνης με τις λεπτομέρειες του χρήστη εμφανίζονται μερικά προσωπικά στοιχεία ασθενή όπως:


6. Το βάρος
7. Το ύψος
8. Η τρέχουσα γωνία Cobb,(στην περίπτωση που ασθενής έχει σκολίωση τύπου S τότε εμφανίζονται και οι δυο γωνίες Cobb),
9. Η ηλικία
10. Η τοποθεσία του ασθενή

Τέλος για να ξεκινήσετε την [διαδικασία ρύθμισης του κηδεμόνα](#) θα πρέπει να πατήσετε το κουμπί **Start Calibration**

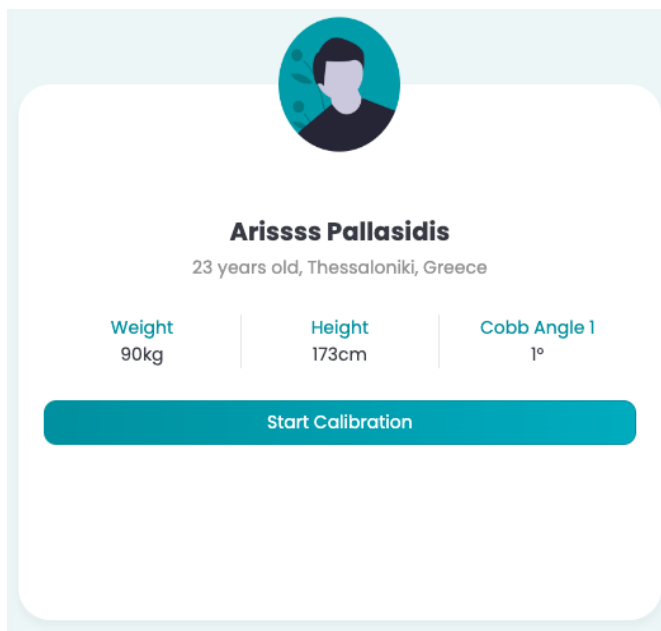


Δίπλα από τα προσωπικά στοιχεία, βρίσκονται τα γραφήματα πιέσεων των αισθητήρων του ασθενούς. Το ενδεδειγμένο εύρος που έχει οριστεί από την ενδεδειγμένη τοποθέτηση του κηδεμόνα, εμφανίζεται με το ανοιχτό μπλε. Με την μαύρη γραμμή υποδεικνύεται η πίεση που

καταγράφηκε στον τελευταίο έλεγχο τοποθέτησης του κηδεμόνα που πραγματοποίησε ο ασθενής.

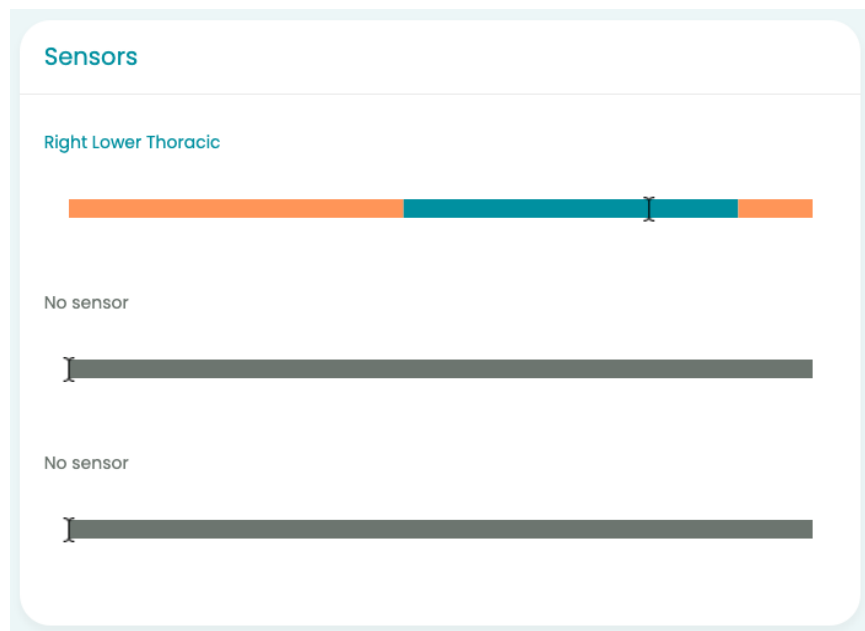


Δίπλα από το γράφημα χρήσης, παρουσιάζονται πληροφορίες σχετικές με την πορεία της θεραπείας όπως:

5. Η ημερομηνία που ξεκίνησε την θεραπεία(ημερομηνία εγγραφής στο **ScolioSense**),
6. Η μέτρηση Risser
7. Το όνομα του λογαριασμού που πραγματοποίησε την τελευταία ρύθμιση
8. Η ημερομηνία της τελευταίας ρύθμισης

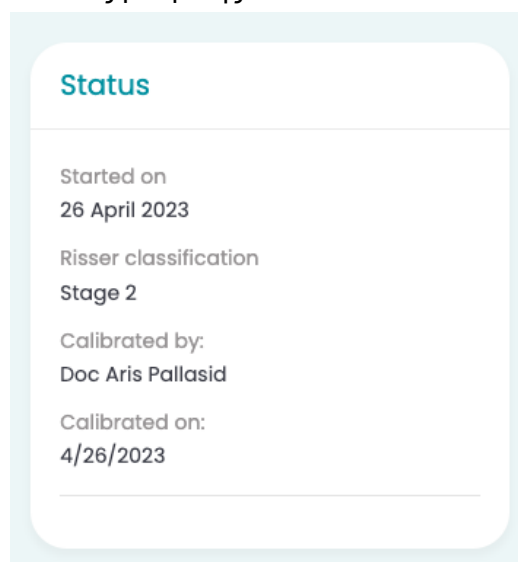

Ρύθμιση κηδεμόνα-Calibration

Για την ρύθμιση των αισθητήρων ο ασθενής θα πρέπει να φοράει τον κηδεμόνα και να βρίσκεται σε όρθια θέση. Η ρύθμιση της σωστής τοποθέτησης του κηδεμόνα καθορίζεται από τον χρήστη. Ο ασθενής θα πρέπει να έχει την εφαρμογή **ScolioSense** στην κινητή συσκευή του, να έχει πραγματοποιήσει είσοδο στην εφαρμογή καθώς και να έχει ενεργή σύνδεση στο διαδίκτυο και ενεργοποιημένες τις υπηρεσίες τοποθεσίας και Bluetooth. Επίσης θα πρέπει να βρίσκεται στην σελίδα adjustment

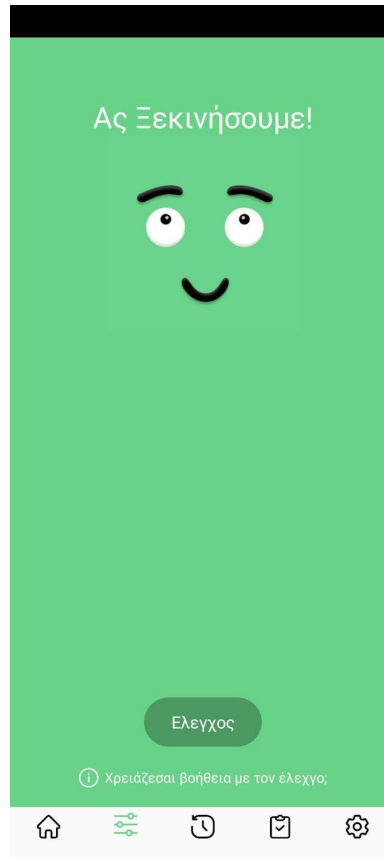

Μόλις τοποθετήσετε τον κηδεμόνα του ασθενή στην επιθυμητή θέση θα πρέπει να πατήσετε το κουμπί **start calibration**.

Calibration process



Calibration is about to start, make sure that the patient is connected with the brace



[1]

Close

Start calibration

Στην συνέχεια αποστέλλεται μια ειδοποίηση στην κινητή συσκευή του ασθενή και ξεκινάει η διαδικασία της ρυθμίσης των αισθητήρων.

Calibration process



Calibration is about to start, make sure that the patient is connected with the brace



Close


Start calibration

Κατά την διάρκεια της ρύθμισης του κηδεμόνα ο ασθενής θα πρέπει να αναπνέει κανονικά, ώστε να ρυθμιστούν σωστά τα όρια πιέσεων των αισθητήρων.

Calibration process ✕


Calibration is about to start, make sure that the patient is connected with the brace

Calibration send Calibration started Calibration completed



Close Start calibration

Η διαδικασία της ρύθμισης του κηδεμόνα φαίνεται παρακάτω μέσα από τον εφαρμογή **ScolioSense** σε περιβάλλον android. Η διαδικασία ολοκληρώνεται αυτόματα

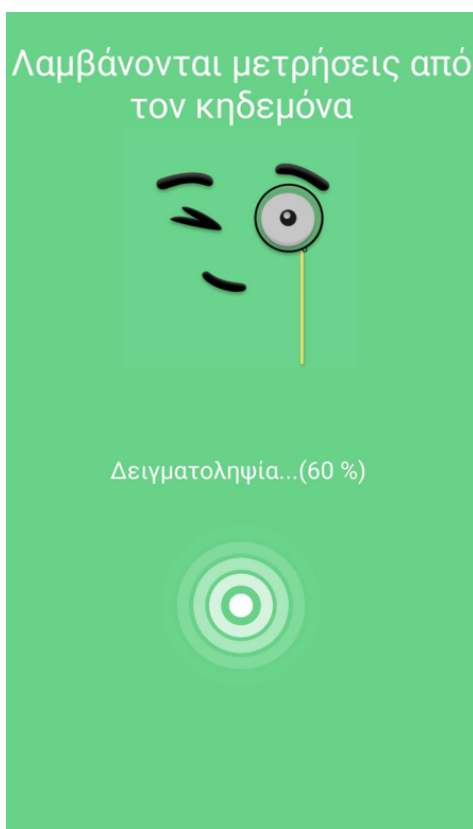


Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το παράθυρο με τις πληροφορίες του ασθενούς ανανεώνεται αυτόματα με τα νέα όρια των αισθητήρων.

Calibration process ✕

Calibration is about to start, make sure that the patient is connected with the brace

Calibration send Calibration started Calibration completed



Close Start calibration

Help

Μέσα από την σελίδα βοήθειας μπορείτε να μάθετε περισσότερα για όλες τις λειτουργίες της πλατφόρμας του **ScolioSense**, καθώς και τρόπους αντιμετώπισης πιθανών προβλημάτων

Dashboard

Patient

Account

DASHBOARD


- Add Patient ▼
- My patients ▼
- Adherence ▼
- Overview ▼

PATIENT

- Patient details ▼


Forgot password

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να βρείτε τον κωδικό πρόσβασής σας μπορείτε να κάνετε ανάκτηση του κωδικού πρόσβασης σε αυτόν τον [σύνδεσμό](#).



The screenshot shows the 'Reset Password' page for Scoliosense. On the left, there is a teal background with the Scoliosense logo (three dots above the word 'Scoliosense') and an illustration of a person standing next to a large screen displaying a login form with a key icon and a password field. On the right, a white rounded rectangle contains the form. The title 'Reset Password' is at the top. Below it, a short instruction reads: 'Enter your email address and we'll send you an email with instructions to reset your password.' The 'Email address' label is followed by a text input field containing 'Enter email [1]'. A teal 'Reset Password' button is positioned to the right of the input field.

Στα επόμενα λεπτά αποστέλλεται ένα email που περιέχει ένα σύνδεσμο με την σελίδα δημιουργίας νέου κωδικού πρόσβασης. Μετά την συμπληρωσει του κωδικού και την επιλογή του Reset Password μπορείτε να εισέλθετε στην πλατφόρμα με τον νέο σας κωδικό.

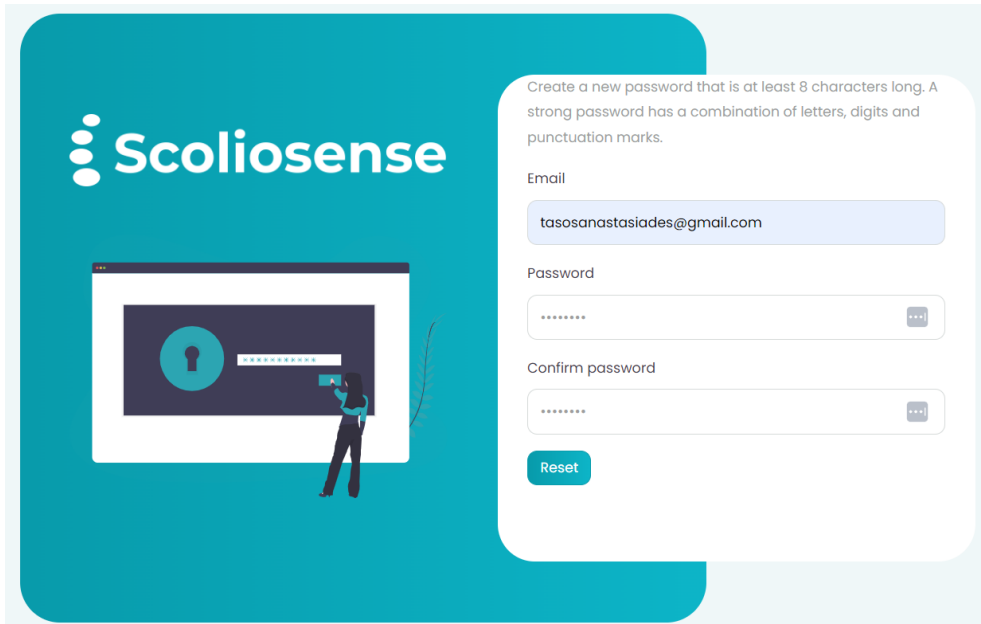


The screenshot shows the 'Create New Password' page for Scoliosense. On the left, there is a teal background with the Scoliosense logo and the same illustration of a person next to a large screen displaying a login form. On the right, a white rounded rectangle contains the form. At the top, an instruction reads: 'Create a new password that is at least 8 characters long. A strong password has a combination of letters, digits and punctuation marks.' The 'Email' label is followed by a text input field containing 'tasosanastasiades@gmail.com'. Below it, the 'Password' label is followed by a text input field with a masked password '*****' and a visibility toggle icon. The 'Confirm password' label is followed by another text input field with a masked password '*****' and a visibility toggle icon. A teal 'Reset' button is positioned below the input fields.

SMS Report

Το σύστημα ScolioSense υποστηρίζει την αποστολή μιας αναφοράς μέσω SMS στον κηδεμόνα του ασθενή. Η αναφορά περιέχει τον μέσο όρο χρήσης του ασθενούς και το εάν η χρήση ακολουθούσε τις οδηγίες του ιατρού.

Η αποστολή της αναφοράς πραγματοποιείται κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα. Στην περίπτωση που ο κηδεμόνας θέλει να σταματήσει την εβδομαδιαία αναφορά θα πρέπει να απαντήσει στο SMS με μια από τις λέξεις **STOP, STOPALL, UNSUBSCRIBE, CANCEL, END,** or **QUIT**. Για την εκ νέου ενεργοποίηση της λειτουργίας θα πρέπει να στείλει μια από τις λέξεις **START, YES, UNSTOP**

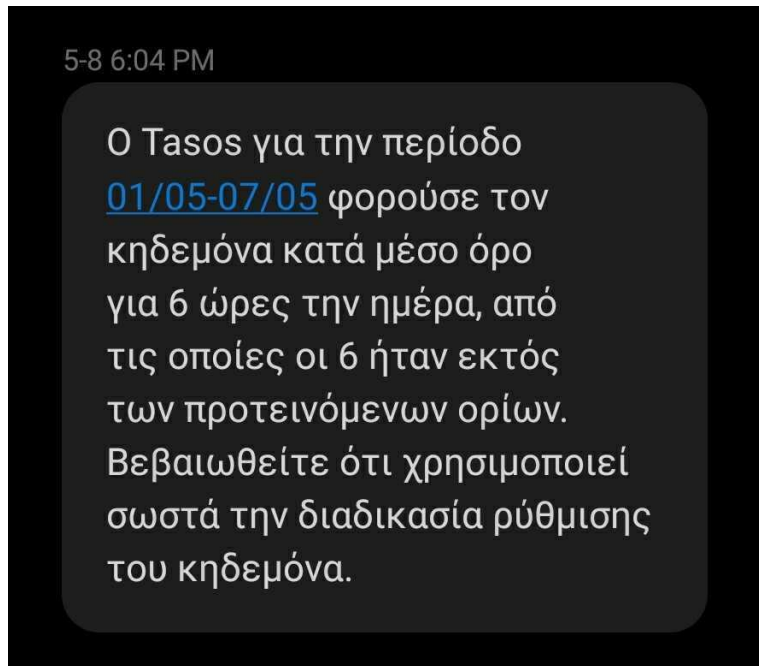

Αντιμετώπιση προβλημάτων

| Πρόβλημα | Αντιμετώπιση |
|---|--|
| Δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σύνδεση στην πλατφόρμα | Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την Aidplex |
| Δεν μπορεί να εκτελεστεί η διαδικασία ρύθμισης του κηδεμόνα (calibration) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Βεβαιωθείτε πως το ScolioSense app έχει ενεργοποιημένες τις υπηρεσίες τοποθεσίας και Bluetooth καθώς και ενεργή σύνδεση στο διαδίκτυο. 2. Βεβαιωθείτε πως το ScolioSense app είναι ανοικτό και ο ασθενής βρίσκεται στην σελίδα ελέγχου τοποθέτησης κηδεμόνα. 3. Σε περίπτωση που το ScolioSense app ανταποκρίνεται στο αίτημα calibration της πλατφόρμας αλλά η διαδικασία τερματίζεται απρόσμενα τότε: <ol style="list-style-type: none"> a. Απενεργοποιήστε τις υπηρεσίες τοποθεσίας και Bluetooth της συσκευής του ασθενή και στην συνέχεια ενεργοποιήστε ξανά τις παραπάνω υπηρεσίες. b. Επανεκκινήστε το ScolioSense app. Κλείσιμο της εφαρμογής από το παρασκήνιο και επανάληψη της δοκιμής. 4. Σε περίπτωση που το ScolioSense app δεν ανταποκρίνεται στο αίτημα calibration της πλατφόρμας τότε: <ol style="list-style-type: none"> a. Πραγματοποιήστε αποσύνδεση του ασθενή από το ScolioSense app και στην συνέχεια πραγματοποιήστε σύνδεση του ασθενή στο ScolioSense app. b. Απεγκαταστήστε το ScolioSense app και επανεγκατάσταση το στην συσκευή του ασθενή. <p style="text-align: center;">Αν το πρόβλημα συνεχιστεί επικοινωνήστε με την Aidplex.</p> |
| Ο ασθενής δεν έλαβε το email εγγραφής του από την πλατφόρμα | <ol style="list-style-type: none"> 1. Βεβαιωθείτε πως δεν έχει παραδοθεί κάποιο email στην διεύθυνση που έχει δώσει ο ασθενής, τόσο στα εισερχόμενα όσο και στον φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam) 2. Βεβαιωθείτε για τη σωστή καταχώρηση της διεύθυνσης που έχει δώσει ο ασθενής μέσα στην πλατφόρμα. 3. Διαγράψτε του ασθενή από την πλατφόρμα και δημιουργήστε νέο λογαριασμό ασθενή. <p style="text-align: center;">Αν το πρόβλημα συνεχιστεί επικοινωνήστε με την Aidplex.</p> |

Νομικές πληροφορίες

Η **Aidplex** αποκλείει κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων, απώλεια κερδών ή οποιαδήποτε άλλη απώλεια ή ζημία υποστεί ο τελικός πελάτης.

Η φορητή συσκευή **ScolioSense** έχει εγγύηση για 2 έτη από την αγορά, ημερομηνία κατά την οποία χρησιμοποιείται σύμφωνα με το παρόν εγχειρίδιο.

Η **Aidplex** μπορεί να προχωρήσει στην αντικατάσταση μιας συσκευής **ScolioSense** καλύπτονται από την εγγύηση δωρεάν.

Προσοχή:

Η εγγύηση είναι άκυρη σε περίπτωση τροποποίησης ή αντικατάστασης οποιουδήποτε εξαρτήματος σε συσκευή **ScolioSense** από προσωπικό χωρίς την εξουσιοδότηση της **Aidplex** ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου της.

Η **Aidplex** δεν εγγυάται κανένα θεραπευτικό αποτέλεσμα κατά τη χρήση του **ScolioSense**.

Πολιτική εξυπηρέτησης

Η **Aidplex** διαθέτει ομάδα υποστήριξης για το **ScolioSense** στην οποία μπορεί να απευθυνθείτε για οποιαδήποτε απορία ή πρόβλημα σχετικά με το προϊόν.

Τηλέφωνο: 2316014433

Email: support@aidplex.com

Προειδοποίηση

Το **ScolioSense** είναι ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν κατηγορίας 1, εξάρτημα του ιατροτεχνολογικού προϊόντος κατηγορίας 1 κηδεμόνα σκολίωσης.

Το **ScolioSense** πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες χρήσης.

Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός.

Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν το **ScolioSense**.

Συμβουλευτείτε ανα τακτά διαστήματα τον ιστότοπο της **Aidplex** ή του **ScolioSense** για διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με αντενδείξεις, κινδύνους ή παρενέργειες σχετικά με το **ScolioSense**.

Το **ScolioSense** δεν προσφέρει συμβουλές θεραπείας ή οποιαδήποτε ιατρική διάγνωση.

Η **Aidplex** δεν εγγυάται κανένα θεραπευτικό αποτέλεσμα κατά τη χρήση του **ScolioSense**.

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση: Βασιλέως Ηρακλείου 40 Θεσσαλονίκη, 54623

Τηλέφωνο: 2316014433

Email: info@aidplex.com