

Οδηγίες Χρήσης Συσκευής και Εφαρμογής Κινητού Aidplex Scoliosense 1.0.

Διεύθυνση: Βασιλέως Ηρακλείου 40 Θεσσαλονίκη, 54623

Τηλέφωνο: 2316014433

Email: info@aidplex.com

Τελευταία τροποποίηση: 08-06-2023



Οδηγίες Χρήσης Συσκευής και Εφαρμογής Κινητού

Αυτό το εγχειρίδιο αφορά την φορητή συσκευή και την εφαρμογή κινητού του Scoliosense, ένα προϊόν της Aidplex. Το περιεχόμενο πληροφοριών αυτού του εγχειριδίου ανήκει στην Aidplex και παρέχεται μόνο για τον χειρισμό συσκευών και του λογισμικού της Aidplex.

Αυτό το εγχειρίδιο υπόκειται σε τροποποιήσεις. Η πιο πρόσφατη έκδοση είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση www.aidplex.com.











Κατασκευαστής: Aidplex

Διεύθυνση: Βασιλέως Ηρακλείου 40 Θεσσαλονίκη, 54623

Email: info@aidplex.com

Τελευταία τροποποίηση: 08-06-2023

Σύμβολα Ετικέτας Φορητής Συσκευής

Σύμβολο	Επεξήγηση
	Υποδεικνύει τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής
	Υποδεικνύει τον κωδικό παρτίδας του κατασκευαστή, ώστε να μπορεί να αναγνωρισθεί η παρτίδα.
	Υποδεικνύει τον αριθμό καταλόγου του κατασκευαστή, ώστε να μπορεί να αναγνωρισθεί η ιατρική συσκευή
	Υποδεικνύει το εύρος θερμοκρασίας στο οποίο μπορεί να εκτεθεί με ασφάλεια η ιατρική συσκευή
	Χρειάζεται ενημέρωση του χειριστή ή δράση του χειριστή προκειμένου να αποφευχθούν ανεπιθύμητες συνέπειες
	Υποδεικνύει την ανάγκη να συμβουλευτεί ο χρήστης τις οδηγίες χρήσης
	Σήμανση συμμόρφωσης CE: σήμανση με την οποία ο κατασκευαστής δηλώνει ότι μια συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό και σε άλλη ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης που προβλέπει την τοποθέτησή της
	Υποδεικνύει ότι το προϊόν είναι ιατρική συσκευή
	Υποδεικνύει μοναδικές πληροφορίες αναγνωριστικού συσκευής
	Υποδεικνύει το εύρος υγρασίας t στο οποίο μπορεί να εκτεθεί με ασφάλεια η ιατρική συσκευή

Περιεχόμενα

Σύμβολα Ετικέτας Φορητής Συσκευής	2
Περιεχόμενα	3
Εισαγωγή	4
Σχετικά με την εταιρεία	4
Σημαντική σημείωση ασφαλείας	5
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ	5
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ	5
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ	5
Ανταλλακτικά μέρη	5
Γενικές Συνθήκες Λειτουργίας	6
Λειτουργικό περιβάλλον	6
Αποθήκευση, συσκευασία και μεταφορά	6
Χρήση	6
ScolioSense app	6
Προσόντα χρήστη	6
Περιγραφή	6
Οφέλη	7
Τεχνικά χαρακτηριστικά	7
Εγκατάσταση	7
Ξεκινώντας	8
Σύνδεση λογαριασμού χρήστη	8
Πρώτη σύνδεση	8
Αρχική οθόνη	9
Οθόνη ελέγχου	10
Οθόνη ιστορικού χρήσης	11
Οθόνη επιβραβεύσεων	11
Οθόνη ρυθμίσεων	11
Διαδικασία Αντιμετώπισης προβλημάτων	12
Αποστολή σχολίων και παρατηρήσεων	12
Αποτροπή από εξοικονόμηση μπαταρίας	12
Φορητή Συσκευή ScolioSense	12
Προσόντα χρήστη	12
Περιγραφή	13
Οφέλη	13
Τεχνικά χαρακτηριστικά	13
Εγκατάσταση	14
Ξεκινώντας	14
Καταστάσεις Φωτεινής Ένδειξης ScolioSense	14
Αντιμετώπιση προβλημάτων	15

Νομικές πληροφορίες	17
Όροι Εγγύησης	17
Πώς να επανασυσκευάζεται για επιστροφή	18
Θεωρούνται ως σημάδια υλικής υποβάθμισης	18
Πολιτική εξυπηρέτησης	18
Προειδοποίηση	19
Στοιχεία επικοινωνίας	19

Εισαγωγή

Ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της **Aidplex**.

Το **ScolioSense** είναι ένα σύστημα που προορίζεται να διασφαλίσει την καλή ποιότητα χρήσης του κηδεμόνα σκολίωσης που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της σκολίωσης. Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης και διασφάλισης της πορείας της θεραπείας με κηδεμόνα και τη δυνατότητα ενημέρωσης των ασθενών για την κατάλληλη τοποθέτηση του κηδεμόνα με βάση τις οδηγίες του κλινικού ιατρού.

Το **ScolioSense** αποτελείται από:

1. Την φορητή συσκευή **ScolioSense** που διαθέτει αισθητήρες πίεσης και τοποθετείται στον κηδεμόνα σκολίωσης.
2. Την εφαρμογή λογισμικού για φορητές συσκευές **ScolioSense app** για ασθενείς με σκολίωση.
Η εφαρμογή χρησιμοποιείται για την καταγραφή της διάρκειας χρήσης του κηδεμόνα και για να υπενθυμίσει στον ασθενή την κατάλληλη τοποθέτηση του κηδεμόνα με βάση τις οδηγίες του επιβλέποντα ιατρού.
3. Διαδικτυακή πλατφόρμα για τη διασφάλιση της τήρησης της σωστής πορείας θεραπείας των ασθενών με το κηδεμόνα και της ποιότητας του χρόνου χρήσης του κηδεμόνα κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Σχετικά με την εταιρεία

Η **Aidplex** δραστηριοποιείται στον τομέα της υγείας με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών, ξεκινώντας με αυτούς της σκολίωσης.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία στο **www.aidplex.com**.

Σημαντική σημείωση ασφαλείας

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Η φορητή συσκευή **ScolioSense** δεν προορίζεται για οποιαδήποτε χρήση εκτός του κηδεμόνα σκολίωσης.
- Η φορητή συσκευή **ScolioSense** δεν προορίζεται για χρήση εκτός του κηδεμόνα σκολίωσης σε άμεση επαφή με το σώμα, ανοιχτές πληγές, καμμένο ιστό, κοντά στα μάτια και κοντά σε κατάγματα.
- Το **ScolioSense app** δεν προορίζεται για οποιαδήποτε χρήση παρά μόνο αποκλειστικά για ασθενείς σκολίωσης και χρήστες του συστήματος της **Aidplex**.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Το **ScolioSense** ενδείκνυται για:

- Την χρήση του **ScolioSense app** για φορητές συσκευές και της φορητής συσκευής κηδεμόνα από ασθενείς σκολίωσης που ακολουθούν θεραπεία με τη χρήση κηδεμόνα σκολίωσης.
- Την εξασφάλιση και διασφάλιση της σωστής πορείας της θεραπείας σκολίωσης με την χρήση κηδεμόνα σκολίωσης.
- Την διασφάλιση της τοποθέτησης αλλά και χρήσης του κηδεμόνα σύμφωνα με τις οδηγίες του επιβλέποντα ιατρού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση του συστήματος **ScolioSense** πέραν της ενδεδειγμένης.
- Το **ScolioSense app** πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ασθενείς σκολίωσης που ακολουθούν θεραπεία με τη χρήση κηδεμόνα σκολίωσης.
- Η φορητή συσκευή **ScolioSense** πρέπει να εγκατασταθεί μόνο σε κηδεμόνες σκολίωσης και μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό το οποίο έχει ακολουθήσει πρόγραμμα εκπαίδευσης για την εγκατάσταση.
- Η φορητή συσκευή **ScolioSense** δεν πρέπει να ανοίγει από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
- Οι ασθενείς δεν πρέπει να παρεμβαίνουν στην σύνδεση ή αποσύνδεση των αισθητήρων από την φορητή συσκευή **ScolioSense**.

Ανταλλακτικά μέρη

- Ειδικές ταινίες τοποθέτησης
- Αισθητήρες φορητής συσκευής **ScolioSense**.

Γενικές Συνθήκες Λειτουργίας

Λειτουργικό περιβάλλον

Η φορητή συσκευή **ScolioSense** λειτουργεί καθ'όλη τη διάρκεια χρήσης του κηδεμόνα. Οι ασθενείς θα πρέπει να βεβαιωθούν πως η φορητή συσκευή **ScolioSense** έχει μπαταρία ώστε να μην υπάρχει απώλεια δεδομένων κατά τη διάρκεια της θεραπείας σε συνδυασμό με τη χρήση του συστήματος **ScolioSense**. Το **ScolioSense app** είναι κατάλληλο για συσκευές Android και iOS, στις οποίες είναι απαραίτητη η ενεργοποίηση των υπηρεσιών τοποθεσίας και Bluetooth ώστε να είναι εφικτή η επικοινωνία με την φορητή συσκευή, καθώς επίσης διαθέσιμη σύνδεση στο διαδίκτυο ώστε να είναι εφικτή η επικοινωνία με ολόκληρο το σύστημα **ScolioSense**.

Αποθήκευση, συσκευασία και μεταφορά

- Θερμοκρασία: -10 °C έως 25 °C
- Υγρασία αέρα: 30% έως 75%

Χρήση

- Θερμοκρασία: -10 °C έως 40 °C
- Υγρασία αέρα: 30% έως 75%

ScolioSense app

Προσόντα χρήστη

Το **ScolioSense app** αφορά ασθενείς με σκολίωση οι οποίοι ακολουθούν θεραπεία με τη χρήση κηδεμόνα σκολίωσης. Οι ασθενείς χρησιμοποιούν τόσο την φορητή συσκευή **ScolioSense** όσο και το **ScolioSense app**. Το **ScolioSense app** χρησιμοποιείται από τους ασθενείς σκολίωσης για την καταγραφή της διάρκειας χρήσης του κηδεμόνα και την υπενθύμιση σχετικά με την ενδεδειγμένη τοποθέτηση του κηδεμόνα με βάση τις οδηγίες του επιβλέποντα ιατρού.

Περιγραφή

Το **ScolioSense app** βοηθάει τους ασθενείς να κατανοήσουν και να ακολουθήσουν σωστά την ενδεδειγμένη θεραπεία που έχει υποδείξει ο επιβλέπων ιατρός.

Η εφαρμογή αποτελείται από 6 οθόνες:

1. Οθόνη σύνδεσης: Οθόνη στην οποία πραγματοποιείται η σύνδεση στην εφαρμογή μέσω του email που έχει δοθεί στον ιατρό και τον κωδικό που έχει ήδη δημιουργηθεί.
2. Αρχική οθόνη: Περιέχει τις ώρες καθημερινής χρήσης του κηδεμόνα, εκπαιδευτικά ερωτηματολόγια καθώς και την κατάσταση μπαταρίας της φορητής συσκευής **ScolioSense**.
3. Οθόνη ελέγχου: Περιέχει την διαδικασία ελέγχου χρήσης του κηδεμόνα η οποία οπτικοποιεί την ενδεδειγμένη τοποθέτηση του κηδεμόνα σύμφωνα με τις οδηγίες του ιατρού.
4. Οθόνη ιστορικού χρήσης: Περιέχει αναλυτικά στοιχεία σχετικά με την χρήση του κηδεμόνα των προηγούμενων 30 ημερών.
5. Οθόνη επιβραβεύσεων: Περιέχει κατορθώματα και εμβλήματα τα οποία κατακτώνται με την σωστή πορεία της θεραπείας.
6. Οθόνη ρυθμίσεων: Περιέχει ρυθμίσεις της εφαρμογής, την λειτουργία αποσφαλμάτωσης της εφαρμογής καθώς επίσης και την λειτουργία ανατροφοδότησης.

Οφέλη

Το **ScolioSense app** είναι απαραίτητο για την λειτουργία του συστήματος **ScolioSense** καθώς βοηθάει τον ασθενή να ακολουθήσει την ενδεδειγμένη θεραπεία σκολίωσης που του έχει υποδείξει ο επιβλέπων ιατρός του. Η επικοινωνία ανάμεσα στο **ScolioSense app** και την φορητή συσκευή **ScolioSense** του κηδεμόνα αποτελούν ζωτικό κομμάτι στην επίβλεψη του επιβλέποντα ιατρού με την χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής ώστε να διασφαλιστεί ή σωστή πορεία της θεραπείας.


Τεχνικά χαρακτηριστικά

Οι ελάχιστες απαιτήσεις του **ScolioSense app** καταγράφονται παρακάτω:

Λειτουργικό Σύστημα	<ul style="list-style-type: none">• Android: 7.0 - Android 13• iOS: 9.0+
Συνδεσιμότητα	Bluetooth(Bluetooth Low Energy), GPS, δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο

Εγκατάσταση

Η εγκατάσταση του **ScolioSense app** πραγματοποιείται από τα αντίστοιχα καταστήματα εφαρμογών Play store και App store για συσκευές Android και iOS αντίστοιχα.

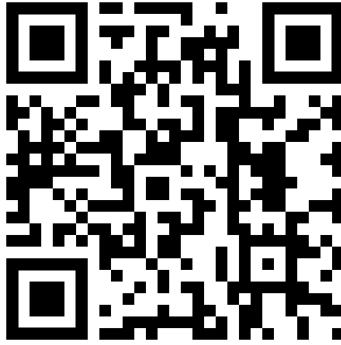

Ο λογαριασμός σύνδεσης στην εφαρμογή δημιουργείται από τον ιατρό κατά την διάρκεια αγοράς και εγκατάστασης της συσκευής στον κηδεμόνα σκολίωσης. Ο κωδικός πρόσβασης δημιουργείται από τους ασθενείς μέσα από ένα email το οποίο αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνσή τους.

Σημαντικό:

Το **ScolioSense app** πρέπει να είναι εγκατεστημένο και ενημερωμένο καθ'όλη την διάρκεια της θεραπείας με τον κηδεμόνα σκολίωσης και το **ScolioSense** της **Aidplex**.

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

Για την σωστή λειτουργία του **ScolioSense app** θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένες τις υπηρεσίες τοποθεσίας, Bluetooth και σύνδεσης στο διαδίκτυο ώστε να μπορεί να πραγματοποιηθεί η σύνδεση με τη φορητή συσκευή **ScolioSense** του κηδεμόνα σκολίωσης, καθώς επίσης η επικοινωνία και η μεταφορά των δεδομένων στο υπόλοιπο σύστημα του **ScolioSense**.

Σύνδεση λογαριασμού χρήστη

Για να συνδεθείτε στην εφαρμογή θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το email που έχετε δώσει στον ιατρό σας και τον κωδικό που έχετε δημιουργήσει.

Πρώτη σύνδεση

Στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε πρώτη φορά την εφαρμογή:

- Θα σας ζητηθεί να συνδέσετε την εφαρμογή με την φορητή συσκευή που σας έχουν εγκαταστήσει στον κηδεμόνα σκολίωσής σας.

Για να συνδέσετε την συσκευή **ScolioSense** με την εφαρμογή θα πρέπει:

1. Να βρίσκεστε στον ίδιο χώρο με τον κηδεμόνα σκολίωσής σας (εφόσον έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση την συσκευή **ScolioSense**).
2. Θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένες τις υπηρεσίες: Bluetooth, τοποθεσίας και διαδικτύου της κινητής συσκευής σας.







3. Στην συνέχεια θα πρέπει να επιλέξετε το όνομα του **ScolioSense** σας, το οποίο θα αναγράφεται στο εσωτερικό της συσκευασίας, μέσα από τις διαθέσιμες συσκευές που θα εμφανιστούν στο **ScolioSense app**.
4. Τέλος θα πρέπει να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας παρατηρώντας την περιοδική εκπομπή μπλε φωτός από την συσκευή **ScolioSense**.



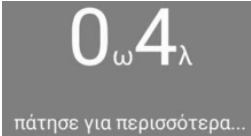

Αρχική οθόνη

Στην αρχική οθόνη της εφαρμογής μπορείτε να πληροφορηθείτε για τον συνολικό χρόνο χρήσης του κηδεμόνα σας, καθώς και τις ενδεδειγμένες ώρες χρήσης, σύμφωνα με τις οδηγίες του ιατρού σας.

Επιπλέον μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο χρήσης του κηδεμόνα σας καθώς επίσης να απαντήσετε το ερωτηματολόγιο της ημέρας.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή θα πρέπει να έχετε φορτισμένη την φορητή συσκευή **ScolioSense**. Ο έλεγχος της κατάστασης της μπαταρίας της φορητής συσκευής πραγματοποιείται μέσα από την εφαρμογή, πατώντας το εικονίδιο της μπαταρίας.

Εικονίδιο	Επεξήγηση
	Ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικού χαρακτήρα σχετικά με την θεραπεία της σκολίωσης
	Μπαταρία πλήρης
	Μπαταρία μέτριας κατάστασης
	Μπαταρία σε πολύ χαμηλό επίπεδο
	Μπαταρία σε φόρτιση
	Αγνωστη τιμή μπαταρίας

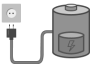	Μπαταρία σε φόρτιση
	Συνολικός χρόνος χρήσης κηδεμόνα σκολίωσης
	Αναλυτική παρουσίασης χρόνου χρήσης κηδεμόνα
	Γραφική αναπαράσταση του χρόνου χρήσης του κηδεμόνα σε σχέση με την προτεινόμενη χρήση κηδεμόνα που έχει ορίσει ο επιβλέπων ιατρός


Οθόνη ελέγχου

Η οθόνη ελέγχου σας βοηθάει να ακολουθήσετε τις οδηγίες που σας έχει δώσει ο ιατρός για την τοποθέτηση και χρήση του κηδεμόνα σκολίωσης.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την οθόνη θα πρέπει:

1. Να έχετε ενεργοποιημένες τις υπηρεσίες Bluetooth και τοποθεσίας της κινητής συσκευής σας.
2. Να έχετε βάλει τον κηδεμόνα σκολίωσης σας με ένα ελαφρύ σφίξιμο.
3. Στην συνέχεια να ανοίξετε την εφαρμογή στην οθόνη ελέγχου και να πατήσετε το κουμπί “Έλεγχος”.

Μόλις αρχίσει η διαδικασία ελέγχου θα πρέπει να ελέγξετε πως η/οι μπίλια/ες που εμφανίστηκαν βρίσκονται μέσα στα όρια που υπάρχουν σε κάθε μπάρα, σφίγγοντας ή ξεσφίγγοντας τον κηδεμόνα σας.

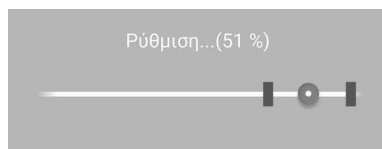


Μόλις τοποθετήσετε σωστά τον κηδεμόνα σας θα πρέπει να περιμένετε έως ότου η διαδικασία ολοκληρωθεί.

Σημειώσεις:

- Φροντίστε η φορητή συσκευή να είναι σε λειτουργία
- Φροντίστε να βρίσκεστε σε όρθια θέση κατά την διάρκεια ελέγχου της τοποθέτησης του κηδεμόνα σας


Οθόνη ιστορικού χρήσης

Η οθόνη ιστορικού σας βοηθάει να δείτε τις πληροφορίες χρήσης του κηδεμόνα σας για τις τελευταίες 30 ημέρες. Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες της κάθε ημέρας επιλέγοντας την ημέρα που επιθυμείτε.

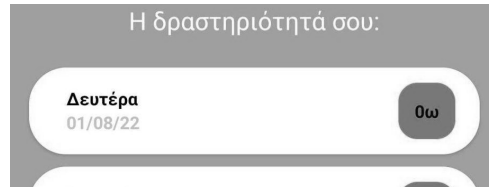

Οθόνη επιβραβεύσεων

Η οθόνη επιβραβεύσεων σας βοηθάει να δείτε όλα τα βραβεία που έχετε ξεκλειδώσει καθώς και την πορεία των κατορθωμάτων σας, ακολουθώντας την θεραπεία σας.

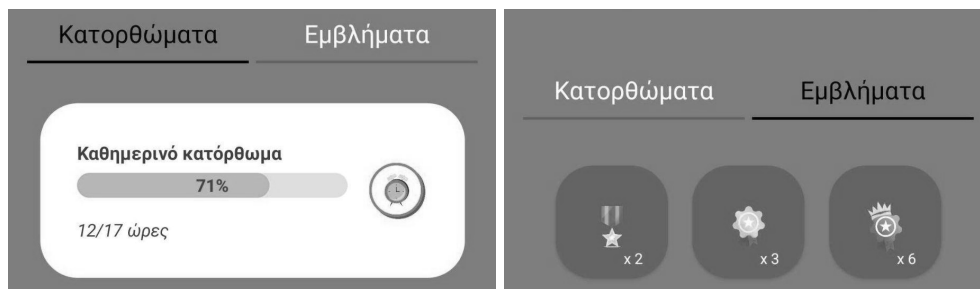

Οθόνη ρυθμίσεων

Η οθόνη ρυθμίσεων σας βοηθάει να ρυθμίσετε τα παρακάτω:

1. Να αλλάξετε τη γλώσσα της εφαρμογής ανάμεσα στα Ελληνικά και Αγγλικά (απαιτείται επανεκκίνηση της εφαρμογής).
2. Να εκτελέσετε τη διαδικασία αντιμετώπισης προβλημάτων, στην οποία δεν θα πρέπει να φοράτε τον κηδεμόνα σας, ώστε να αναγνωριστούν αν υπάρχουν λανθασμένες ενδείξεις από τους αισθητήρες.
3. Να μας στείλετε σχόλια ή παρατηρήσεις ώστε να βελτιώσουμε το **ScolioSense app**.
4. Να αφαιρέσετε την εφαρμογή από την διαδικασία εξοικονόμησης μπαταρίας της κινητής συσκευής σας (μόνο για Android συσκευές).
5. Να αποσυνδεθείτε από το **ScolioSense app**.
6. Να ενημερωθείτε σχετικά με την διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από το σύστημα **ScolioSense**.

Διαδικασία Αντιμετώπισης προβλημάτων

Για την λειτουργία αντιμετώπισης προβλημάτων, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες που θα σας εμφανιστούν στην οθόνη της εφαρμογής.

Σημαντικό:

1. Θα πρέπει να **μην** φοράτε τον κηδεμόνα σκολίωσης.
2. Η φορητή συσκευή θα πρέπει να είναι σε λειτουργία.
3. Θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένες τις υπηρεσίες τοποθεσίας και Bluetooth στην κινητή σας συσκευή.

Στο τέλος της διαδικασίας θα ενημερωθείτε για το αποτέλεσμα του ελέγχου.

Αποστολή σχολίων και παρατηρήσεων

Επιλέγοντας την “Αναφορά” μπορείτε να στείλετε σχόλια και παρατηρήσεις στην ομάδα ανάπτυξης και συντήρησης του **ScolioSense app** βοηθώντας στην βελτίωσή της.

Αποτροπή από εξοικονόμηση μπαταρίας

Επιλέγοντας την Αγνόηση βελτιστοποίησης μπαταρίας θα κατευθυνθείτε στον κατάλογο εφαρμογών προς εξοικονόμηση μπαταρίας, στον οποίο θα πρέπει να επιλέξετε την αγνόηση της εξοικονόμηση μπαταρίας κατά την διάρκεια εκτέλεσης της εφαρμογής.

Σημαντικό:

- Η αποτροπή από εξοικονόμηση μπαταρίας είναι διαθέσιμη **μόνο** για συσκευές με λειτουργικό σύστημα **Android**.
- Δεν είναι απαραίτητη η ενεργοποίηση της παρούσας ρύθμισης παρά μόνο αν παρατηρηθεί προβληματική λειτουργία της εφαρμογής στο παρασκήνιο.

Φορητή Συσκευή ScolioSense

Προσόντα χρήστη

Ασθενείς με σκολίωση οι οποίοι ακολουθούν θεραπεία με χρήση κηδεμόνα σκολίωσης. Οι ασθενείς χρησιμοποιούν τόσο την φορητή συσκευή **ScolioSense** όσο και το **ScolioSense app**. Η φορητή συσκευή **ScolioSense** διαθέτει αισθητήρες πίεσης και τοποθετείται εξωτερικά του κηδεμόνα σκολίωσης. Το **ScolioSense app** χρησιμοποιείται από τους ασθενείς σκολίωσης για την καταγραφή της διάρκειας χρήσης του κηδεμόνα και την υπενθύμιση του ασθενή σχετικά με την ενδεδειγμένη τοποθέτηση του κηδεμόνα με βάση τις οδηγίες του επιβλέποντα ιατρού.

Περιγραφή

Η φορητή συσκευή **ScolioSense** χρησιμοποιεί αισθητήρες πίεσης ώστε να ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο τον ασθενή και τον ιατρό για τις ώρες χρήσης του κηδεμόνα και αν η χρήση είναι ενδεδειγμένη βάσει της θεραπείας που του έχει υποδείξει ο ιατρός.

Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα στον ασθενή να ρυθμίσει τον κηδεμόνα του βάσει των υποδείξεων του ιατρού του. Η φορητή συσκευή **ScolioSense** χρησιμοποιεί επαναφορτιζόμενη μπαταρία, η οποία διαρκεί 21 μέρες. Η συσκευή μπορεί να φορτίσει χρησιμοποιώντας καλώδιο Type-C από οποιοδήποτε φορτιστή (Το καλώδιο και ο φορτιστής δεν περιλαμβάνονται στην συσκευασία).

Οφέλη

Η φορητή συσκευή **ScolioSense** δίνει την δυνατότητα σε έναν ασθενή ο οποίος κάνει χρήση κηδεμόνα σκολίωσης να βλέπει σε πραγματικό χρόνο πόση ώρα κάνει χρήση του κηδεμόνα του σε καθημερινή βάση μέσω του **ScolioSense app**. Επίσης του δίνει την δυνατότητα να ρυθμίζει τον κηδεμόνα σκολίωσης μέσω της εφαρμογής του βάσει των υποδείξεων του ιατρού του. Παράλληλα μέσω των μετρήσεων της φορητής συσκευής **ScolioSense** δίνεται η δυνατότητα στον ιατρό να παρακολουθεί την πορεία της θεραπείας, δείχνοντας την ώρα χρήσης του κηδεμόνα και αν αυτή είναι η ενδεδειγμένη, μέσα από την διαδικτυακή πλατφόρμα του **ScolioSense**. Καθ'αυτόν τον τρόπο το **ScolioSense** βοηθάει στην θεραπεία της σκολίωσης καθώς κρατά τόσο τον ιατρό όσο και τον ασθενή ενήμερο για την πορεία της θεραπείας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Συνδεσιμότητα	BLE (Bluetooth Low Energy)
Βάρος	20gr (+/-1gr)
Διαστάσεις (διάμετρος x ύψος)	52 x 15 mm
Ασύρματη εμβέλεια ανίχνευσης*	-16 dBm (έως 13 μέτρα)
Ασύρματη εμβέλεια επικοινωνίας*	-16 dBm (έως 7 μέτρα)
Αριθμός αισθητήρων πίεσης	1 έως 3
Μέγιστη δύναμη μέτρησης αισθητήρων	5 kg
Αυτονομία	21 μέρες χρήσης της συσκευής με 2 ώρες φόρτισης
Τροφοδοσία συσκευής	Li-Po Battery 100 mAh
Συχνότητα ασύρματης μετάδοσης	2402-2480 MHz
Ισχύς ακτινοβολίας εξόδου	25.11 μW

*Η εμβέλεια ανίχνευσης και επικοινωνίας έχει μετρηθεί εκτός εσωτερικού χώρου και χωρίς εμπόδια. Για βέλτιστες επιδόσεις η εμβέλεια χρήσης της συσκευής πρέπει να γίνεται έως και τα 5 μέτρα.

Εγκατάσταση

Η εγκατάσταση της φορητής συσκευής πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό.

Σημαντικό: Μη προσπαθήσετε να αλλάξετε θέση ή να αποσυνδέσετε την συσκευή **ScolioSense** από τον κηδεμόνα σκολίωσης. Οποιαδήποτε παρέμβαση στην συσκευή από τον χρήστη εκτός της διαδικασίας επανεκκίνησης της συσκευής (reset) δεν αποτελεί προβλεπόμενη χρήση της συσκευής.

Ξεκινώντας

Κατά τη διάρκεια της πρώτης επίσκεψης στον ιατρό θα πραγματοποιηθεί η πρώτη ρύθμιση της φορητής συσκευής **ScolioSense** ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το **ScolioSense app** σε συνδυασμό με την φορητή συσκευή.

Σημαντικό: Ο ιατρός θα πρέπει να βεβαιωθεί πως η φορητή συσκευή είναι λειτουργική, πραγματοποιώντας επανεκκίνηση της συσκευής (reset) και αναγνωρίζοντας την ακολουθία απο 2 πράσινες ενδείξεις, ώστε να μπορεί να γίνει η πρώτη ρύθμιση στον κηδεμόνα σκολίωσης του ασθενή. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ακολουθία με 2 πράσινες ενδείξεις, η συσκευή θα πρέπει να φορτιστεί για τουλάχιστον 30 λεπτά.

Καταστάσεις Φωτεινής Ένδειξης ScolioSense

Περιγραφή Φωτεινής Ένδειξης	Κατάσταση Συσκευής
Σταθερή κόκκινη ένδειξη	Η συσκευή φορτίζει (ολοκλήρωση φόρτισης όταν σταματήσει η ένδειξη)
Περιοδική μπλε ένδειξη με γρήγορο ρυθμό	Συγχρονισμός δεδομένων με ScolioSense app
Περιοδική κόκκινη ένδειξη	Ανάγκη συγχρονισμού με ScolioSense app
Σταθερή μπλε ένδειξη	Αναμονή οδηγιών χρήσης από τον επιβλέποντα ιατρό
Σταθερή μπλε ένδειξη (3 δευτερόλεπτα), σταθερή εκπομπή μωβ φωτός κατά τη διάρκεια της αναβάθμισης και άμεση εναλλαγή σε πράσινη ένδειξη δύο φορές	Αναβάθμιση λογισμικού φορητής συσκευής
Περιοδική πράσινη ένδειξη δύο φορές	Επανεκκίνηση συσκευής

Περιοδική μπλε ένδειξη με αργό ρυθμό	Επιβεβαίωση πως πρόκειται για την δική σας συσκευή κατά την διάρκεια της σύνδεσής του ScolioSense app με την συσκευή
--------------------------------------	---

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Αντιμετώπιση
Η φορητή συσκευή δεν είναι ενεργοποιημένη (η συσκευή δεν μπορεί να συνδεθεί με το ScolioSense app)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Βεβαιωθείτε ότι οι υπηρεσίες τοποθεσίας και bluetooth είναι ενεργοποιημένες στην κινητή συσκευή σας 2. Ελέγξτε για το αν η φορητή συσκευή είναι φορτισμένη. Επανεκκινήστε την συσκευή με το πάτημα του κουμπιού reset στο πάνω μέρος της συσκευής. Αν η συσκευή ανταποκριθεί (ακολουθία από 2 πράσινες ενδείξεις) τότε είναι ενεργοποιημένη, διαφορετικά θα πρέπει να την φορτίσετε για τουλάχιστον 30 λεπτά. 3. Επανεκκινήστε το ScolioSense app. Κλείστε την εφαρμογή από το παρασκήνιο και απενεργοποιήστε τις υπηρεσίες τοποθεσίας και bluetooth. Στην συνέχεια ενεργοποιήστε τις παραπάνω υπηρεσίες και πραγματοποιήστε δοκιμές σύνδεσης με την φορητή συσκευή. 4. Αναζητήστε τις διαθέσιμες Bluetooth συσκευές κοντά σας χρησιμοποιώντας την κινητή σας συσκευή. Σε περίπτωση που η ονομασία της συσκευής σας δεν εμφανιστεί τότε θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την Aidplex στα στοιχεία: Τηλέφωνο: 2316014433 Email: support@aidplex.com <p>Αν το πρόβλημα συνεχιστεί επικοινωνήστε με την Aidplex.</p>
Το Scoliosense μετράει λάθος χρόνο χρήσης	<ol style="list-style-type: none"> 1. Αν ο χρόνος χρήσης είναι μεγαλύτερος του πραγματικού χρόνου, τότε θα πρέπει να εκτελέσετε την διαδικασία αντιμετώπισης προβλημάτων στην οθόνη ρυθμίσεις

	<p>του ScolioSense app. Προσοχή: δεν θα πρέπει να κάνετε χρήση του κηδεμόνα κατά την διαδικασία αντιμετώπισης προβλημάτων. Στην περίπτωση που η διαδικασία εντοπίσει κάποιο πρόβλημα με τα αισθητήρια τότε επικοινωνήστε με την Aidplex στα στοιχεία: Τηλέφωνο: 2316014433 Email: support@aidplex.com</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Αν ο χρόνος χρήσης είναι μικρότερος του πραγματικού τότε επιβεβαιώστε πως η διαδικασία χρήσης του κηδεμόνα στην οθόνη ελέγχου της εφαρμογής ανταποκρίνεται στην τοποθέτηση του κηδεμόνα από τον ασθενή σύμφωνα με τις οδηγίες του επιβλέπων ιατρού 3. Επανεκκινήστε την φορητή συσκευή πατώντας το κουμπί reset στο πάνω μέρος της φορητής συσκευής. <p>Αν το πρόβλημα συνεχιστεί επικοινωνήστε με την Aidplex.</p>
<p>Δεν εμφανίζονται τα σημεία τοποθέτησης του κηδεμόνα στην διαδικασία ελέγχου του ScolioSense app</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Αποσυνδεθείτε από το ScolioSense app και επανασυνδεθείτε 2. Θα πρέπει να κλείσετε το ScolioSense app από το παρασκήνιο και να το ανοίξετε ξανά. <p>Αν το πρόβλημα συνεχιστεί επικοινωνήστε με την Aidplex.</p>

Νομικές πληροφορίες

Όροι Εγγύησης

Αυτή η εγγύηση δεν ισχύει εάν το προϊόν:

- Χρησιμοποιείται με μη συμβατά προϊόντα
- Χρησιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς όπως ενοικίαση
- Τροποποιείται
- Έχει καταστραφεί από ατύχημα, κακή χρήση, φθορά ή οποιαδήποτε άλλη αιτία που δεν σχετίζεται με ελαττωματικά υλικά

Για να λάβετε υπηρεσίες εγγύησης, πρέπει να προσκομιστεί έγκυρη απόδειξη αγοράς με τη μορφή τιμολογίου πώλησης ή απόδειξης.

Η **Aidplex** αποκλείει κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων, απώλεια κερδών ή οποιαδήποτε άλλη απώλεια ή ζημία υποστεί ο τελικός πελάτης.

Η φορητή συσκευή **ScolioSense** έχει εγγύηση για 2 έτη από την αγορά, ημερομηνία κατά την οποία χρησιμοποιείται σύμφωνα με το παρόν εγχειρίδιο.

Η **Aidplex** μπορεί να προχωρήσει στην αντικατάσταση μιας συσκευής **ScolioSense** καλύπτονται από την εγγύηση δωρεάν.

Προσοχή:

Η εγγύηση είναι άκυρη σε περίπτωση τροποποίησης ή αντικατάστασης οποιουδήποτε εξαρτήματος σε συσκευή **ScolioSense** από προσωπικό χωρίς την εξουσιοδότηση της **Aidplex** ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου της.

Η **Aidplex** δεν εγγυάται κανένα θεραπευτικό αποτέλεσμα κατά τη χρήση του **ScolioSense**.

Για την έναρξη της διαδικασίας επιστροφής ο πελάτης πρέπει να λάβει ένα έγκυρο αριθμό RMA (Return Material Authorization). Η εξουσιοδότηση επιστροφής εμπορευμάτων (RMA) αφορά στη διαδικασία επιστροφής ενός προϊόντος για τη λήψη επιστροφής χρημάτων, αντικατάστασης ή επισκευής κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης του προϊόντος.

Για την απόκτηση ενός RMA αριθμού, ο πελάτης, θα πρέπει να επικοινωνήσει με το τμήμα προμηθειών και συγκεκριμένα με την αποθήκη, με τους ακόλουθους τρόπους:

- Τηλέφωνο: 2316014433
- Email: support@aidplex.com

Κατά την επικοινωνία του πελάτη με την εταιρεία, ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να δηλώσει τον αριθμό παρτίδας (LOT Number) που αναγράφεται στην ετικέτα του προϊόντος και να δηλώσει την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος μαζί με το παραστατικό αγοράς του προϊόντος.

Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντος εντός της εγγύησης η εταιρεία υποχρεούται να αντικαταστήσει το προϊόν με ένα καινούργιο και να διεξάγει έρευνα για του λόγους που η συσκευή κρίθηκε ελαττωματική.

Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντος εκτός της εγγύησης η εταιρεία δεν υποχρεούται να αντικαταστήσει το προϊόν όμως διεξάγει έρευνα για τους λόγους που η συσκευή κρίθηκε ελαττωματική. Στην συγκεκριμένη περίπτωση η εταιρεία θα επικοινωνήσει με τον πελάτη για την πορεία της επιστροφής.

Πώς να επανασυσκευάζεται για επιστροφή

Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για τη συσκευασία των εμπορευμάτων ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής μεταφορά τους. Όποτε είναι δυνατόν οι πελάτες θα πρέπει να χρησιμοποιούν την αρχική συσκευασία του προϊόντος. Ο αριθμός RMA πρέπει να εμφανίζεται στην συσκευασία αποστολής. Ο πελάτης θα πρέπει να τοποθετήσει και την απόδειξη πληρωμής μέσα στη συσκευασία του προϊόντος.

Θεωρούνται ως σημάδια υλικής υποβάθμισης

- Γρατσουινιές
- Σπασμένα μέρη λόγω πτώσεων ή ακατάλληλων χρήσεων
- Τροποποίηση ή αντικατάσταση οποιουδήποτε εξαρτήματος από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό
- Έκθεση σε υγρό περιβάλλον
- Υποβρύχια βύθιση
- Έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες

Πολιτική εξυπηρέτησης

Αναγνωρίζεται ότι κάθε φορά που γίνεται επισκευή του προϊόντος **Scoliosense**, αυτή η υπηρεσία ενδέχεται να αλλάξει τις ρυθμίσεις ή να προκαλέσει απώλεια δεδομένων ή ορισμένων λειτουργιών.

Προειδοποίηση

Πριν την αποστολή προς επισκευή θα πρέπει να γίνει συγχρονισμός των δεδομένων της φορητής συσκευής μέσω του **ScolioSense app**, ούτως ώστε να διασφαλιστούν τα δεδομένα που έχουν καταγραφεί από την φορητή συσκευή του κηδεμόνα.

Η **Aidplex** διαθέτει ομάδα υποστήριξης για το **ScolioSense** στην οποία μπορεί να απευθυνθείτε για οποιαδήποτε απορία ή πρόβλημα σχετικά με το προϊόν.

Τηλέφωνο: 2316014433

Email: support@aidplex.com

Προειδοποίηση

Το **ScolioSense** είναι ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν κατηγορίας 1, εξάρτημα του ιατροτεχνολογικού προϊόντος κατηγορίας 1 κηδεμόνα σκολίωσης.

Το **ScolioSense** πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες χρήσης.

Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός.

Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν το **ScolioSense**. Συμβουλευτείτε ανα τακτά διαστήματα τον ιστότοπο της **Aidplex** ή του **ScolioSense** για διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με αντενδείξεις, κινδύνους ή παρενέργειες σχετικά με το **ScolioSense**.

Το **ScolioSense** δεν προσφέρει συμβουλές θεραπείας ή οποιαδήποτε ιατρική διάγνωση.

Η **Aidplex** δεν εγγυάται κανένα θεραπευτικό αποτέλεσμα κατά τη χρήση του **ScolioSense**.

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση: Βασιλέως Ηρακλείου 40 Θεσσαλονίκη, 54623

Τηλέφωνο: 2316014433

Email: info@aidplex.com